

# Latviski:

Ambu Lifekey ir aizsargājoša vienreizējas lietošanas maska ar vienvirziena vārstu elpināšanai no mute-mutē vai no mutes-degunā.

1. Atlociet masku.
2. Uzraksts "PATIENT" ir vērsts pret pacientu. Uzraksts "TRIITAQ" ir vērsts pret glābēju.  
Novietojums uz pacienta sejas.
3. Novietojiet cilpas aiz pacienta ausīm.



No mutes  
degunā



No mutes  
mutē