



# Littmann® CORE Stethoscope

Connects to Eko Software

Eko

3M



en	English	pp. 1	sl	Slovenski	pp. 33
fr	Français	pp. 3	et	Eesti	pp. 35
de	Deutsch	pp. 5	lv	Latviesu	pp. 37
it	Italiano	pp. 7	lt	Lietuviskai	pp. 39
es	Español	pp. 9	ro	Romana	pp. 41
nl	Nederlands	pp. 11	hr	Hrvatski	pp. 43
sv	Svenska	pp. 13	bg	Български	pp. 45
da	Dansk	pp. 15			
no	Norsk	pp. 17			
fi	Suomi	pp. 19			
pt	Português	pp. 21			
el	Ελληνικά	pp. 23			
pl	Polski	pp. 25			
hu	Magyar	pp. 27			
cs	Čeština	pp. 29			
sk	Slovensky	pp. 31			

# 3M™ Littmann® CORE digitālais stetoskops

## Darba ātrās uzsākšanas instrukcija

Lejupielādējiet lietotni "Eko" veikalā Apple App Store® vai Google Play Store®.

Savā tālrunī vai planšetdatorā ieslēdziet Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju, palaidiet lietotni un ieslēdziet CORE stetoskopu.


Eko

## Iepakojuma saturs

- Eko CORE digitālā palīgierīce un 3M™ Littmann® kardioloģijas IV™ stetoskops
- 3M Littmann Snap Tight mikstos ausu uzgaļu (mazais izmērs) papildu komplekts
- Gredzens, kas nerada aukstuma sajūtu
- USB uzlādes kabelis
- Darba ātrās uzsākšanas instrukcija

## Ausu uzgaļi

Ievietojiet ausu uzgaļus virzienā uz priekšu.

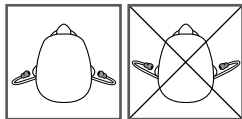

## Skaļums

Skaļuma regulēšanai izmantojiet pogas (+) un (-). Skaļumu var regulēt 7 līmeņos.

## Ieslēgšana un izslēgšana

Kad CORE stetoskops ir ieslēgts, tas darbojas kā stetoskops bez skaņas pastiprināšanas.

Lai ieslēgtu CORE stetoskopu, iespiediet barošanas pārslēgu. Gaismas indikators sāk mirgot. Tagad ausu uzgaļos varat dzirdēt pastiprinātu un filtrētu skaņu.

## Telemedicīnas un mākslīgā intelekta funkcijas

"Eko" piedāvā izmantot telemedicīnas un mākslīgā intelekta funkcijas, bet tām ir nepieciešams programmatūras abonements (vietās, kur tas ir pieejams; tiek pārdots atsevišķi).

Abonementu varat pieteikt tiešsaistē, vietnē [ekohealth.com](http://ekohealth.com).

## Aktīvā trokšņu novēršana

CORE stetoskopam ir aktīvā trokšņu novēršanas funkcija, lai novērstu apkārtnes vides troksni. Aktīvo trokšņu novēršanu vai ieslēgt vai izslēgt "Eko" lietotnē.



## Indikācijas

()) (mirgo)

CORE stetoskops ir ieslēgts un meklē ierīci

● (dzeltens)

CORE stetoskops ir ieslēgts, un notiek uzlāde

()) (dzeltens)

CORE stetoskopa akumulatora uzlādes līmenis ir zems

○

CORE stetoskops ir ieslēgts un pievienots

● (zaļš)


CORE stetoskops ir pilnībā uzlādēts

()) (zils)

CORE stetoskops veic ierakstu

## Ieraksts

Kad ir izveidots savienojums ar lietotni "Eko app", nospiediet pogu (o) un sāciet ierakstu.

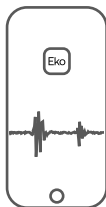

## Uzlāde

Pievienojiet mikro USB kabeli pie CORE stetoskopa un izmantojiet USB sienas uzlādes ierīci, kurai ir UL sertifikāts vai CE marķējums, 5 V USB. CORE stetoskops pilnībā uzlādējas aptuveni 2 stundu laikā. Kad tas ir pilnībā uzlādēts, gaismas indikators pārslēdzas zajā krāsā.

## Lietotāja rokasgrāmata

Pirms Littmann CORE stetoskopa izmantošanas pārskatiet lietotāja rokasgrāmata. Rokasgrāmatu varat apskatīt vietnē: [ekohealth.com/getstarted](http://ekohealth.com/getstarted)  
Papildinformāciju par 3M ierīcēm skatiet vietnē [HCBGregulatory.3M.com](http://HCBGregulatory.3M.com)

## Apkope un atbalsts

ASV: skatiet vietni: [littmann.com/service](http://littmann.com/service) vai zvaniet pa tālruni 1-800-228-3957. Ja esat ārpus ASV, skatiet vietni: [littmann.com](http://littmann.com); tajā ir informācija par jūsu vietējo "3M" biroju.

"Apple App Store" ir "Apple Inc." prečzīme.  
"Google Play" un "Google Play" logotips ir "Google LLC" prečzīmes.  
Bluetooth® ir "Bluetooth SIG" reģistrēta prečzīme.  
LBL 143 izdevums B

System assembled by 3M Company



**3M Deutschland GmbH**  
Health Care Business

[www.littmann.com](http://www.littmann.com)



Made in USA with  
Globally Sourced Materials

 **3M Company**

2510 Conway Ave.  
St. Paul, MN 55144 USA

**MD**

**CE**

 **3M Deutschland GmbH**  
Health Care Business  
Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss, Germany



Made in Malaysia


 **Eko Devices, Inc.**

1212 Broadway, Suite 100  
Oakland, CA 94612 USA

**MD**

**CE**

**0537**

 **Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

©2020 3M; Eko Devices Inc. All rights reserved.

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Cardiology IV are marks and/or registered marks of 3M.

Unauthorized use prohibited.

Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc.

Issue Date: 2020-11

34-8726-3344-0