


## COD. 27733 SEDIA GIREVOLE CON MANIGLIA PER DOCCIA

**⚠ ATTENZIONE:** Gli operatori devono leggere e capire completamente questo foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto.

- ▲ Controllare che la sedia doccia con maniglia sia assemblata in modo appropriato prima dell'uso.
- ▲ Rispettare le indicazioni sulla portata massima indicate dall'etichetta.

### ASSEMBLAGGIO / FISSAGGIO:

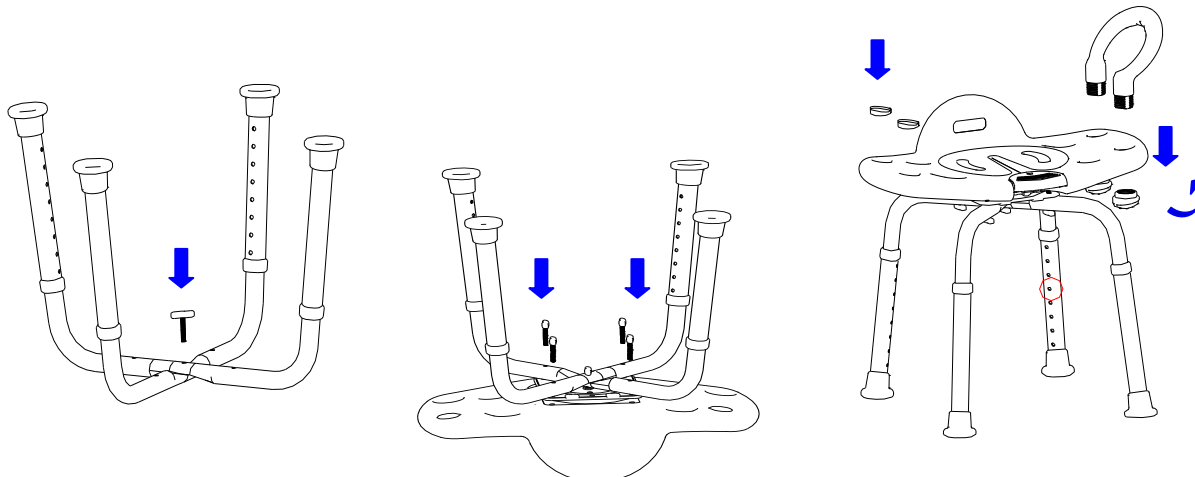


1. Incrociare le due gambe per formare la giusta angolazione e avvitare il tassello nel foro centrale.


2. Avvitare le altre viti alla sedia doccia.

3. Regolare l'altezza del sedile.  
4. Scegliere una estremità per assemblare la maniglia e posizionare i tappi sull'altro lato.

### MODO D'USO:

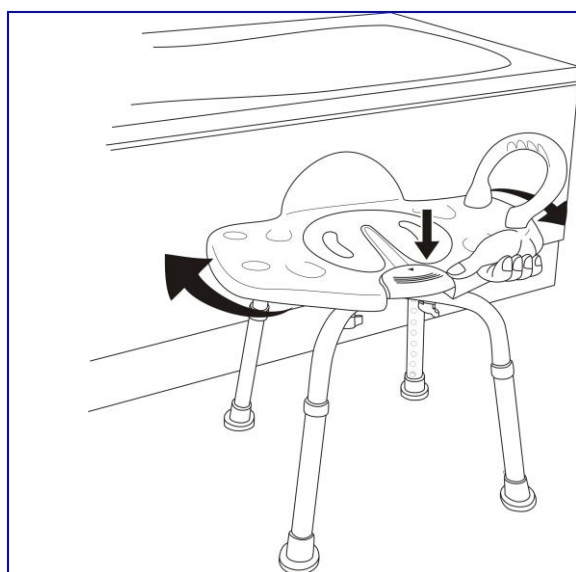

1. Regolare l'altezza del sedile, sedersi. Spingere l'apposita linguetta verso il basso per ruotare il sedile.
2. Girare verso destra o sinistra impugnando con una mano la maniglia.

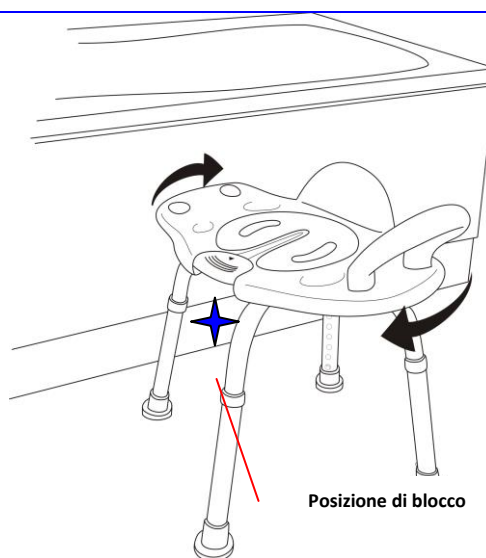


3. Spingere la linguetta e girare.
4. Attivare la posizione di blocco con il sedile parallelo all'asse principale.

## CODE 27733 SWIVEL SHOWER CHAIR USER'S MANUAL

**⚠ WARNING:** Be sure to read all information and directions before use.



- ▲ **DO NOT** install this equipment without first reading and understanding this instruction sheet.
- ▲ **ALWAYS** verify that the device is secure prior to use.
- ▲ **ALWAYS** observe the weight limit on the labelling of your product.
- ▲ **ENSURE** to follow all instruction required while operating this device.

### ASSEMBLY/FITTING:

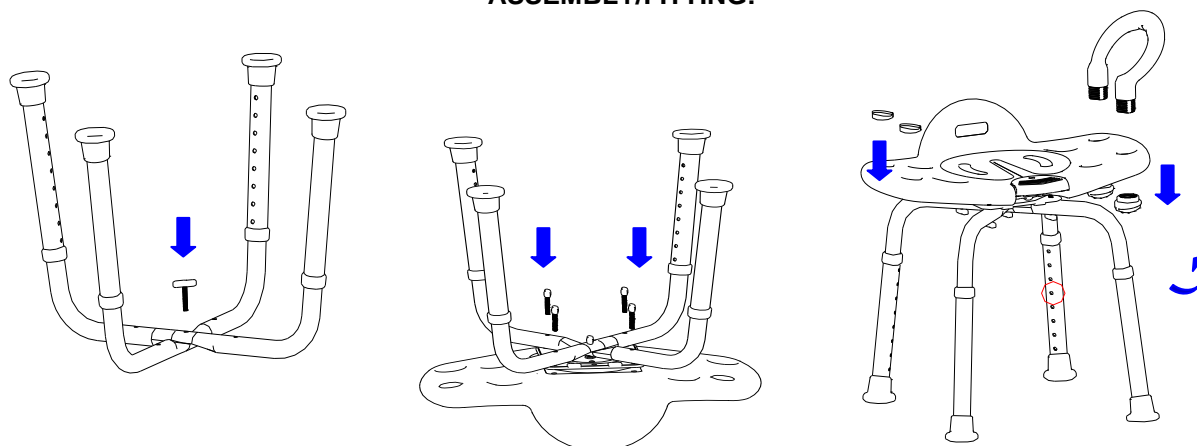

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <p>1. Put two legs cross to form right angle and screw on the knob in the center hole.</p> | <p>2. To screw assembly other knobs with the swivel seat.</p> | <p>3. Adjust the seat height.<br/>4. Select one end for handle screwed on, and covers up the small lids on the other end.</p> |
|--|---|---|

### OPERATION:

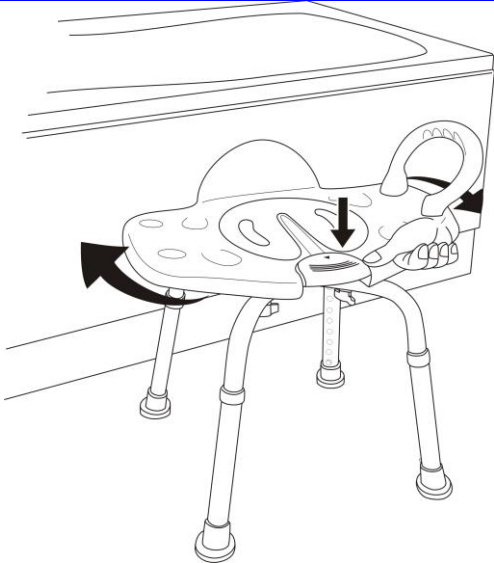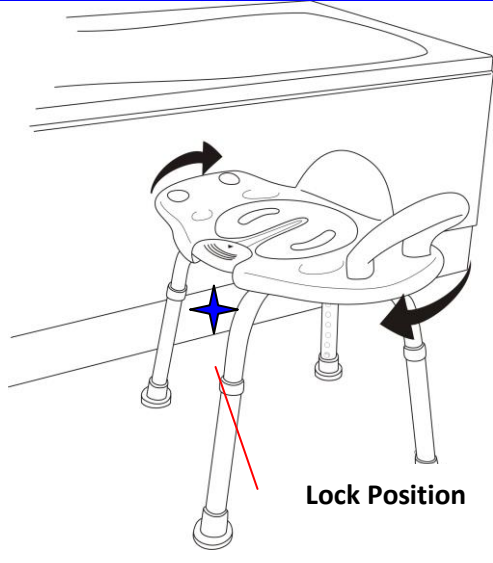- |  |   |
|--|---|
|   |  <p style="text-align: right;"><b>Lock Position</b></p> |
| <p>1. Adjust the seat height, Sit on, Push down the front bottom to swivel the top seat.<br/>2. Turn around right or left with one hand holding on the handle.</p> | <p>3. Hand off the front bottom.<br/>4. Position lock at right angle location.</p>  |