


SB41140.X

Assembly Instructions


Istruzioni di Montaggio

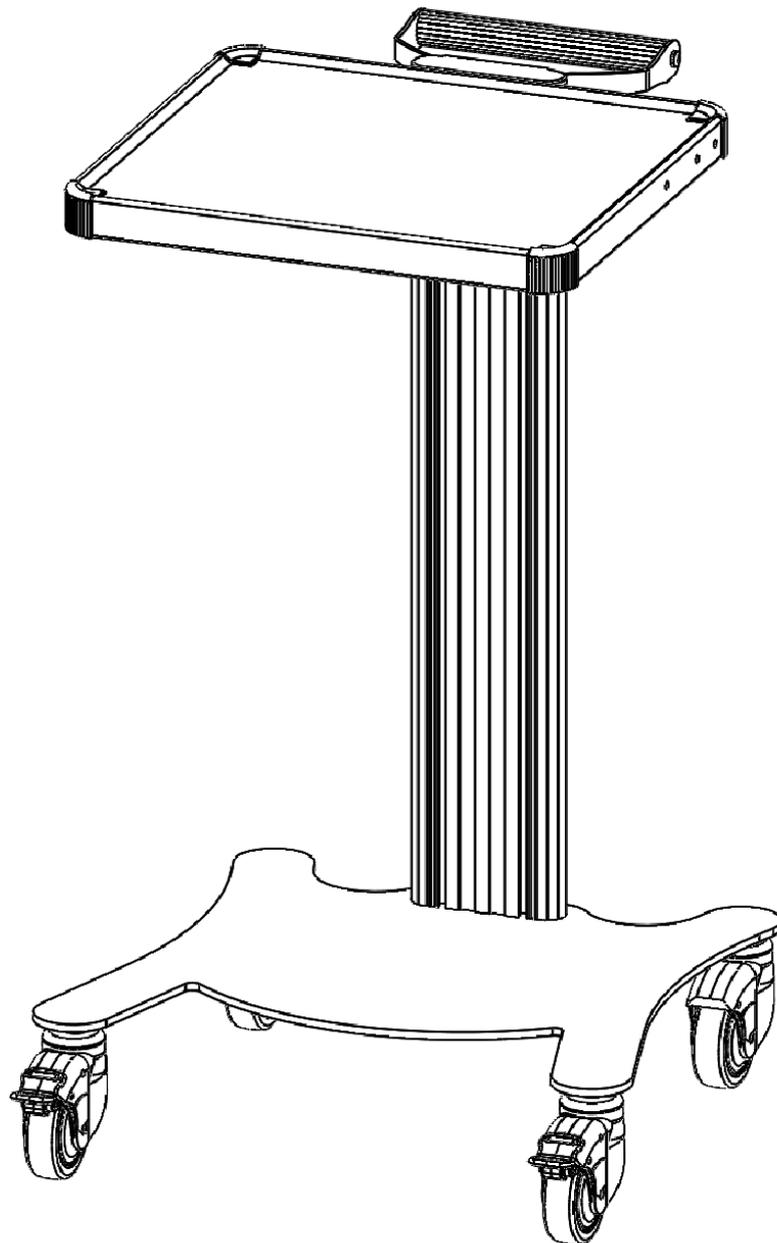


weiko[®]




REG. NO: 1042- A
UNI EN ISO 9001: 2008
REG. NO: 1042- M
UNI CEI EN ISO 13485: 2012

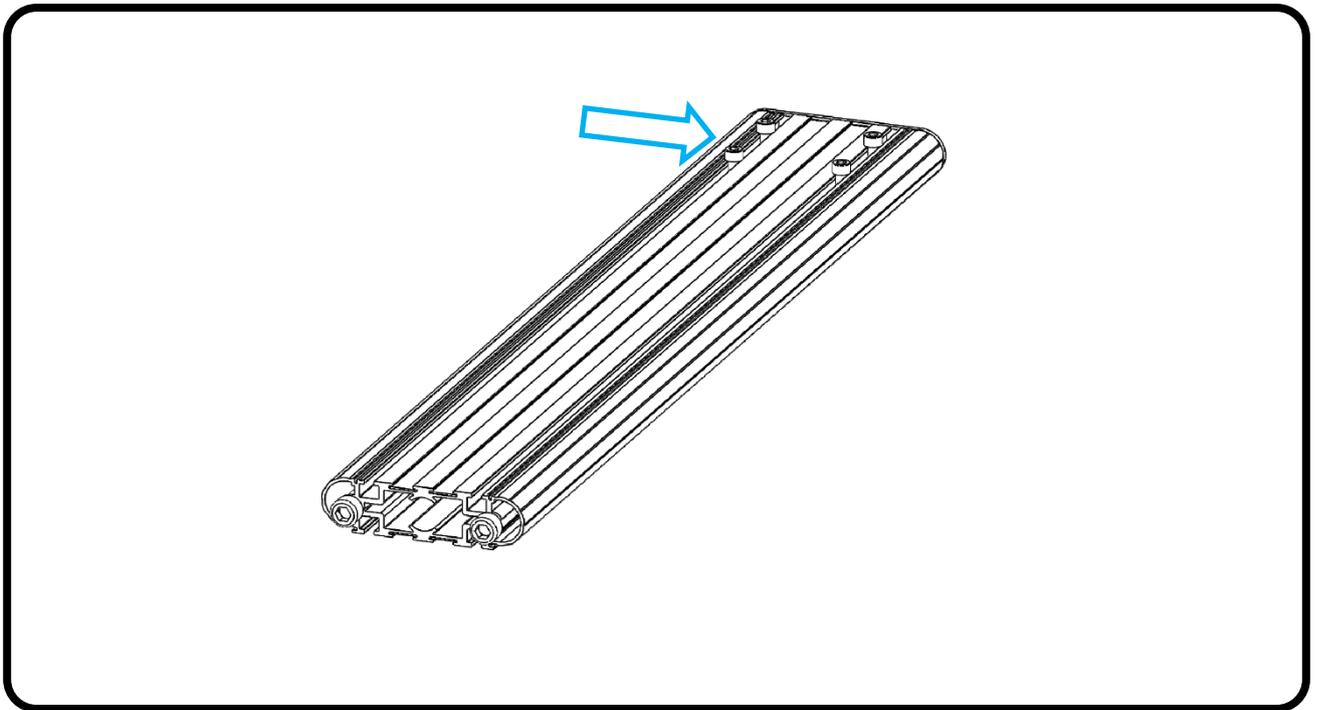


1. Put the column on the desk and unscrew 4 screws TCEI M6x10.
Mettere la colonna sul piano di lavoro e svitare 4 viti TCEI M6x10.

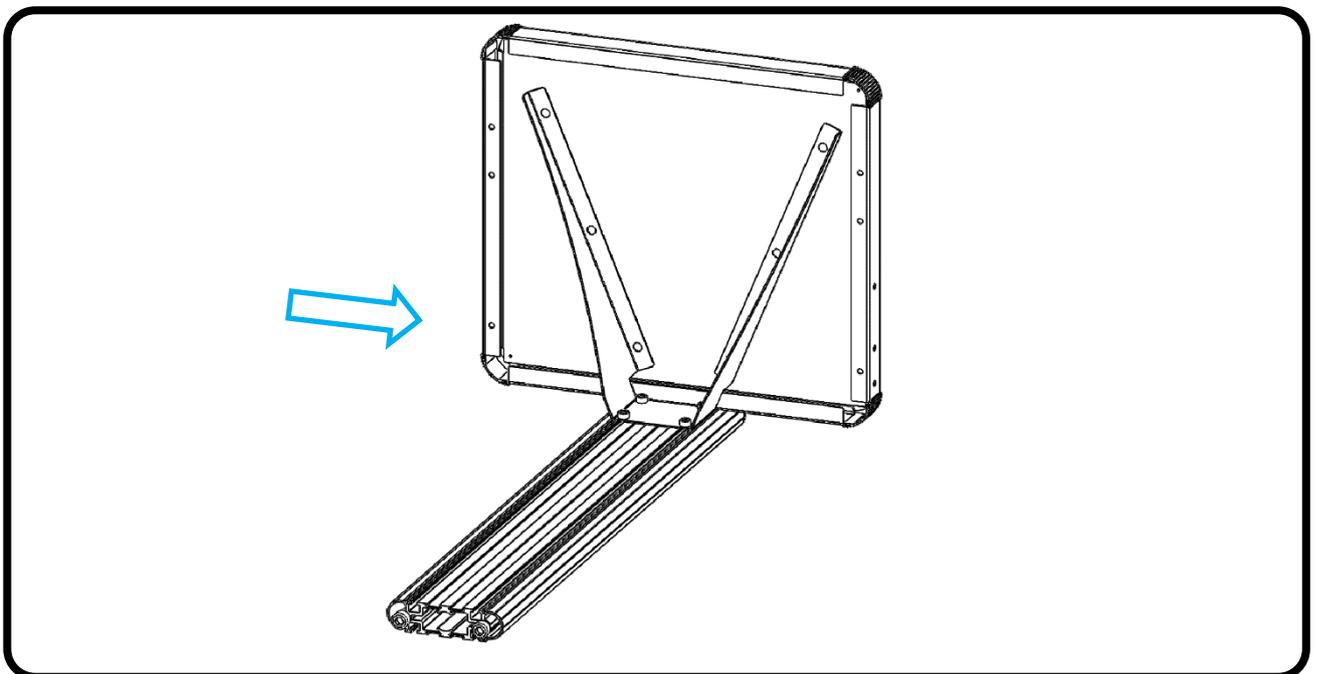


2. Put the shelves on the column and fix with 4 screws TCEI M6x10.
Posizionare e fissare il ripiano vicino alla colonna con 4 viti TCEI M6x10.

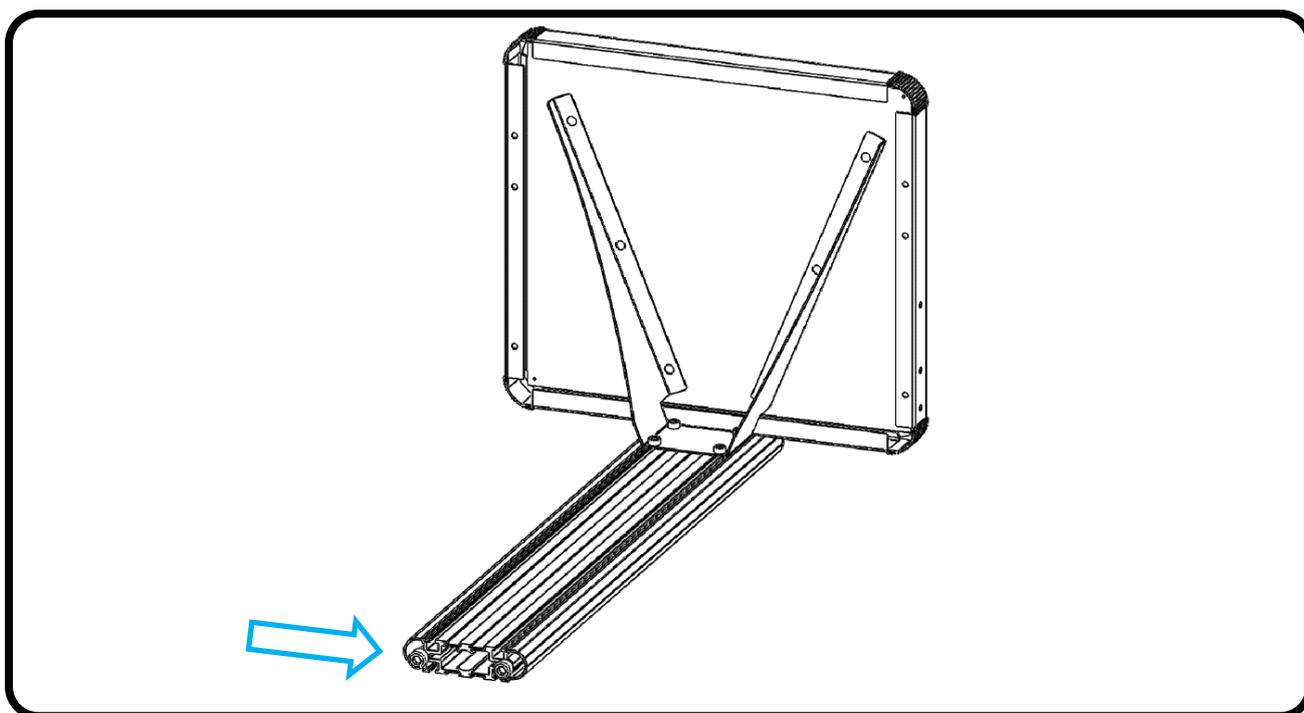

3. Unscrew 2 screws TCEI M10x40 under the column.
Svitare 2 viti TCEI M10x40 sotto alla colonna.

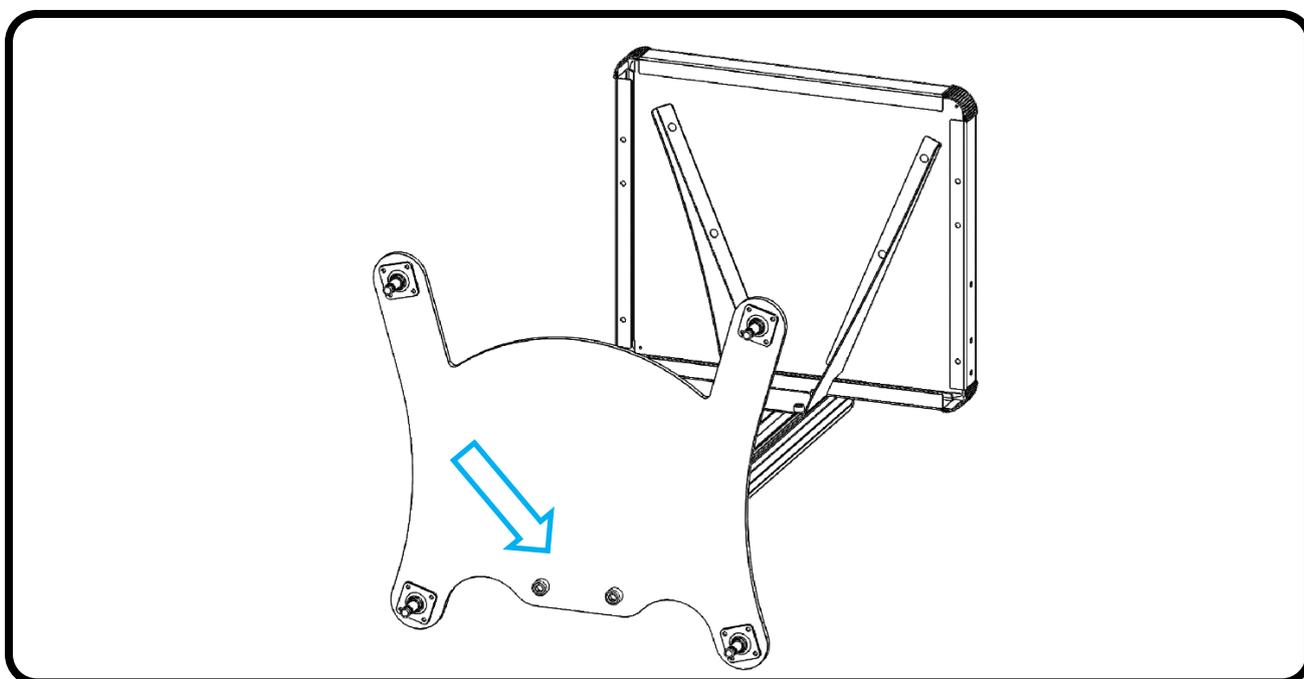


4. Put and fix the basis near the column with 2 screws TCEI M10x40.
Posizionare e fissare la base al di sotto la colonna con 2 viti TCEI M10x40.

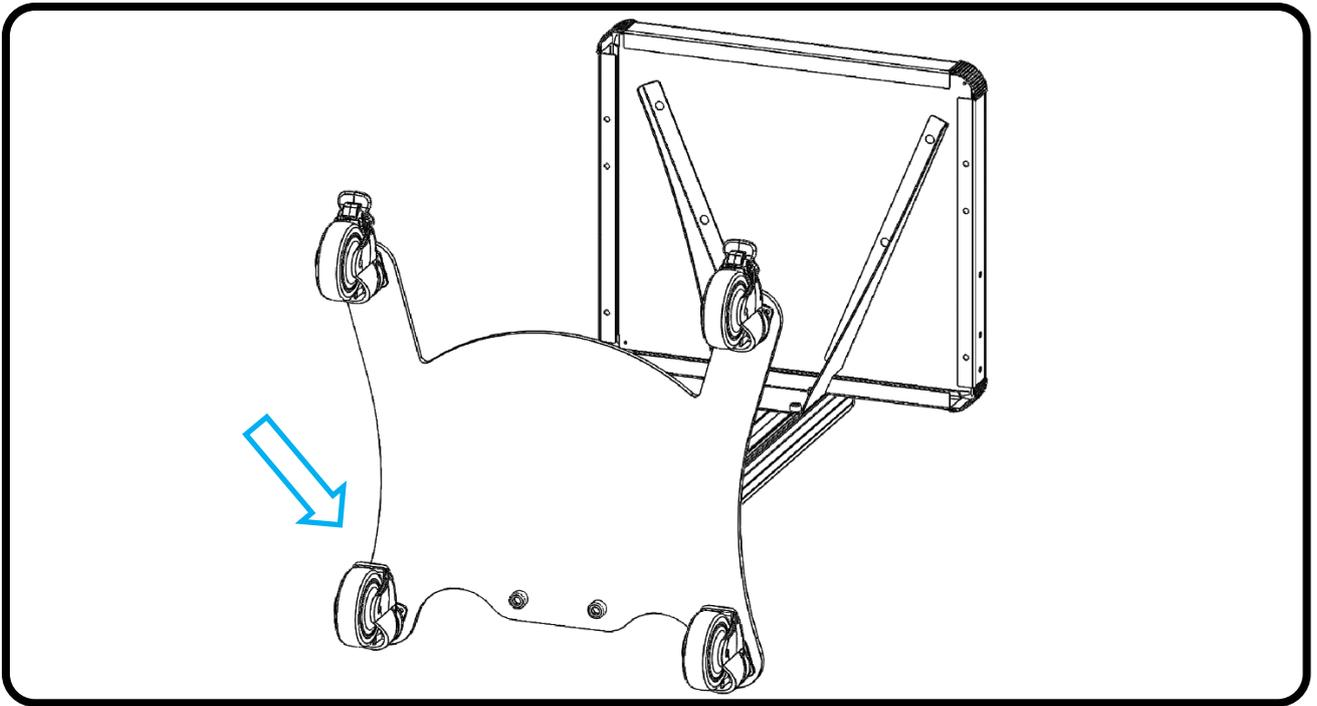


5. Insert the wheels into the pin under the basis.

Innestare le ruote nell'apposito perno al di sotto la base.

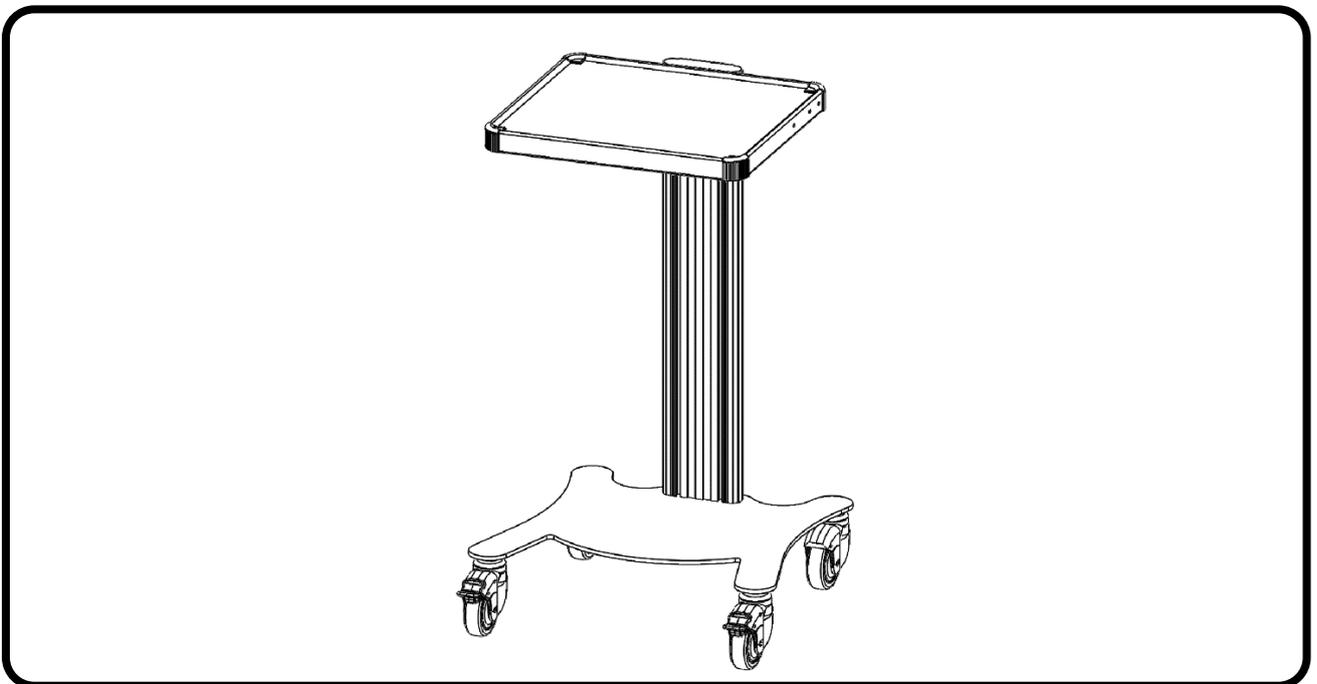

6. Put the trolley to the floor.

Mettere il carrello a terra.

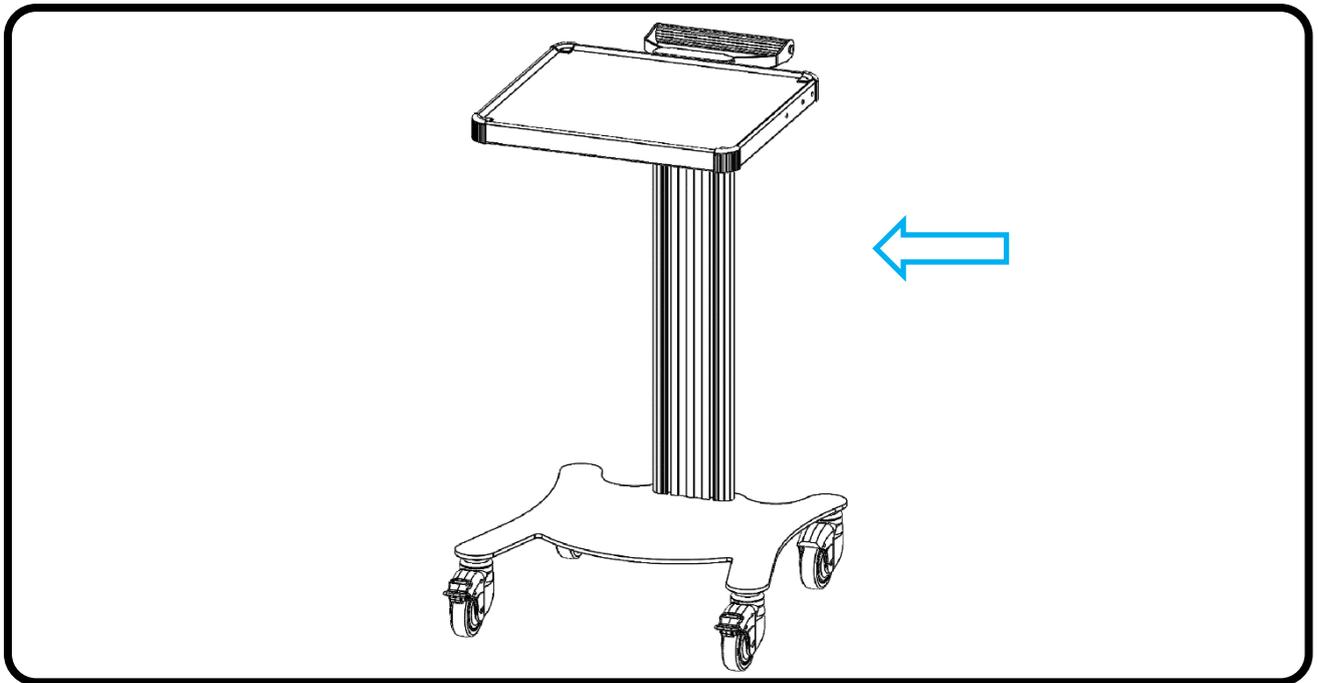

7. Put and fix the back handle from the rear of the column with 2 screws TCBEI M6x10. The trolley is ready for use. Good job.
Fissare la maniglia alla parte posteriore della colonna con 4 viti TCBEI M6x10. Il carrello è pronto per l'uso. Buon lavoro.

BIEFFE ITALIA S.r.l.

weiko[®]

Head Office: Viale Lincoln, 178 - 81100 Caserta (Italy)

Factory: Consorzio Siné

Zona ASI Aversa Nord 81032 Carinaro (CE)

Tel: +39 081 8654662 Fax: +39 081 8654723

bieffeita@libero.it - www.weiko.com