

BORSA DEL GHIACCIO ICE BAG

Manuale d'uso - *User's manual*

ISTRUZIONI

- 1) Non usare acqua > 50°C, usare acqua fredda mista a ghiaccio.
- 2) Riempire fino ad un massimo di 2/3 della capacità totale.
- 3) Espellere l'aria dalla borsa prima di chiudere il tappo.
- 4) Avvitare il tappo sufficientemente per evitare fuoriuscite di acqua, non stringere troppo il tappo.
- 5) Controllare eventuali perdite tenendo la borsa del ghiaccio in posizione capovolta.

INSTRUCTIONS

- 1) Do not use water > 50 ° C, use cold water mixed with ice.
- 2) Fill up to a maximum of 2/3 of the total capacity.
- 3) Expel the air from the bag before closing the cap.
- 4) Screw the cap tight enough to avoid water leaks, do not over tighten the cap.
- 5) Check for leaks by holding the ice bag upside down.