



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CURETTE DERMATOLOGICA MONOUSO
DISPOSABLE DERMAL CURETTE
CURETTE DERMIQUE À USAGE UNIQUE
CURETA CUTÁNEA DESECHABLE
CURETA DERMICA DESCARTÁVEL
ŁYZECZKA DERMATOLOGICZNA JEDNORAZOWA
EGYSZER HASZNÁLATOS BŐRKAPARÓ
KERTAKÄYTTÖINEN IHOKYRETTI
DERMALNA KIRETA ZA JEDNOKRATNU UPORABU
HUDDCURETTE TIL ENGANGSBRUK
HUDDCURETTE VOOR EENMALIG GEBRUIK
CHIURETÁ DERMICÁ DE UNICÁ FOLOSINȚĂ
HUĐKYRETT FÖR ENGÅNGSBRUK
КОЖНАЯ КЮРЕТКА ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ДЕРМАЛЕН КЮРЕТ
EINWEG-KÜRETTE FÜR DIE HAUT
ΚΙΟΥΡΕΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
عَبَكْت جِلْدِي لِّلْاِسْتِخْدَامِ الْوَّاحِدِ

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guia de uso
Gebrauchs- und Instandhaltungsanleitung - Guia para utilização -
Instrukcja obsługi - Használati utasítás - Käyttöohje - Korisnički Pri-
ručnik - Brukerhåndbok - Gebruikershandleiding - Manual De Utilizare
- Användarhandbok - Руководство Пользователя - Ръководство За

NEDERLANDS

PRODUCT

Huidcurette
(Maat: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 7mm).
Gesteriliseerd met gammastraling van minimaal 25 kGy en maximaal 32 kGy (2.5 M Rads tot 3.2 M.Rads).

GEBRUIKTE MATERIALEN

Roestvrij staal, ABS-kunststof / LDPE.

INDICATIES

- Verschillende maten voor verschillende weefseldiktes & zicht.
- Wegsnijden van huidweefsel uit het chirurgisch gebied voor analysemonster.


CONTRA-INDICATIES

- Hergebruik van het product kan overdraagbare ziektes aan de patiënt en/of gebruiker overdragen.
- Bijwerkingen kunnen optreden als het product na de vervaldatum van de sterilisatie wordt gebruikt.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Selecteer het juiste type en maat huidcurette voor het gebied; gebruik grotere maten voor dikker weefsel en kleinere maten voor dun en zacht weefsel.
- Onsmet het gebied met een goed onsmettingsmiddel.
- Controleer de verpakking van de huidcurette op intacte staat en vervaldatum en neem het instrument vervolgens uit de verpakking.
- Pak de greep vast en bepaal het gebied voor het nemen van het analysemonster.

WAARSCHUWINGEN

 - Lees de gebruiksaanwijzing.
- Het product mag alleen gebruikt worden door een gekwalificeerde chirurg, arts of paramedicus.
- Controleer voorafgaand aan het gebruik altijd de intacte staat van product en verpakking, evenals de vervaldatum.
- Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Hergebruik vormt een gevaar voor het overdragen van overdraagbare ziektes, HIV, Hepatitis, onnodige ziekteverwekkende besmettingen, aan de patiënt en/of gebruiker.
- Gebruik het product onmiddellijk na de opening van de verpakking.
- GIMA is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een oneigenlijk gebruik.
- GIMA kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het product hergebruikt of hergesteriliseerd wordt.

