

BIOPSY PUNCH



(NL) Lees voor het gebruik zorgvuldig de instructies.



(NL) Steriel. Voor EENMALIG GEBRUIK.

Als meerdere biopten of monsters van dezelfde patiënt nodig zijn, moet iedere keer een nieuw medisch hulpmiddel worden gebruikt.


- Niet hersteriliseren of opnieuw gebruiken in verband met infectiegevaar.
- Niet gebruiken als de steriele blisterverpakking aangetast of beschadigd is.



(NL) Beschikbare diameters:
2; 3; 3.5; 4; 5; 6 & 8 mm

1.


(NL) Biopsy punch is een gestandaardiseerde methode voor het nemen van huidbiopten.

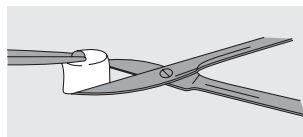


c.

(NL) Houd het huidmonster voorzichtig vast en til het op met een kleine anatomische pincet, zonder te knippen. Gebruik indien nodig een schaar of scalpel om de huid aan de basis los te maken.

2.

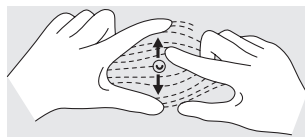


a. (NL) Huid oprekken om de huidspanningslijnen te ontspannen.

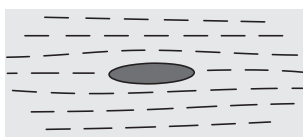

d.

(NL) Druk wonden ≤ 4 mm voorzichtig dicht of sluit af met een hydrocolloidverband. Voor wonden ≥ 4 mm, sluit met hechtingen, clips of pleisters overeenkomstig de klinische praktijk.

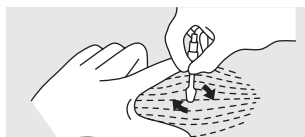

b.

(NL) Houd de stans vast tussen duim en wijsvinger. Plaats de stans op het huidoppervlak. Roteer de stans met matige druk neerwaarts met de klok mee.

3.



(NL) Gesteriliseerd met ethyleenoxide door:
sfm medical devices GmbH, Brückenstrasse 5, D-63607 Wächtersbach.



GSK Consumer Healthcare (GMDT)
Clocherane, Youghal Road,
Dungarvan,
Co. Waterford,
Ireland



4.

(NL) Zie verpakking of doos voor:



5.

(NL) GlaxoSmithKline BV, Postbus 2159, 3800 CD
Amersfoort, NEDERLAND.