

BIOSAFE KLEP
INDICATIES:
 De Biosafe klep is een hulpmiddel voor de afname en infusie van vloeistoffen zonder naald. De klep is compatibel met de volgende medische hulpmiddelen voorzien van mannelijke luer-verbinding: Toedieningssets, Verlengsets, Spuiten / Voorgevulde spuit, Centrale veneuze katheters, Verdeelstukken, Kranen.




GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

1. Open de verpakking bij het openingspunt en verwijder de beschermkap (Fig. 1).
2. Sluit de vrouwelijke luer-lock van de katheter of het verlengstuk aan op de mannelijke Biosafe luer-lock. (Fig. 2).
3. Reinig de siliconenaftichting op de vrouwelijke Biosafe luer-lock om veiligheidsredenen. Zorg er tijdens deze handeling voor het hulpmiddel niet te besmetten.
4. Verbind de mannelijke luer-lock van het infusiehulpmiddel of de spuit met de Biosafe door eerst te drukken en vervolgens het hulpmiddel te draaien totdat het is vastgezet. Houd beide hulpmiddelen coaxiaal tijdens deze handeling. Gebruik geen naalden.
5. Draai voor het loskoppelen het infusiehulpmiddel of de spuit in tegengestelde richting, totdat hij is losgekoppeld. Verwijder de Biosafe klep niet uit de katheter van de patiënt of uit het infusiehulpmiddel (Fig. 3).
6. Desinfecteer de Biosafe klep met een niet-alcoholische oplossing na elk gebruik voor een betere aseptische techniek.

De Biosafe is een gesloten systeem en vereist geen beschermkappen. Steriel en niet-pyrogeen product.

WAARSCHUWINGEN:

- Een aseptische techniek gebruiken.
- Niet met naalden gebruiken.
- Alleen gebruiken als de verpakking intact is.
- Steriliteit is alleen gegarandeerd als de verpakking intact is.
- Dit hulpmiddel mag slechts één keer worden gebruikt voor één patiënt en dient onmiddellijk na gebruik te worden weggegooid. Hergebruik is niet voorzien omdat het hulpmiddel zijn steriliteit verliest. Het risico van hergebruik bestaat uit de besmetting van het hulpmiddel, wat kan leiden tot infectie van de patiënt, waaruit mogelijk ziekte of de dood kan voortvloeien. ARIES benadrukt het belang van het juiste gebruik van het hulpmiddel volgens de aangegeven gebruiksaanwijzingen en alleen door bevoegd medisch personeel om letsel te voorkomen aan de patiënt of de eindgebruiker / operator zelf.

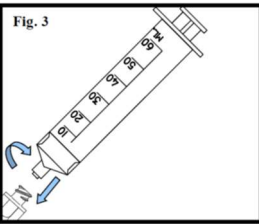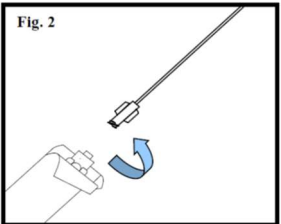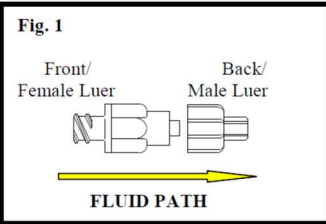

REF = Catalogue number

LOT = Batch code

= Use-by date

= Manufacturer

STERILE **EO** = Sterilized using Ethylene Oxide

= Disposable device. Do not re-use

= This device does not contain latex

Read instruction for use carefully

= Date of manufacture

= Fragile

= High

= Keep between 0+40 °C

= Keep dry

= Keep away from sunlight