

seca 210

seca
Precision for health

Hartelijk gefeliciteerd

Met de meetmat seca 210 heeft u een nauwkeurige en tegelijkertijd robuuste lengtemeter voor zuigelingen verworven. De meetmat seca 210 is geconcentreerd voor de toepassing in de praktijk van de kinderarts, kinderziekenhuis of voor visites van kraamverzorgsters en kinderartsen.

De meetmat is oprolbaar en heeft daarom slechts weinig plaats nodig. Bovendien bevinden zich bij de hoofdaanslag op de mat gaten waaraan de mat aan de muur kan worden opgehangen.

Veiligheid

Voor u de nieuwe meetmat gebruikt dient u zich de tijd te nemen om de veiligheidsinstructies te lezen.

- Neem de instructies in de gebruiksaanwijzing in acht.
- Laat de zuigeling nooit zonder toezicht op de meetmat liggen.
- Voer de lengtemeting alleen uit op een onderlaag waarvan de zuigeling niet naar beneden kan vallen.
- Let erop dat de meetmat regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd wordt om infecties met besmettelijke ziektes te vermijden.
- Voor een exacte lengtemeting is in het ideale geval een tweede persoon nodig.


Bediening

Meetproces:

1. De zuigeling op de meetmat neerleggen. Het hoofd van de zuigeling moet tegen de hoofdaanslag (1) van de meetmat aan liggen.
2. Met de rechterhand de voetaanslag (2) in de richting van de voeten van de zuigeling schuiven. De linkerhand fixeert de zuigeling.

3. De benen strekken door met de linkerhand voorzichtig de knieën van de zuigeling op de mat te drukken.
4. Met de rechterhand de voetaanslag (2) in een rechte hoek tegen de voetzolen van de zuigeling aanleggen.
5. De lichaamslengte kan aan de markering op de bodem van de meetmat (3) worden afgelezen.

Bij het aanhouden van de bovengenoemde stappen wordt een precisie van +/- 5 mm bereikt.

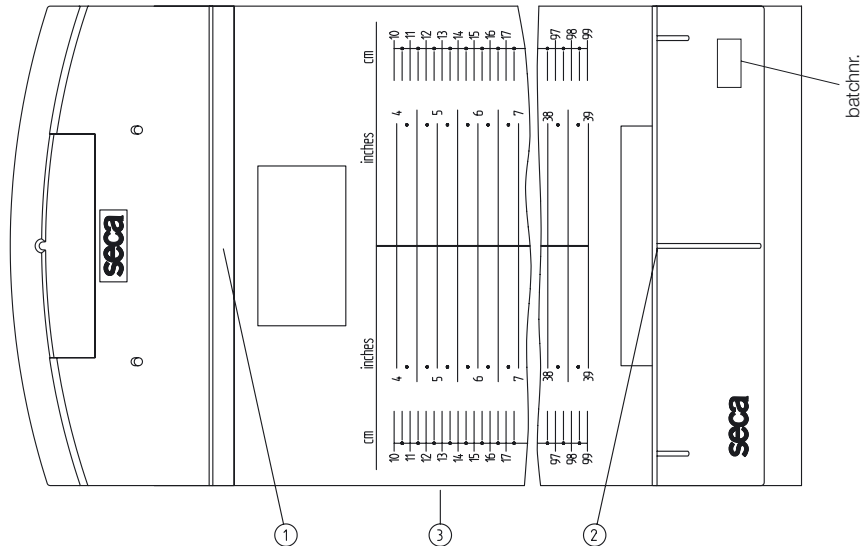

Reiniging

Reinig de meetmat desgewenst met een huishoudreiniger of in de handel gebruikelijk desinfecteermiddel. Volg de aanwijzingen van de fabrikant op.

Technische gegevens

Meetbereik: 100 - 990 mm/4 - 39 inch
Indeling: 5 mm / 1/4 inch
Precisie: beter dan ± 5 mm
Afmetingen (B x H x D): 300 mm x 140 mm x 1340 mm
Eigengewicht: ca. 500 g
Temperatuurbereik: +10° C tot +40° C
Medisch product overeenkomstig
Richtlijn 93/42/EEG: klasse I met meetfunctie

Verwijderen van afval

Wanneer de meetmat niet meer gebruikt kan worden, verstrekt het verantwoordelijke afvalbedrijf inlichtingen over de noodzakelijke maatregelen voor de reglementaire verwijdering.

Garantie

Voor gebreken, die voortvloeien uit materiaal- of fabricagefouten, geldt een garantieperiode van 2 jaar vanaf de levering. Alle beweeglijke delen zoals bijv. batterijen, kabels, voedingseenheden, accu's enz. zijn hiervan uitgesloten. Gebreken die onder de garantie vallen, worden tegen overdracht van de aankoopkwitantie kosteloos voor de klant verholpen. Met verdere aanspraken kan geen rekening worden gehouden. Transportkosten voor het zenden en terugsturen gaan ten laste van de klant, wanneer het apparaat zich op een andere plaats bevindt, dan de woonplaats van de klant. Bij transportschade kunnen er alleen garantieaanspraken geldend gemaakt worden, wanneer voor de transporten de originele verpakking wordt gebruikt en wanneer het artikel hierin volgens de origineel verpakte toestand beveiligd en bevestigd werd. Bewaar daarom alle verpakkingsdelen.

Er bestaat geen aanspraak op garantie wanneer het apparaat door personen wordt geopend die hiervoor niet uitdrukkelijk door seca werden geautoriseerd.

Klanten in het buitenland adviseren wij zich in geval van garantieaanspraken direct tot de verkoper van het desbetreffende land te richten.

CE-Verklaring van overeenkomst

Mechanische lengtemeter

Model seca 210

batchnr: zie meetmat

De meetmat voldoet aan de geldende eisen van de richtlijn 93/42/EEG inzake medische hulpmiddelen.

seca gmbh & co. kg.


Sönke Vogel
– Geschäftsführer Finanzen & Technik –

Hamburg

 : www.seca.com

seca deutschland

Medical Scales and Measuring Systems

seca gmbh & co. kg.

Hammer Steindamm 9-25

22089 Hamburg • Germany

Phone • +49 (0)40 20 00 00 0

Fax • +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail • info@seca.com

All contact data under www.seca.com

17-10-02-222 h/08 L

seca
group

seca deutschland

seca france

seca united kingdom

seca north america

seca schweiz

seca zhong guo

seca nihon

seca mexico

seca austria