



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TERMOFORO COLLO E SPALLE

NECK AND SHOULDER HEATING PAD

COUSSIN CHAUFFANT COU ET ÉPAULES

ALMOFADA DE AQUECIMENT DO PESCOÇO E OMBROS

NACKEN- UND SCHULTERWÄRMEKISSEN

ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΩΜΟΥΣ

**PODUSZKA ELEKTRYCZNA DO OGRZEWANIA KARKU
I RAMION**

ZAHŘÍVACÍ POLŠTÁŘEK NA KRK A RAMENA

SĂCULEȚ ÎNCĂLZITOR PENTRU UMERI ȘI GÂT

VÄRMEDYNA FÖR NACKE OCH AXEL

WARMTEKUSSEN NEK EN SCHOUDERS

KAULAN JA OLKAPÄIDEN LÄMPÖTYÖNY

REF SS02C(60*62) (GIMA 28674)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja

Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Handleiding SS02C(60*62)

BELANGRIJKE INFORMATIE! BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!
Lees de handleiding zorgvuldig door, in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften, alvorens dit apparaat te gebruiken, en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
Als dit apparaat aan een andere persoon wordt overgedragen, is het van vitaal belang dat ook deze handleiding wordt doorgegeven.

Deze handleiding hoort bij dit apparaat. De handleiding bevat belangrijke informatie inzake het opstarten en de werking.

Lees de handleiding zorgvuldig door. Niet-naleving van de hier vermelde instructies zou kunnen leiden tot ernstig letsel of de beschadiging van het apparaat.



WAARSCHUWING

Deze waarschuwingen moeten in acht worden genomen om letsel voor de gebruiker te voorkomen.



OPGELET

Deze aanwijzingen moeten in acht worden genomen om beschadiging van het apparaat te voorkomen.



OPMERKING

Deze aanwijzing verstrekt nuttige aanvullende informatie inzake de installatie of de werking.



Apparatuur van klasse II



Product voldoet aan de Europese richtlijn



Volg de gebruiksaanwijzing



Productcode



Opgelet: Lees en volg aandachtig de gebruiksaanwijzing (waarschuwingen)



Partijnummer



Verwijdering AEEA



Vermijd om het warmtekussen te perforeren!



Gebruik het warmtekussen niet wanneer het is opgevouwen!



Mag niet gebruikt worden bij zeer jonge kinderen (0-3 jaar)!



Gebruik het warmtekussen alleen binnenshuis!



Het warmtekussen zelf mag met de hand gewassen worden! De kussenhoes mag met een normaal wasprogramma bij max. 30°C gewassen worden!



Gebruik geen chloor!



Droog het warmtekussen niet in een droogtrommel!
De kussenhoes mag niet in een droogtrommel worden gedroogd!



Strijk het warmtekussen niet! De kussenhoes mag bij lage temperatuur gestreken worden!



Niet chemisch reinigen!

BELANGRIJK VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben verkregen inzake het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Controleer, voordat u het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet, of de voedingsspanning aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met de waarde van uw netvoeding.
- Controleer het elektrische schouderkussen zorgvuldig voorafgaand aan gebruik, op de aanwezigheid van slijtage of schade.
- Gebruik het elektrische schouderkussen niet als er slijtage, schade of sporen van oneigenlijk gebruik op het apparaat, de schakelaar of de snoeren worden vastgesteld.
- Breng het terug naar de leverancier.
- Een beschadigd netsnoer mag alleen vervangen worden door de leverancier, een erkende dealer of door gekwalificeerd personeel.
- Gebruik het elektrische schouderkussen alleen voor het beoogde gebruik, zoals aangegeven in de handleiding.
- Gebruik het alleen als elektrisch schouderkussen.
- Gebruik het elektrische schouderkussen niet bij kleine kinderen of mindervalide personen die zorg behoeven of ongevoelig zijn voor hitte.

- Gebruik het elektrische schouderkussen alleen voor het beoogde gebruik, zoals aangegeven in de handleiding.
- Gebruik het alleen als elektrisch schouderkussen.
- Gebruik het elektrische schouderkussen niet bij kleine kinderen of mindervalide personen die zorg behoeven of ongevoelig zijn voor hitte.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Het elektrische schouderkussen mag niet gebruikt worden als het is gevouwen, gekreukt of rond het matras is geplaatst.
- Tijdens het gebruik mogen de bedieningsschakelaar en het snoer niet op of onder het elektrische schouderkussen worden geplaatst of op andere manier worden afgedekt.
- Gebruik op het elektrische schouderkussen geen veiligheidsspelden of andere puntige of scherpe voorwerpen.
- Laat het ingeschakelde elektrische schouderkussen nooit onbeheerd achter.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en mag niet in ziekenhuizen gebruikt worden.
- Gebruik nooit een in water gevallen elektrisch schouderkussen. Verwijder de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- Gebruik het elektrische schouderkussen niet in vochtige omgevingen of als het kussen zelf vochtig is. U mag het pas weer gebruiken als het volledig droog is.
- Stel de bedieningsschakelaar of de snoeren nooit bloot aan enige vorm van vocht.
- Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Vermijd om het elektrische schouderkussen aan het snoer te dragen, trekken of te draaien en zorg ervoor dat het snoer niet verstrikt of beklemd raakt.
- Probeer in geval van storingen of schade niet om het elektrische schouderkussen zelf te repareren.
- Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een erkende gespecialiseerde dealer of geschikt gekwalificeerd personeel.
- Het elektrische schouderkussen mag alleen gebruikt worden met zijn speciale bedieningseenheid.
- NIET CHEMISCH REINIGEN.
- Voor de reiniging mag het schouderkussen met de hand bij maximaal 30°C gewassen worden (aanbevolen).
- Het schouderkussen mag bij 30°C (maximaal) in de wasmachine gewassen worden, met een lage mechanische actie aangezien een hoge centrifugeersnelheid de inwendige bedrading kan beschadigen.
- Voordat het apparaat wordt opgeborgen, moet het afkoelen en pas dan worden opgevouwen. Plaats geen voorwerpen op het elektrische schouderkussen om vervorming te voorkomen.

WERKING

- Sluit het elektrische schouderkussen aan op de afneembare voedingsconnector. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
- Het elektrische schouderkussen warmt sneller op als u aan het begin het hoge temperatuurniveau instelt.

- We raden u aan om het lage temperatuurniveau te selecteren wanneer het elektrische schouderkussen voor enkele uren wordt gebruikt.
- Plaats het elektrische schouderkussen op uw schouders en knoop het goed dicht nadat de gewenste temperatuur is bereikt.

Temperatuurstellingen

Niveau: 0=Uit (lampje brandt niet)

1=Lage temperatuur (lampje brandt)

2=Gemiddelde temperatuur (lampje brandt)

3=Hoge temperatuur (lampje brandt)

Veiligheidsfunctie automatische uitschakeling

Het elektrische schouderkussen wordt automatisch uitgeschakeld na 90 minuten. Om het elektrische schouderkussen weer in te schakelen, moet eerst het temperatuurniveau "0" geselecteerd worden en vervolgens, na ongeveer 5 - 10 minuten, kan het gewenste temperatuurniveau geselecteerd worden.

BELANGRIJK: SCHAKEL HET SCHOUDERKUSSEN UIT WANNEER U GEEN WARMTE WENST.

Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het kussen niet gebruikt wordt.

Dek het kussen NIET af met ander materiaal zoals een deken of een ander kussen. Vermijd om druk op de schakelaar uit te oefenen.

REINIGING EN VERZORGING

- Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact alvorens het elektrische schouderkussen te reinigen.
- Alvorens het kussen te wassen, moet het van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld en moet het volledig afkoelen.
- Koppel de bedieningseenheid met de schakelaar los van het elektrische schouderkussen door middel van de connector op de onderkant.
- **BELANGRIJK:** Vermijd om het netsnoer of de bedieningseenheid met de schakelaar in water of vloeistoffen onder te dompelen: dit zou onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt.
- Voor de reiniging mag het schouderkussen met de hand bij maximaal 30°C gewassen worden (aanbevolen).
- U kunt het schouderkussen ook wassen in de wasmachine, bij een maximale temperatuur van 30°C en lage mechanische actie en centrifugeersnelheid. Wij raden aan het met de hand te wassen, om de levensduur van het product te verlengen.
- Laat het elektrische schouderkussen plat drogen, op een vochtabsorberende handdoek of mat. Nadat het elektrische schouderkussen volledig is opgedroogd, kan de afneembare stroomregelaar weer worden aangesloten. Het elektrische schouderkussen zal alleen functioneren met zijn bijgeleverde bedieningseenheid.

GARANTIEVOORWAARDEN GIMA

De standaardgarantie B2B Gima van 12 maanden wordt toegepast



Verwijdering: Het product mag niet worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Gebruikers moeten de afgedankte apparatuur afvoeren door deze naar het aangewezen inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur te brengen