

Desinfectiemiddel voor niet-invasieve medische hulpmiddelen

Gebruiksklaar

WAARSCHUWING

Eigenschappen

GERMOCID BASIC is een gebruiksklare hydroalcoholische oplossing op basis van Chloorhexidinedigluconaat en quaternair ammoniumzout met een breed werkingsspectrum voor de snelle en doeltreffende desinfectie van oppervlakken en niet-invasieve medische hulpmiddelen, grote oppervlakken of moeilijk te bereiken oppervlakken van biomedische apparatuur en aggregaten in tandheelkundige praktijken (gelaatsmaskers, steunvlakken, armleuningen, hoofdsteunen, enzovoorts). GERMOCID BASIC hoeft niet verdund te worden en waarborgt een snelle en langdurige bescherming tegen: virussen (Adenovirus, HIV, HBV, HCV), bacteriën (Gram-positief, Gram-negatief), mycobacteriën (waaronder Mycobacterium tuberculosis) en schimmels (gisten en schimmels). Werkt ook in aanwezigheid van organisch materiaal (bloed, speeksel, organische exsudaten, enzovoorts). Het product verdampt snel. Er zijn geen corrosieve effecten vastgesteld op de materialen waar de medische hulpmiddelen of biomedische apparatuur van zijn gemaakt. Het gebruik op materialen die door alcohol kunnen worden aangetast wordt afgeraden.

Gebruik: Schudden voor gebruik. GERMOCID BASIC direct over de te behandelen oppervlakken en voorwerpen verstuiwen. Laten inwerken en met een doek of papier voor eenmalig afnemen.

GERMOCID BASIC is actief binnen vijf minuten contact tegen Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën, schimmels (gisten en schimmels) en virussen (waaronder HIV, HBV, HCV); en tegen mycobacteriën (waaronder TBC) na 60 minuten.

Samenstelling:

100,0 g van het product bevat:
Chloorhexidinedigluconaat 0,1 g;
Benzalkoniumchloride 0,1 g;
Ethylalcohol 45,0 g;
Isopropylalcohol 15,0 g;
co-formulanten;

geëquivalent water g.g. voor 100,0 g

Waarschuwingen: H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P370+P378 In geval van brand: blussen met kooldioxide, schuim, chemisch poeder. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. P273: Voorkom lozing in het milieu. Professioneel gebruik. Vermijd gebruik op materialen die door alcohol kunnen worden beschadigd. De product is onverenigbaar met detergentia en anionische oppervlakactieve stoffen. Na opening behoudt het product, indien correct bewaard, de houdbaarheid zoals aangegeven op het etiket. Gebruik geen beschadigde verpakking. Bewaar op een koele, droge plaats en uit de buurt van warmtebronnen. Extern gebruik.

Geldigheid: 3 jaar

Lot en houdbaarheid: zie verpakking

MEDISCH HULPMIDDEL EG 0546 Europese Richtlijn 93/42/EGC

Fabrikant:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY

De waarschuwingen kunnen wijzigen als het veiligheidsinformatieblad van het product wordt bijgewerkt.