

LEES VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES. RAADPLEEG VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK EEN ARTS.

CONTRA-INDICATIES: Niet bedoeld voor personen zwaarder dan 110 kg (242 lbs) - Niet geschikt voor ijzige of gladde omstandigheden. - Niet bedoeld voor personen met latexallergie.

GEBRUIKSAANWIJZING: Houd voor het uitvouwen van uw wandelstok de handgreep vast en laat de opvouwbare segmenten van de stok naar beneden uitklappen. Om vallen te voorkomen, moet u

altijd controleren of de afzonderlijke segmenten van de stok (Afb. 1) stevig op hun plaats zijn vergrendeld.

WAARSCHUWING: Demonteer het lichaam van de Trusty Cane TM NIET. De stok bevat aan de binnenkant een elastisch koord. Een ongecontroleerde vrijgave van het inwendige elastische koord kan ernstig letsel veroorzaken aan onbeschermde lichaamsdelen, met name aan de ogen; als het elastische koord wordt doorgesneden, uitrafelt of beschadigd raakt, moet het gebruik gestaakt worden. Rek het koord NIET MEER uit dan nodig is voor de demontage of montage van de segmenten.

De hoogte van uw Trusty CaneTM aanpassen: Draai de draaivergrendeling (Afb. 2) los door meerdere slagen rechtsom te draaien. Druk de vergrendelingsknop (Afb. 3) in en trek aan de greep om de stok langer te maken, of duw op de greep om de stok korter te maken. Vergeet niet om de draaivergrendeling na het bereiken van de gewenste lengte van de Trusty CaneTM weer te vergrendelen.

WAARSCHUWING: Om vallen te voorkomen, moet er altijd voor gezorgd worden dat de afzonderlijke segmenten van de stok stevig op hun plaats vergrendeld zijn en dat de vergrendelingsknop geblokkeerd is.

De Trusty CaneTM opvouwen: Uw Trusty CaneTM kan eenvoudig worden opgevouwen naar een handig reisformaat, door de 4 afzonderlijke segmenten van de stok van elkaar te scheiden. Houd elk paar stoksegmenten vast bij het gewricht en trek ze uit elkaar (Afb. 4). De afzonderlijke stoksegmenten zullen netjes worden opgevouwen (Afb. 5).

De lampjes van uw Trusty CaneTM gebruiken: De lampjes worden ingeschakeld met de knop bovenop de handgreep van de Trusty CaneTM (Afb. 6). Druk eenmaal op de knop om de lampjes in te schakelen; druk nogmaals om ze uit te schakelen. De lampjes worden na 20 minuten automatisch uitgeschakeld.



Uw Trusty CaneTM onderhouden: Gebruik voor de vervanging van de batterijen een kruiskopschroevendraaier om het batterijkvakje onder de handgreep van de Trusty CaneTM te openen. Verwijder eventuele lege batterijen en gooi ze op de juiste manier weg. Gebruik 3 AAA-batterijen en plaats ze volgens de aanduidingen + en -, anders zullen de lampjes niet functioneren. Plaats het klepje van het batterijkvakje terug en schroef het vast. Controleer de wandelstok regelmatig op tekenen van slijtage, zoals het eventueel uitrafelen van het elastische koord of de slijtage van de rubberen voeten. Als er tekenen van slijtage worden vastgesteld, moet het gebruik onmiddellijk gestaakt worden.

WAARSCHUWING: Meng geen oude en nieuwe batterijen. Meng geen alkaline, standaard (koolstofzink) of oplaadbare (nikkel - cadmium) batterijen.

GARANTIEVOORWAARDEN GIMA: De Gima standaard B2B garantie van 12 maanden is van toepassing.

Gima 43044 - 43045 REF GB-801 (SV) GB-801 (BK)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaalistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Getfabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilberladd av/تصنيع بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made In China

Importato da/imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Dovezeno od strane/Dovezeno uživatelem/importeret
af/Importēja/ Tuojas/Uvezeno od strane/importálta/importēja/importavo/
Importert av/Geimporteerd door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/Importat av/توزيع بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



