

LEES VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES. RAADPLEEG VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK EEN ARTS.

CONTRA-INDICATIES: Niet bedoeld voor personen zwaarder dan 110 kg (242 lbs) - Niet geschikt voor ijzige of gladde omstandigheden. - Niet bedoeld voor personen met latexallergie.

GEBRUIKSAANWIJZING: Houd voor het uitvouwen van uw wandelstok de handgreep vast en laat de opvouwbare segmenten van de stok naar beneden uitklappen. Om vallen te voorkomen, moet u altijd controleren of de afzonderlijke segmenten van de stok (Afb. 1) stevig op hun plaats zijn vergrendeld.

WAARSCHUWING Demonteer het lichaam van de stok NIET. De stok bevat aan de binnenkant een elastisch koord. Een ongecontroleerde vrijgave van het inwendige elastische koord kan ernstig letsel veroorzaken aan onbeschermde lichaamsdelen, met name aan de ogen; als het elastische koord wordt doorgesneden, uitrafelt of beschadigd raakt, moet het gebruik gestaakt worden.

Rek het koord NIET MEER uit dan nodig is voor de demontage of montage van de segmenten.

DE HOOGTE VAN UW WANDELSTOK AANPASSEN: Draai de draaivergrendeling los door meerdere slagen rechtsom te draaien. Druk de vergrendelingsknop in en trek aan de greep om de stok langer te maken, of duw op de greep om de stok korter te maken. Vergeet niet om de draaivergrendeling na het bereiken van de gewenste lengte weer te vergrendelen.

WAARSCHUWING Om vallen te voorkomen, moet er altijd voor gezorgd worden dat de afzonderlijke segmenten van de stok stevig op hun plaats vergrendeld zijn en dat de vergrendelingsknop geblokkeerd is. Zorg er altijd voor dat de zwenkvoet van de wandelstok stevig op de stok is vastgeschroefd, om vallen te voorkomen.

DE WANDELSTOK OPVOUWEN: Uw wandelstok kan eenvoudig worden opgevouwen naar een handig reisformaat, door de 4 afzonderlijke segmenten van de stok van elkaar te scheiden. Houd elk paar stoksegmenten vast bij het gewricht en trek ze uit elkaar. De afzonderlijke stoksegmenten zullen netjes worden opgevouwen.



DE LAMPJES VAN UW WANDELSTOK GEBRUIKEN: De lampjes worden ingeschakeld met de knop bovenop de handgreep van de wandelstok. Druk eenmaal op de knop om het lampje aan de voorzijde van de stok in te schakelen; druk een tweede keer op de knop om ook het rode lampje onder de handgreep te activeren. Met de derde druk op de knop worden de lampjes uitgeschakeld. Het voorste lampje kan gedraaid worden zodat het licht naar wens gericht kan worden.

SOS-SIGNAAL: Druk voor de activering van het SOS-signaal op de knop aan de zijkant van de handgreep: het lampje onder de greep zal knipperen en de wandelstok laat een alarmgeluid klinken.

BATTERIJEN VERVANGEN: Open het batterijvakje aan de achterkant van de handgreep. Verwijder eventueel lege batterijen en gooi deze op de juiste manier weg. Gebruik 2 AAA-batterijen: deze moeten met de juiste polariteit worden geplaatst (pluspool naar de buitenkant gericht, daar waar het veertje zich bevindt). Sluit het deksel van het batterijvakje. Controleer de wandelstok regelmatig op tekenen van slijtage, zoals het eventueel uitrafelen van het elastische koord of de slijtage van de rubberen voeten. Als er tekenen van slijtage worden vastgesteld, moet het gebruik onmiddellijk gestaakt worden.

WAARSCHUWING Meng geen oude en nieuwe batterijen. Meng geen alkaline, standaard (koolstofzink) of oplaadbare (nikkel - cadmium) batterijen.

GARANTIEVOORWAARDEN GIMA: De Gima standaard B2B garantie van 12 maanden is van toepassing.

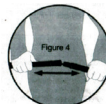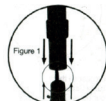

Gima 43050 - 43052

REF GB-806(1FOOT) GB-806(SKID PROOF)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaimistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Gefabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilbered av/تصنيع بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made in China

Importato da/Imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Dovezeno od/Importat de/Importat de/
af/Importija/ Tuoja:/Uvezeno od strane/Importálta:/importēja/importavo/
Importert av/Geimporteerd door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/Importat av/توريد بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

