

EN

FR

DE

ES

IT

NL

NO

JA

KO

ZH

# Little Baby QCPR

Important Product Information

重要产品信息

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**

helping save lives



Deze belangrijke productinformatie is van toepassing op Little Baby QCPR. Tenzij anders aangegeven, is de informatie van toepassing op alle productconfiguraties.

 **Waarschuwingen en aandachtspunten**  
Een waarschuwing geeft omstandigheden, risico's of gevaarlijk gebruik aan die ernstig letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.  
Een aandachtspunt geeft omstandigheden, risico's of gevaarlijk gebruik aan die licht lichamelijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.

 **Opmerkingen**

Een opmerking geeft belangrijke informatie over het product of het gebruik ervan.

## Zorg, onderhoud en reiniging

Houd de oefenpop schoon en in goede hygiënische staat. Vervang de luchtwegunit na iedere les, met name als er mond-op-mondbeademing is geoeft.

We raden aan voor iedere cursist een aparte Laerdal Manikin Face te gebruiken.

Als verschillende cursisten hetzelfde gezicht gebruiken, moet het gezicht van de oefenpop na ieder gebruik grondig worden gereinigd. Reinig alle huddelen regelmatig. Gebruik een warm sopje of Laerdal Manikin Wipes.

De Manikin Face Shields vormen een schone barrière tussen uw lippen en het gezicht van de oefenpop.

De volgende elementen kunnen de oefenpop verkeuren:

- Kleurstoffen van lippenstift en pennen
- Latex handschoenen
- Gebruik van andere kleding dan die origineel met het product is geleverd.

 **Aandachtspunten**

- *Gebruik geen vloeistof om de binnenzijde van de oefenpop te reinigen.*
- *Dompel onderdelen niet onder in vloeistof.*

## Batterij

Gebruik alleen niet-oplaadbare koolzink- of alkalibatterijen LR6 1,5V AA. Batterijen moeten vervangen worden door het juiste type. Verwijder de batterijen als het product langere tijd niet gebruikt wordt.

# Nederlands

## Little Baby QCPR

### EU

Dit product is in overeenstemming met de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Raad betreffende radioapparatuur (RED) en richtlijn 2011/65/EU van de Raad betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS).

### Afvalverwerking

De sensor van de QCPR bevat elektronische componenten. Breng deze naar het daarvoor bestemde recyclingcentrum in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Europese richtlijn 2012/19/EU (AEEA): dit apparaat is aangemerkt volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Door dit product correct te verwijderen helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvoer van dit product.

Het symbool op het product of op de bij het product behorende documenten geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan dient het bij het daarvoor ingestelde verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur te worden afgeleverd. Verwijdering dient plaats te vinden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvordering voor afvalverwijdering. Neem voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en hergebruik van dit product contact op met uw gemeente, de gemeentereiniging of de vertegenwoordiger van Laerdal bij wie u het product hebt aangeschaft.

### Garantie

Raadpleeg de algemene voorwaarden in de Laerdal Global Warranty (Laerdal Wereldwijde Garantie). Bezoek [www.laerdal.com](http://www.laerdal.com) voor meer informatie

### Verklarende symbolenlijst

	CE-markering
	UKCA-markering
	Australisch merk voor radiocommunicatie en naleving van EMC
	KC (Korea-certificering) certificering
	Japanse MISS-certificering
	AEEA-markering
	Fabrikant
	Productiedatum
	Ordernummer ter referentie
	LOT-nummer

### Specificaties

Gebruiks-temperatuur	5 °C tot 35 °C Afname van de prestaties van het product kan zich voordoen tijdens gebruik bij lage temperaturen (< 15 °C)
Opslag-temperatuur	-10 °C tot 50 °C
Vochtigheid	5% - 95% relatieve vochtigheid
Gewicht	1,8 kg (± 0,2 kg)
Afmetingen	65 x 26 x 14 cm



© 2022 Laerdal Medical AS. All rights reserved.



Manufactured in China for:  
Laerdal Medical AS  
P.O. Box 377  
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway  
T: (+47) 51 51 17 00

Printed in China

20-15510 Rev D


---


[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**  
helping save lives

# Little Baby QCPR

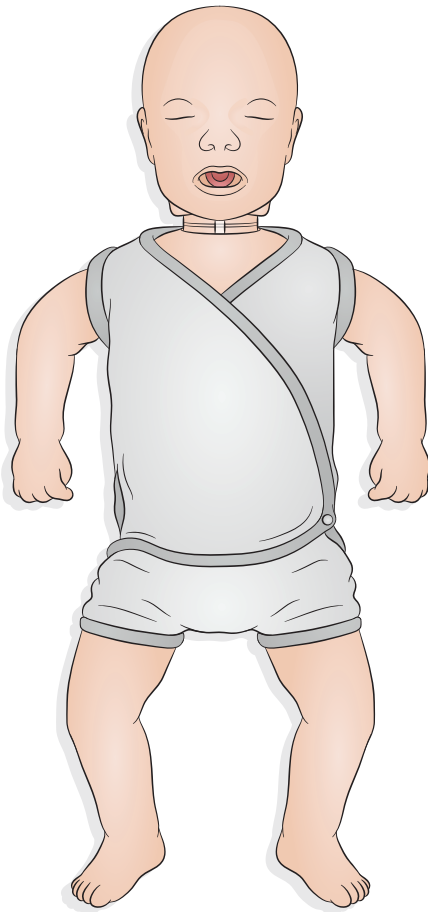


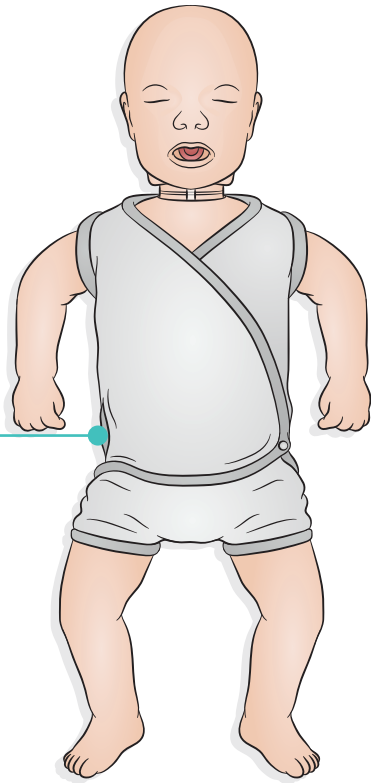









QCPR Instructor  
QCPR Learner

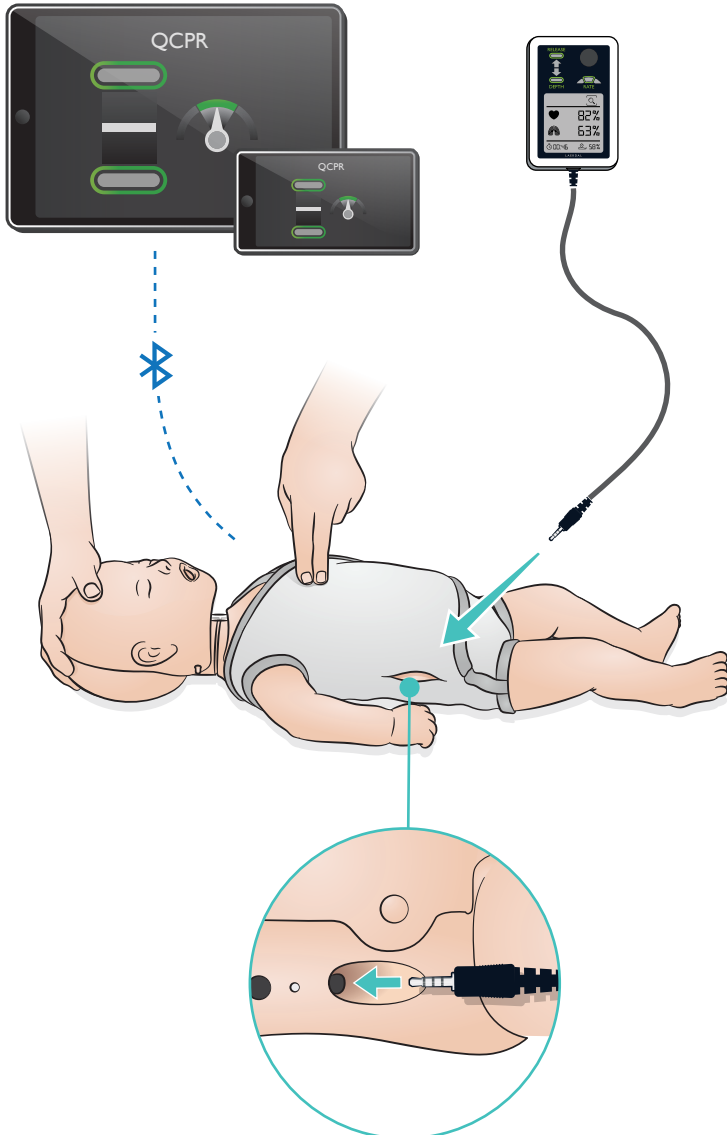


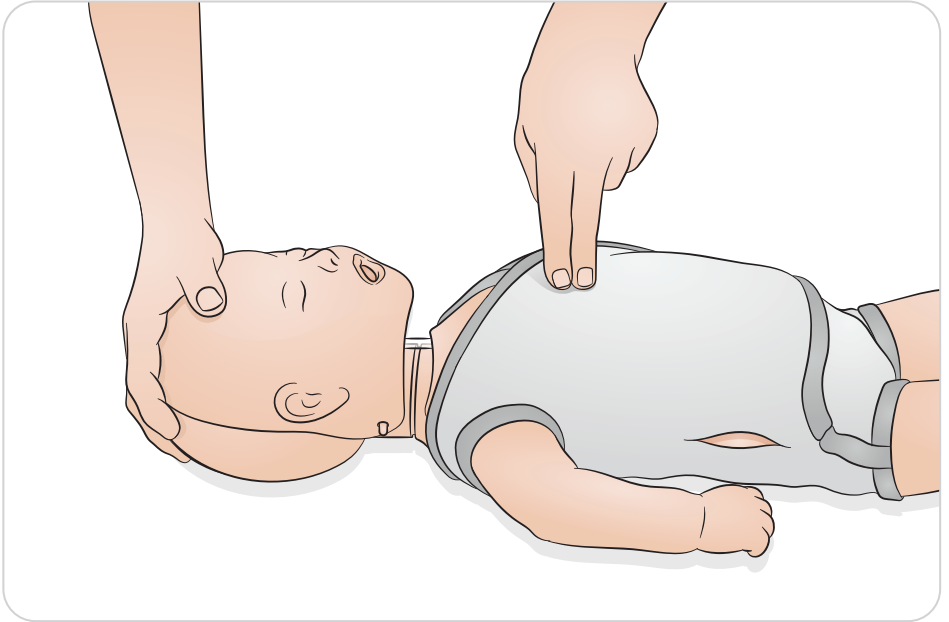

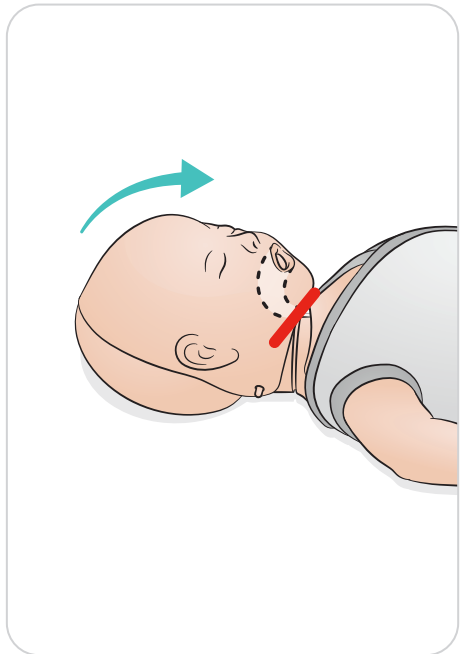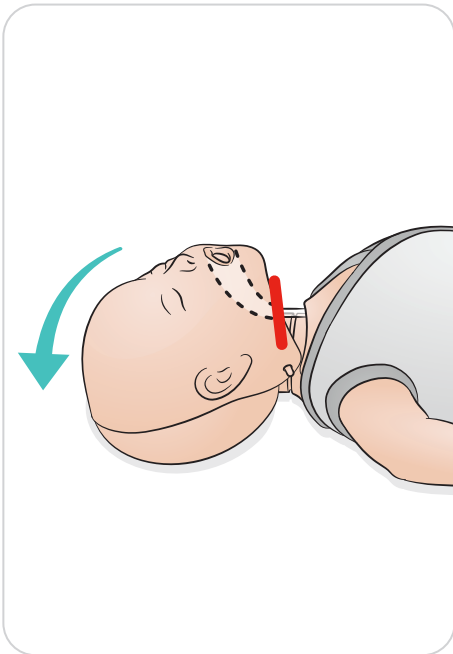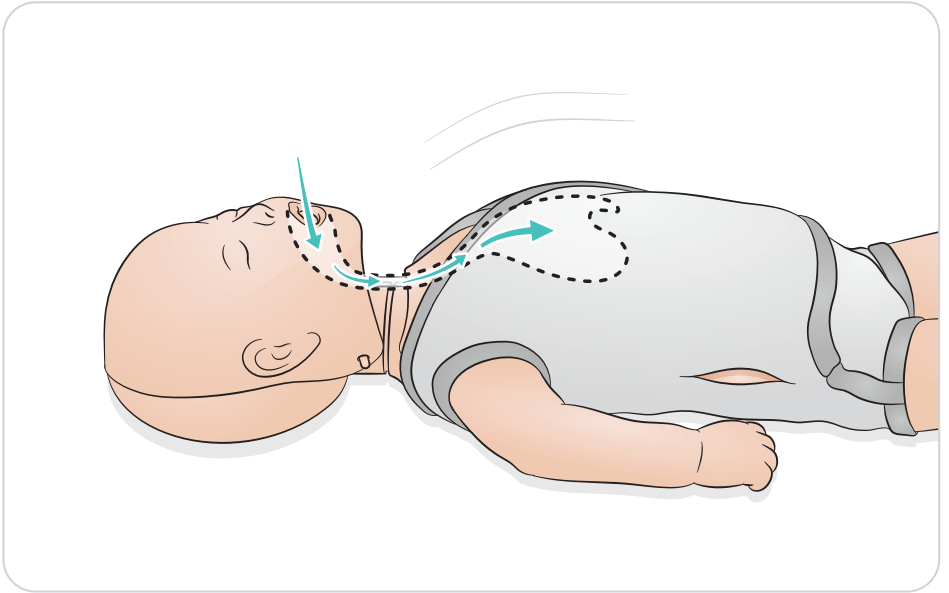





1

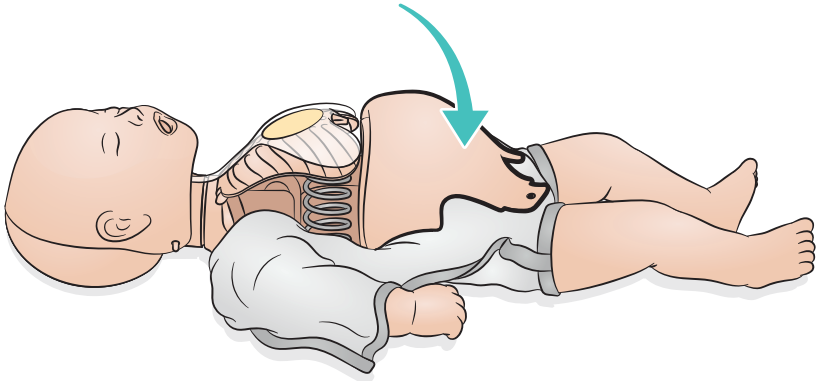

2

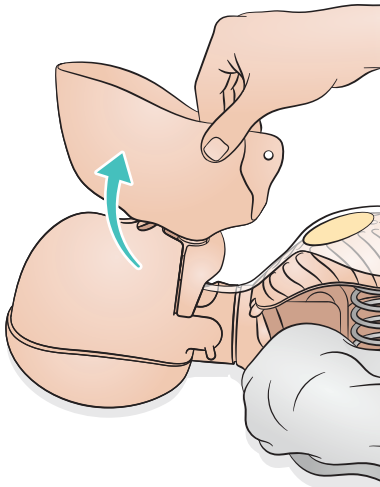


3

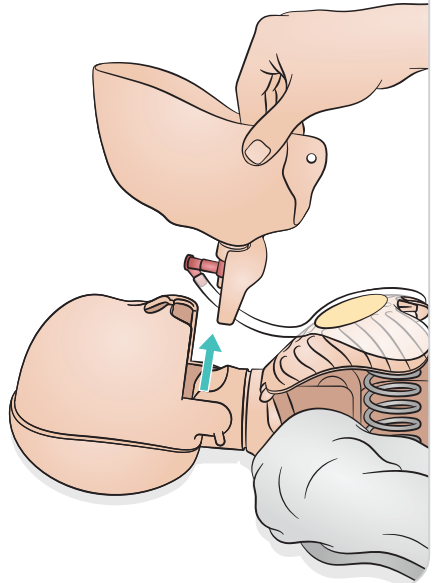





4

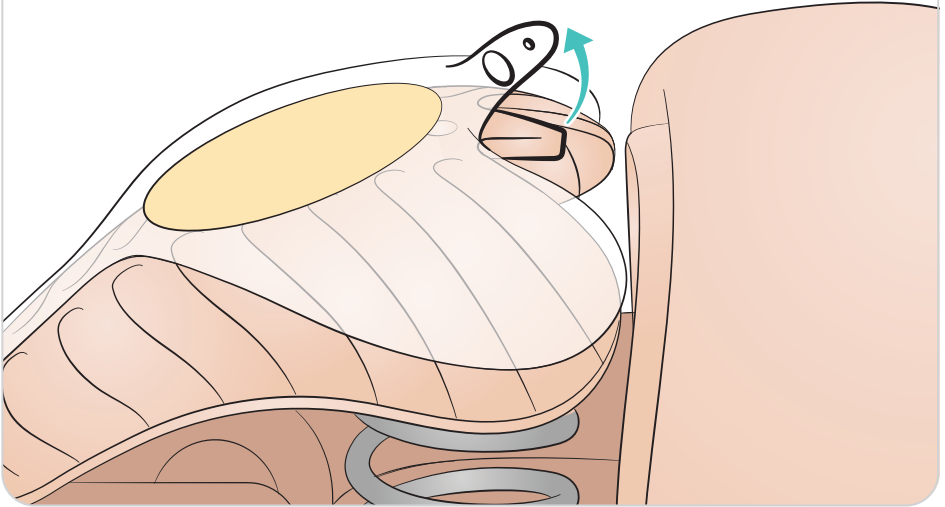

5

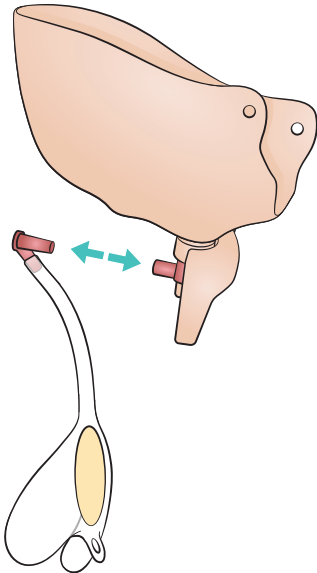


6

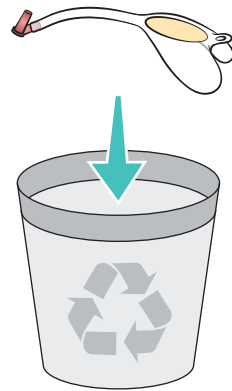





1

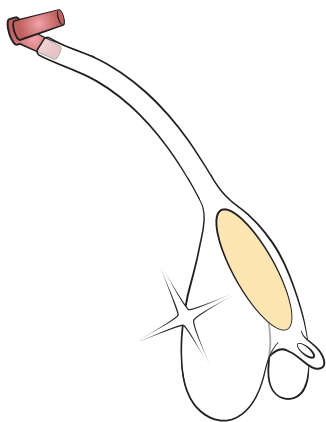


2

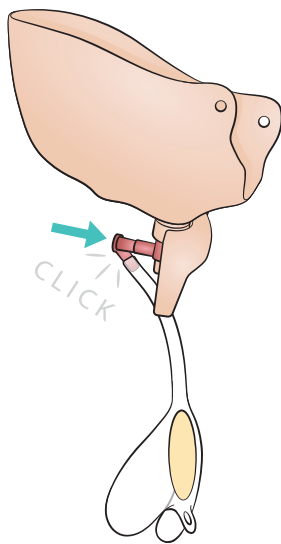

3

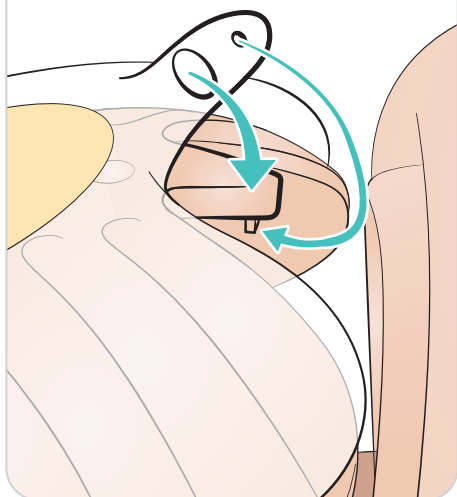


4

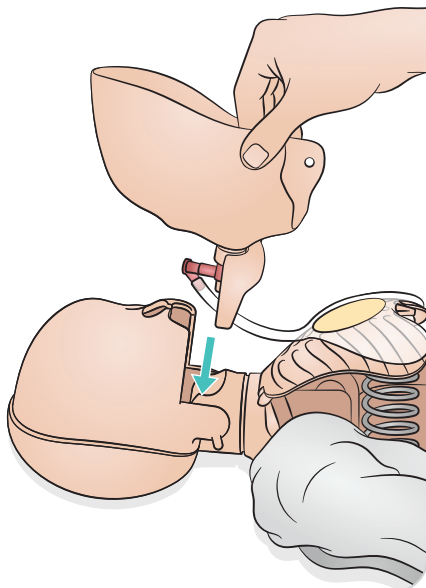





5

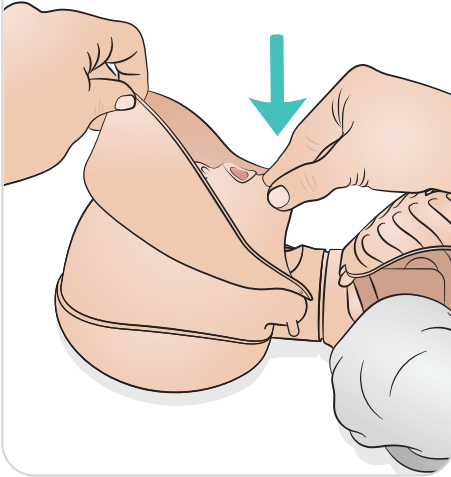


6

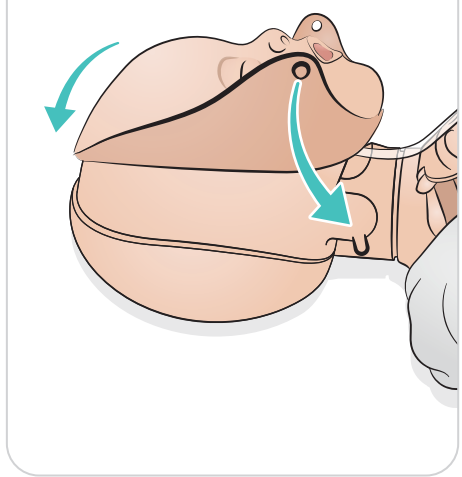


7

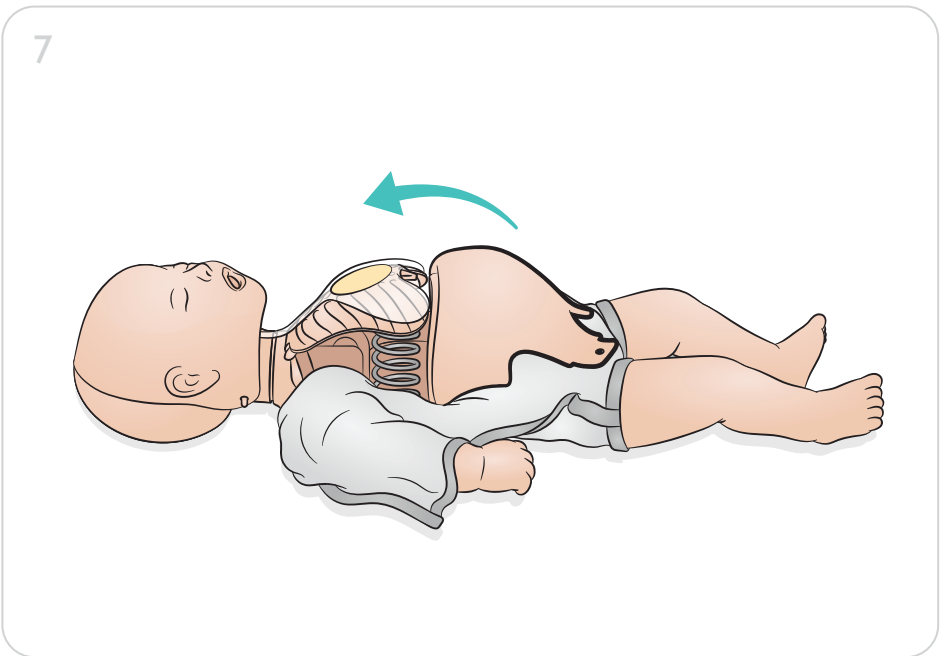


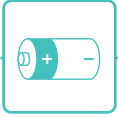


1

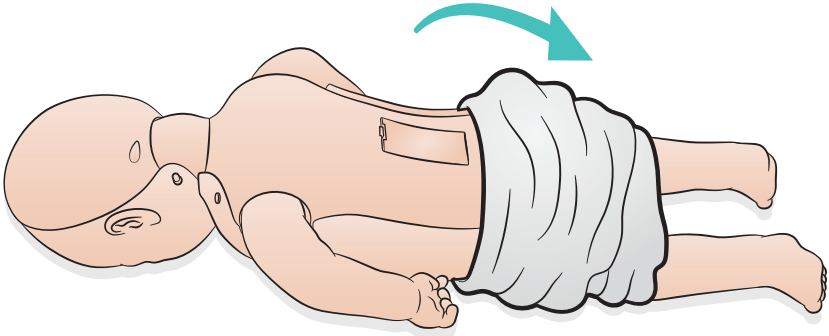

2

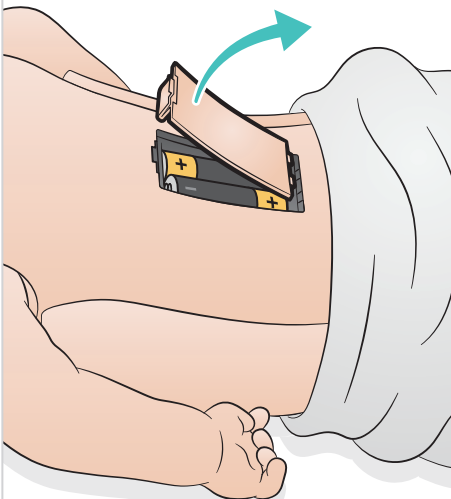

3

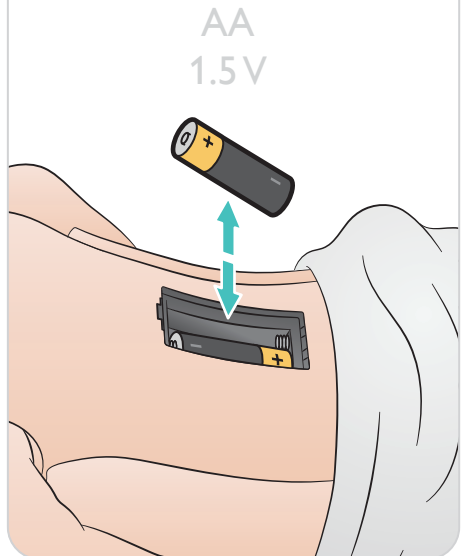







[www.laerdal.com/support](http://www.laerdal.com/support)

© 2019 Laerdal Medical AS. All rights reserved.

Laerdal Medical AS  
P.O. Box 377,  
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway  
T: (+47) 51 51 17 00

Printed in China

20-15511 Rev A

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



**Laerdal**  
helping save lives