



1.

NO ⚠ OBS!

Sikkerhetsinstrukser for lagring og håndtering av hemoglobin-mikrokuvetter

☞ Hemoglobin-mikrokuvetter er kun ment brukt til bestemmelse av hemoglobin i kapillært og venøst blod og må kun brukes i forbindelse med følgende apparater: Hemo_Control, Hemo_Control Manager, Hemo_Vet, Hemo_Vet Manager. De får kun benyttes av kvalifisert fagpersonale.

📖 For ytterligere informasjoner ber vi deg se i bruksanvisningen til de respektive apparatene.

Kuvettene må kun lagres i originalemballasjen ved 15°C til 30°C. Lukkede originalbokser er holdbare til den datoen er påskrevet. Etter at boksen er åpnet er kuvettene stabile i de oppgitte betingelsene i 3 måneder hvis de behandles riktig.

Ta kun en kuvett om gangen ut av boksen. Lukk boksen godt igjen straks etter at kuvetten er tatt ut (**se fig. 1.**). Forsikre deg om at lokket til kuvettboksen alltid er helt lukket (**se fig. 2.**).

Hvis lokket ikke er helt lukket (**se fig. 3.**), kan fuktighet trenge inn og ødelegge reagensene i kuvetten. Bruk av slike kuvetter kan medføre feilaktige resultater. Benytt aldri kuvetter fra en boks som ikke var korrekt lukket!



2.



3.

☞