



PROFESJONELL HØYDEMÅLER FOR SPEDBARN MOD. WH80



Les nøye denne bruksanvisningen før produktet tas i bruk

INNHold

1. TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG BRUK.....	2
2. MONTERING AV HØYDEMÅLER- OG BABYVEKT BABYTWO	2
3. MÅLING	3



VÆR OPPMERKSOM!

Operatørene må lese nøye denne håndboken, følge instruksjonene i denne og bli kjent med korrekte prosedyrer for bruk og vedlikehold av instrumentet.

- Ta vare på denne bruksanvisningen og samsvarserklæringen for konsultasjon og bruk den ved med opplæring av personell.
- For bedre og lengre levetid for produktet er det lurt å regelmessig utføre en grundig generell rengjøring.
- Instrumentet rengjøres med en myk klut, fuktet med vann eller et mildt rengjøringsmiddel. Unngå bruk av løsemidler eller slipemidler.
- Ved langvarig inaktivitet av instrumentet, fjern batteriene fra batterirommet.
- Ikke utsett instrumentet for støt eller overdreven mekanisk belastning under transport.
- I tilfelle reparasjon eller assistanse kontakt din forhandler eller et autorisert servicesenter ved å kontakte **service2@wunder.it** eller **sales@wunder.it**

1. TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG BRUK

TEKNISKE SPESIFIKASJONER


MÅLEOMRÅDE	35~80cm
DIVISJON	1mm
DIMENSJONER	W87 x L30 x H7cm
VEKT	700g
DRIFTSTEMPERATUR	10°C~40°C

2. MONTERING AV HØYDEMÅLER- OG BABYVEKT BABYTWO


Gå frem på følgende måte for å installere den høydemåleren:

A) Fest høydemålerstøtten til veieflaten med de to medfølgende Phillips-skruene (Fig.a)	Fig.A	
B) Plasser den høydemåleren på støtten som tidligere ble festet til veieflaten (Fig.b)	Fig.B	
C) Installasjonen er nå fullført (Fig.c)	Fig.C	

3. MÅLING

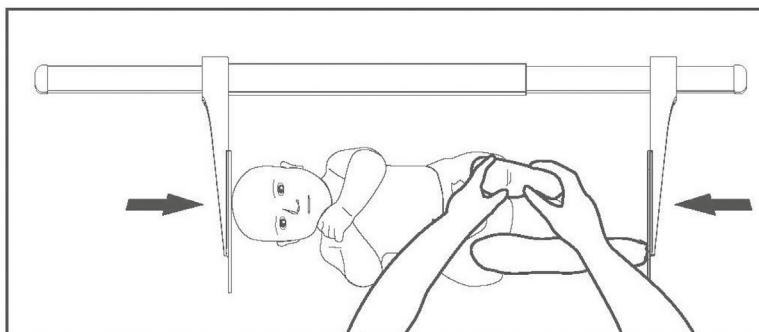

1. Hvil barnets hode lett på klaffen til venstre
2. Strekk ut barnets føtter

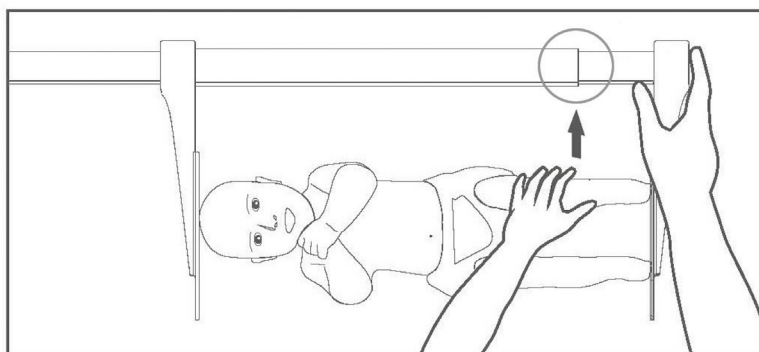

3. Flytt den høyre klaffen til den berører barnets føtter
4. Lapsen pituus luetaan pituusmittarin punaisesta viivasta



Wunder Sa.Bi. S.r.l.
Via Vecchia per Monza, 20
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Tel. +39 02 90964566
www.wunder.it