



TELESKOPISK HØYDEMÅLER
MOD. WH200 - WH200D



 **Les nøye denne bruksanvisningen før produktet tas i bruk**

INNHold

1. GENERELLE BESTEMMELSER	2
2. SIKKERHET	2
3. TEKNISKE SPESIFIKASJONER	3
4. INSTRUKSJONER FOR BRUK	3
5. VEDLIKEHOLD OG SERVICE	5
6. VRAKING OG KASSERING	5
7. GARANTI	6

Ved å velge **WUNDER** høydemåler mod.**WH200 - WH200D** har du kjøpt et profesjonelt måleinstrument. **WUNDER** har satt sin ekspertise til tjeneste for helsen i mer enn 40 år. Dette instrumentet er i samsvar med nasjonale standarder på sykehus, legekontorer og institusjoner for døgnbehandling. Instrumentet kjennetegnes av en silketrykt, anodisert aluminiumsstang som måler høyden på pasienten. Målingene kan gjøres enten ved å lese av direkte på den silketrykte stangen (WH200) eller ved hjelp av en digital LCD-skjerm plassert på den avtakbare hodeklaffen (WH200D).

1.GENERELLE BESTEMMELSER



Les denne håndboken før du bruker instrumentet ettersom den gir viktig informasjon som gjelder SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD

Beskrivelsene og illustrasjonene i denne håndboken er ikke bindende.

WUNDER forbeholder seg retten til å foreta endringer som de anser som nødvendige for forbedring uten å måtte oppdatere denne publikasjonen.

Teknisk kundeservice WUNDER står til din disposisjon.

Konvensjoner: I denne bruksanvisningen brukes følgende symboler:

	VÆR OPPMERKSOM! PLASSERT FØR PROSEDYRENE BESTEMMES. FØLGER MAN IKKE DETTE KAN DET MEDFØRE SKADE PÅ OPERATØREN ELLER PASIENTEN OG PRODUKTET
	EUROPEISK DIREKTIV 2012/19/EU FOR AVFALLSHÅNDTERING

2. SIKKERHET

Operatørene må lese nøye denne håndboken, følge instruksjonene i denne og bli kjent med korrekte prosedyrer for bruk og vedlikehold av instrumentet.

Produsenten påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte skader, herunder tap av fortjeneste eller annen kommersiell skade som kan skyldes bruk av produktet som ikke er i samsvar med det som er beskrevet i denne håndboken.

- Ta vare på denne bruksanvisningen og samsvarserklæringen for konsultasjon og bruk den ved opplæring av personell.
- For å foreta en korrekt høydemåling må du ikke flytte markøren fra klaffen, men fra markøren. Hvis klaffen brukes, kan den bli ødelagt over tid
- Ikke legg instrumentet i vann eller andre væsker

2.1 TILTENKT BRUK

Denne enheten er beregnet på å brukes til å veie personer for generelle diagnostiske formål.

Bruksmiljø: på sykehus, medisinske klinikker og legekontorer. Installasjonsrommet må være utstyrt med et elektrisk anlegg som er i samsvar med gjeldende standarder. Det anbefales å bruke vekten i omgivelser som ikke er utsatt for magnetiske forstyrrelser.

Personell som skal bruke produktet: ansatte og leger som er kjent med produktet.

Kontroll og ansvar: det medisinske utstyret må brukes under oppsyn av en kvalifisert lege eller kvalifisert personell for vedlikehold og periodiske kontroller.

Begrensninger i bruk: dette medisinske utstyret må kun brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen.

3. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	WH200		WH200D
Kode	00069AB	00069AD	00051D
Gradert skala	Fra 60 til 210 cm	Fra 65 til 225 cm	Fra 120 til 202 cm
Divisjon	1 mm – 1/16 tomme		1 mm – 1/16 tomme
Produsent	Wunder Sa.Bi. Srl - Trezzo Sull'Adda (MI), Italy		
Måleenheter	mm / tomme		

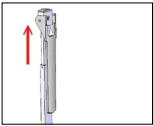
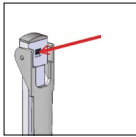
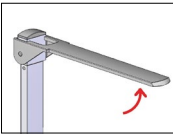
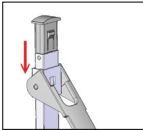
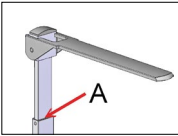
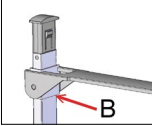
4. INSTRUKSJONER FOR BRUK

4.1 BRUK AV MEKANISK MANUELL HØYDEMÅLER




VÆR OPPMERKSOM!

FOR HØYDEMÅLING Plasseres pasienten på veiplattformen

Mål over 131 cm		Mål lavere enn 130 cm	
	Løft den øvre delen av høydemåleren.		Senk hodeklaffen og trykk på den svarte, midtre låsen.
	Plasser hodeklaffen horisontalt.		Mens du trykker på den svarte stopperen, senk hodeklaffen.
	Senk stangen til det punktet der klaffen berører pasientens hode. Høyden kan leses av ved punkt 'A'.		Senk markøren til det punktet der klaffen berører pasientens hode. Høyden kan leses av ved punkt 'B'.

4.2 BRUK AV ELEKTRONISK MANUELL HØYDEMÅLER

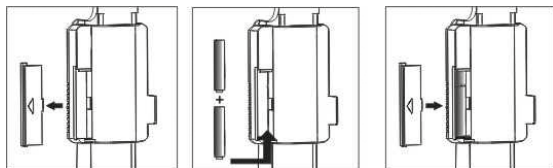
FASE 1: BATTERIINSTALLASJON



- Fjern dekelet til batterirommet, som befinner seg bak indikatoren
- Sett inn de 2 batteriene, og overhold polariteten
- Sett på dekelet igjen

FASE 2: KOBLE HØYDEMÅLER-KABELEN TIL VEKTDISPLAYET

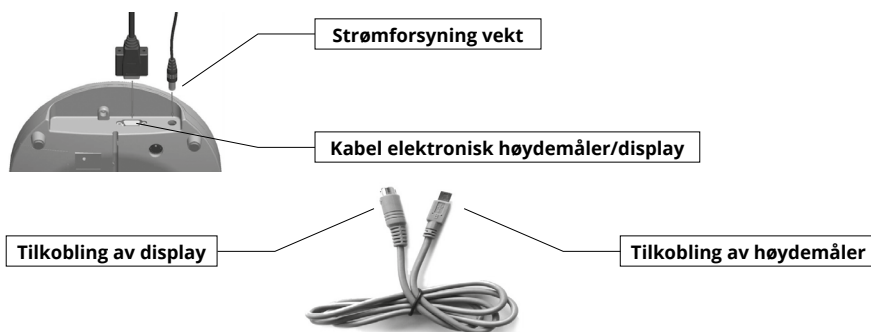Det følger med en kabel som gjør det mulig å koble den elektroniske høydemåleren direkte til displayet og måle høyden automatisk.



Displaytilkoblingen er plassert ved visirets nedre del.


Tilkoblingen for høydemåler er plassert under høydemålerindikatoren

FASE 3: HØYDEMÅLING

FOR HØYDEMÅLING Plasseres pasienten på veiplatformen

Når du har koblet kabelen riktig til displayet:

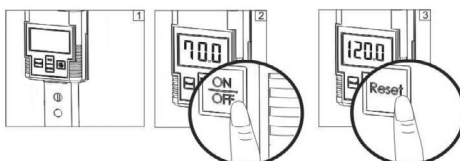- Slå på vekten ved å trykke på tasten **ON/OFF**
- Flytt klaffen til startpunktet (nedre endestopp), og slå på høydemåleren ved å trykke på tasten **ON/OFF**.
- For korrekt måling må du trykke på RESET-knappen når klaffen er plassert ved nedre endestopp.
- Løft klaffen slik at personen kan stå under den
- Senk den bevegelige markøren til den berører personens hode.
- Høydemålingen vises både på vektens display og på høydemålerens display.



5. VEDLIKEHOLD OG SERVICE

For bedre og lengre levetid for produktet er det lurt å regelmessig utføre en grundig generell rengjøring. Instrumentet rengjøres med en myk klut, fuktet med vann eller et mildt rengjøringsmiddel. Unngå bruk av løsemidler eller slipemidler. Ved langvarig inaktivitet av instrumentet, fjern batteriene fra batterirommet og dekk til instrumentet for å holde det intakt. Ikke utsett instrumentet for støt eller overdreven mekanisk belastning under transport. I tilfelle reparasjon eller assistanse kontakt din forhandler eller et autorisert servicesenter ved å kontakte service2@wunder.it eller sales@wunder.it.

6. VRAKING OG KASSERING

Sette vekk: Dersom innretningen settes vekk for en lengre periode må man sørge for å beskytte de deler som kan skades av eventuelle oppsamlinger av støv.

Kassering: Når man bestemmer at dette produktet ikke skal brukes mer må det gjøres uvirksomt. Vi anbefaler også at de deler som kan være årsak til fare gjøres ufarlige.



Kassering iht. direktiv 2012/19/EF

Dette produktet er i samsvar med **Direktiv 2012/19/EF**. Symbolet overkrysset avfallsbeholder på apparatet betyr at produktet ikke skal kastes i restavfallet. Det må behandles separat og må leveres til et sted for innsamling av elektroniske og elektronisk avfall eller leveres til forhandler ved kjøp av et nytt produkt av samme type. Brukeren er ansvarlig for å levere apparatet etter levetid til egnede innsamlingssteder. Egnede innsamling for å starte resirkulering, behandling og miljøvennlig kassering av apparatet, bidrar til å unngå mulige bivirkninger på miljø og helse og fremmer gjenvinning av materialene som produktet er produsert av.

For ytterligere informasjon som gjelder tilgjengelige mulige innsamlingssystemer ta kontakt med ditt lokale innsamlingssted eller butikken hvor produktet ble kjøpt.

Som forbruker er man påbudt ved lov å levere tilbake brukte eller utladede batterier. Dere kan levere gamle batterier til offentlige innsamlingssteder eller ta dem med til en hvilken som helst forhandler av batterier som har satt ut beholdere for innsamling. Også i tilfelle «kassering» av elektriske og elektroniske apparater må de tas ut og plasseres i tilhørende beholdere for innsamling.

MERK: Følgende symboler indikerer at det finnes giftige stoffer

Batterier:

Pb Pb = batterier som inneholder Bly	Cd Cd = batterier som inneholder Kadmium	Hg Hg = Batterier som inneholder Kvikksølv
--------------------------------------	--	--



VÆR OPPMERKSOM!

Ikke kast elektriske deler og batterier i restavfallet. Lever batterier til innsamlingssteder i ditt nærmiljø.

7. GARANTI

Dette sertifikatet må oppbevares frem til garantiens utløpsdato.

Den må fremlegges sammen med fakturaen, skattekvitteringen eller pakkseddelen som viser navnet på forhandleren og salgsdatoen, når det kreves en teknisk inngripen. I motsatt fall mister brukeren alle garantirettigheter. Garantien begynner å løpe fra kjøpsdatoen og gjelder i den perioden som er angitt i den aktuelle katalogen/listen. Garantien innebærer kostnadsfri utskifting eller reparasjon, innenfor de fastsatte tidsfrister, av apparatets komponenter som etter produsentens uomtvistelige mening viser seg å være defekte ved kilden; Wunder vil derfor ha rett til å reparere eller erstatte artikkelen.

Garantien dekker ikke:

- transportskader, fallskader, skader forårsaket av uaktsomhet og tukling
- skade på grunn av manglende evne til å bruke enheten og feilaktig bruk av den
- skader forårsaket av utilstrekkelig eller mangelfull elektrisk installasjon eller endringer som følge av miljømessige, klimatiske eller andre forhold
- skader som skyldes feil installasjon av apparatet og reparasjoner utført av uautorisert personell
- Hjemmebesøk for bekvemmelighetskontroller eller mistanke om feil
- Rutinemessig vedlikehold og det som kan anses som normal slitasje på grunn av bruk

Serviceinngrep kan også nektes når utstyret har blitt modifisert eller ombygget på noen måte. Hvis apparatet repareres hjemme, må brukeren betale den faste utreisekostnaden. Hvis apparatet derimot repareres på et av Wunders autoriserte servicesentre, vil kostnadene og risikoen for transport bæres av brukeren.

Wunder er heller ikke ansvarlig for skader av noe slag, som direkte eller indirekte kan forårsakes på personer, dyr eller eiendom som følge av manglende overholdelse av alle instruksjonene i denne bruksanvisningen eller på annen måte som følge av feilaktig bruk.

Bergamo-domstolen har jurisdiksjon for enhver tvist.



Wunder Sa.Bi. S.r.l.
Via Vecchia per Monza, 20
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Tel. +39 02 90964566
www.wunder.it