



**PROFESJONELL PERSONVEKT
MOD. 960 150A / R150A**



 **Les nøye denne bruksanvisningen før produktet tas i bruk**

INNHold

1. GENERELLE BESTEMMELSER	2
2. SIKKERHET	3
3. TILTENKT BRUK	3
4. TEKNISKE SPESIFIKASJONER	4
5. INSTRUKSJONER FOR BRUK	5
6. MONTERING AV TELESKOPISK HØYDEMÅLER (TILVALG)	7
7. BRUK AV MEKANISK MANUELL HØYDEMÅLER (TILVALG)	8
8. SAMSVAR	9
9. IDENTIFIKASJONSSKILT	9
10. VEDLIKEHOLD OG SERVICE	10
11. VRAKING OG KASSERING	10
12. GARANTI	11

Ved å velge **WUNDER** profesjonell mekanisk vekt mod. 960**150A / R150A** har du kjøpt et apparat med høy presisjon og høy kvalitet. **WUNDER** har satt sin ekspertise til tjeneste for helsen i mer enn 40 år. **WUNDERS** mekaniske vekter mod. **960 150A / R150A** oppfyller gjeldende standarder for sykehus, legekontorer og døgninstitusjoner.

Personvektene **960 150A / R150A** er Im-klassifiserte medisinske produkter med måleenhet og er kalibrert i samsvar med nøyaktighetsklasse IIII (i henhold til 2017/745 og 90/384 EØF).

1. GENERELLE BESTEMMELSER



VÆR OPPMERKSOM!

Les denne håndboken før du bruker instrumentet ettersom den gir viktig informasjon som gjelder SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.

Beskrivelsene og illustrasjonene i denne håndboken er ikke bindende.

WUNDER forbeholder seg retten til å foreta endringer som de anser som nødvendige for forbedring uten å måtte oppdatere denne publikasjonen.

Vi anbefaler at vedlikeholdet utføres av kvalifisert personell. Teknisk kundeservice WONDER står til din disposisjon.

Konvensjoner: I denne bruksanvisningen brukes følgende symboler:

	MEDISINSK ENHET SOM ER I OVERENSSTEMMELSE MED REGULERING (EU) 2017/745
	EGNET VERKTØY FOR JURIDISK BRUK, I SAMSVAR MED DIREKTIV 2014/31/EU OG DEN EUROPEISKE STANDARDEN EN45501
	MEDISINSK ENHET
	UNIK ENHETSIDENTIFIKASJON
	INSTRUMENT I SAMSVAR MED DIREKTIV OM IKKE-AUTOMATISKE VEKTER NAWI KLASSE IIII 90/384 - 2014/31/EU OG DEN EUROPEISKE STANDARDEN EN45501
	VÆR OPPMERKSOM! PLASSERT FØR PROSEDYRENE BESTEMMES. FØLGER MAN IKKE DETTE KAN DET MEDFØRE SKADE PÅ OPERATØREN ELLER PASIENTEN OG PRODUKTET
	LES NØYE DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR PRODUKTET TAS I BRUK
	PRODUSENT: WUNDER SA.BI. SRL – VIA VECCHIA PER MONZA, 20 – TREZZO S/ADDA (MI), ITALY

2. SIKKERHET



VÆR OPPMERKSOM!

Operatørene må lese nøye denne håndboken, følge instruksjonene i denne og bli kjent med korrekte prosedyrer for bruk og vedlikehold av instrumentet.

Produsenten påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte skader, herunder tap av fortjeneste eller annen kommersiell skade som kan skyldes bruk av produktet som ikke er i samsvar med det som er beskrevet i denne håndboken.

- Ta vare på denne bruksanvisningen og samsvarserklæringen for konsultasjon og bruk den ved opplæring av personell.
- Ikke overbelast instrumentet utover maksimal kapasitet.
- Ikke fest last på en brå måte.
- Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander for å trykke på tastene.
- Ikke prøv å åpne instrumentet.
- Ikke fjern forseglingene som er på instrumentet.
- Ikke legg instrumentet i vann eller andre væsker.
- Utfør regelmessig vedlikehold og påfølgende målingskontroller.

Du må rapportere alle alvorlige hendelser som oppstår i forbindelse med det medisinske utstyret du leverer, til produsenten og til den kompetente myndigheten i den medlemsstaten der du befinner deg.

3. TILTENKT BRUK

Denne enheten er beregnet på å brukes til å veie personer for generelle diagnostiske formål.

Personell som skal bruke produktet: ansatte og leger som er kjent med produktet.

Kontroll og ansvar: det medisinske utstyret må brukes under oppsyn av en kvalifisert lege eller kvalifisert personell for vedlikehold og periodiske kontroller.

Begrensninger i bruk: dette medisinske utstyret må kun brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen.

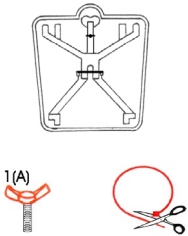
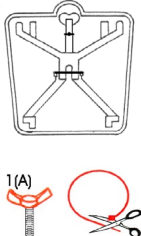
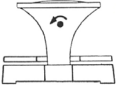
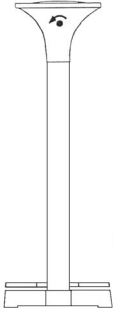
Produktets levetid: 10 år

4. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	960 150A	R150A SØYLE
		
Kapasitet	150 kg	150kg
Divisjon	1000g	1000g
Produsent	Wunder Sa.bi. srl Trezzo S/Adda Milano Italy	
OIML-godkjenning	Klasse IIII	Klasse IIII
Måleenheter	Kg	
Driftstemperatur	da +10°C a +40°C	
Tilbehør		Teleskopisk høydemåler 60-210/225 cm : 1mm / 2~6.6FT

5. INSTRUKSJONER FOR BRUK

960 150A	R150A-søyle
Instrumentet leveres klart til bruk uten tilbehør som må monteres, komplett med bruksanvisning med alle instruksjoner for riktig bruk av instrumentet.	Instrumentet leveres klart til bruk uten tilbehør som må monteres, komplett med bruksanvisning med alle instruksjoner for riktig bruk av instrumentet. Tilbehør: - Stanghøydemåler 65-200 cm (tilvalg) - Transporthjul (tilvalg)
ANGIVELSE AV DELER	
	
1. Hode med analog urskive 2. Gummibelagt plattform 3. Base 4. Vektindikator 5. Skrue for nulljustering	1. Hode med analog urskive 2. Gummibelagt plattform 3. Base 4. Vektindikator 5. Skrue for nulljustering 6. Søyle TILBEHØR (TILVALG) 7. Støttebrakett for høydemåler 8. Teleskopisk høydemåler 9. Transporthjulsett (kun på forespørsel)

960A Klargjøring for bruk	R150A Klargjøring for bruk
1 	1 
1. Snu instrumentet opp ned: fjern den røde klemmen, og skru ut den røde sommerfuglskruen for å frigjøre spakmekanismen.	
2 	2 
2. Plasser instrumentet på en flat overflate for pålitelig vektmåling.	
3 	3 
3. Kontroller at vektindeksen (pekeren) står på null. Hvis den ikke er riktig posisjonert ved nullstilling, må du justere manuelt med justeringsskruen som befinner seg bak instrumenthodet.	
4. Gå opp på vektens base (plattform) og les av vekten ved hjelp av viseren.	



Matten er avtakbar for å muliggjøre bedre desinfisering

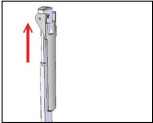
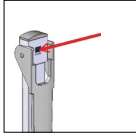
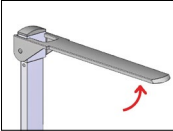
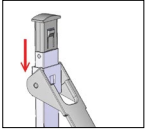
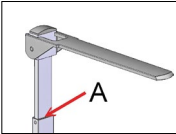
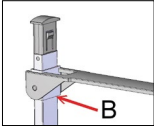
6. MONTERING AV TELESKOPISK HØYDEMÅLER (TILVALG)



Plasser støtten på baksiden av søylen, og fest den med de to medfølgende skruene på søylen.

7. BRUK AV MEKANISK MANUELL HØYDEMÅLER (TILVALG)**VÆR OPPMERKSOM!**

FOR HØYDEMÅLING PLOSSERES PASIENTEN PÅ VEIEPLATTFORMEN

Mål over 131 cm		Mål lavere enn 130 cm	
1			
	Løft den øvre delen av høydemåleren.	1	
			Senk hodeklaffen og trykk på den svarte, midtre låsen.
2		2	
	Plasser hodeklaffen horisontalt.		Mens du trykker på den svarte stopperen, senk hodeklaffen.
3		3	
	Senk stangen til det punktet der klaffen berører pasientens hode. Høyden kan leses av ved punkt 'A'.		Senk markøren til det punktet der klaffen berører pasientens hode. Høyden kan leses av ved punkt 'B'.

8. SAMSVAR

WUNDER DIGITALVEKT MODELL 960 150A / R150A SERIENR.....
Vi bekrefter at dette instrumentet har blitt kontrollert og har bestått funksjonstesten. Det er i samsvar med følgende standarder og direktiver: 2009/23/CE; EN45501; FORORDNING (EU) 2017/745

9. IDENTIFIKASJONSSKILT



VÆR OPPMERKSOM!

På det påsatte metrologiske skiltet angis produksjonsår (M YY) eks. M 24 = 2024, M 25 =2025...osv.

REF 960 150 A Max = 150 kg e = d = 1000 g Min = 10 kg +5 °C / +35 °C Manufacturer: Wunder Sa.Bi. s.r.l Via Vecchia per Monza, 20 20056 - Trezzo sull'Adda (MI) - Italy CE M YY 0474 T12037 rev 0 SN 0000	IN ACCORDANCE WITH REGULATION (EU) 2017/745 CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2017/745 CE 0425
UDI 2025-01-16 MD (01)08052570460052 (11)250116 (21)C24010000 IC: 00011A SN C24010000	
REF R150A Max = 150 kg e = d = 1000 g Min = 10 kg +5 °C / +35 °C Manufacturer: Wunder Sa.Bi. s.r.l Via Vecchia per Monza, 20 20056 - Trezzo sull'Adda (MI) - Italy CE M YY 0474 T12037 rev 0 SN 0000	IN ACCORDANCE WITH REGULATION (EU) 2017/745 CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2017/745 CE 0425
UDI 2025-01-17 MD (01)08052570460007 (11)250117 (21)C24010000 IC: 00021A SN C24010000	

10. VEDLIKEHOLD OG SERVICE



VÆR OPPMERKSOM!

Vi anbefaler at du kontrollerer ditt instrument med et korrekt periodisk vedlikehold.

Vi anbefaler at denne kontrollen utføres av personell som er kvalifisert for denne oppgaven.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt teknisk kundeservice hos WUNDER som står til disposisjon.

For bedre og lengre levetid for produktet er det lurt å regelmessig utføre en grundig generell rengjøring. Instrumentet rengjøres med en myk klut, fuktet med vann eller et mildt rengjøringsmiddel. Unngå bruk av løsemidler eller slipemidler. Ved langvarig inaktivitet av instrumentet, fjern batteriene fra batterirommet og dekk til instrumentet for å holde det intakt. Ikke utsett instrumentet for støt eller overdreven mekanisk belastning under transport. I tilfelle reparasjon eller assistanse kontakt din forhandler eller et autorisert servicesenter ved å kontakte [**service2@wunder.it**](mailto:service2@wunder.it) eller [**sales@wunder.it**](mailto:sales@wunder.it).

11. VRAKING OG KASSERING

Sette vekk: Dersom innretningen settes vekk for en lengre periode må man sørge for å beskytte de deler som kan skades av eventuelle oppsamlinger av støv.

Kassering: Når man bestemmer at dette produktet ikke skal brukes mer må det gjøres uvirksomt. Vi anbefaler også at de deler som kan være årsak til fare gjøres ufarlige.

12. GARANTI

Dette sertifikatet må oppbevares frem til garantiens utløpsdato.

Den må fremlegges sammen med fakturaen, skattekvitteringen eller pakkseddelen som viser navnet på forhandleren og salgsdatoen, når det kreves en teknisk inngripen. I motsatt fall mister brukeren alle garantirettigheter. Garantien begynner å løpe fra kjøpsdatoen og gjelder i den perioden som er angitt i den aktuelle katalogen/listen. Garantien innebærer kostnadsfri utskifting eller reparasjon, innenfor de fastsatte tidsfrister, av apparatets komponenter som etter produsentens uomtvistelige mening viser seg å være defekte ved kilden; Wunder vil derfor ha rett til å reparere eller erstatte artikkelen.

Garantien dekker ikke:

- Transportskader, fallskader, skader forårsaket av uaktsomhet og tukling
- Skade på grunn av manglende evne til å bruke enheten og feilaktig bruk av den
- Skader forårsaket av utilstrekkelig eller mangelfull elektrisk installasjon eller endringer som følge av miljømessige, klimatiske eller andre forhold
- Skader som skyldes feil installasjon av apparatet og reparasjoner utført av uautorisert personell
- Hjemmebesøk for bekvemmelighetskontroller eller mistanke om feil
- Rutinemessig vedlikehold og det som kan anses som normal slitasje på grunn av bruk

Serviceinngrep kan også nektes når utstyret har blitt modifisert eller ombygget på noen måte. Hvis apparatet repareres hjemme, må brukeren betale den faste utreisekostnaden. Hvis apparatet derimot repareres på et av Wunders autoriserte servicesentre, vil kostnadene og risikoen for transport bæres av brukeren.

Wunder er heller ikke ansvarlig for skader av noe slag, som direkte eller indirekte kan forårsakes på personer, dyr eller eiendom som følge av manglende overholdelse av alle instruksjonene i denne bruksanvisningen eller på annen måte som følge av feilaktig bruk.

Bergamo-domstolen har jurisdiksjon for enhver tvist.



Wunder Sa.Bi. S.r.l.
Via Vecchia per Monza, 20
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Tel. +39 02 90964566
www.wunder.it