

OCCHIALI X5-PRO -ANTIAPPANNANTI E ANTIGRAFFIO
X5-PRO GOGGLES - FOG RESISTANT AND ANTI-SCRATCH
LUNETTES X5-PRO - ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES
GAFAS X5-PRO: RESISTENTES AL VAHO Y ANTIARAÑAZOS
ÓCULOS X5-PRO - RESISTENTES AO NEVOEIRO E ANTI-RISCOS
X5-PRO-BRILLE – BESCHLAGFREI UND KRATZFEST
X5-PRO-BRIL - CONDENSBESTENDIG EN KRASBESTENDIG
X5-PRO BRILLE - TÅGEAFVISENDE OG ANTI-RIDSE
X5-PRO GOGGLES - IMMA RESISTENTA OCH ANTI-REPOR
X5-PRO SUOJALASIT - HUURTUMATON JA NAARMUUNTUMATON
X5-PRO BRILLE - TÅKEBESTANDIG OG ANTI-RIPE
GOGLE X5-PRO - ODPORNE NA MGŁĘ I ZARYSOWANIA
BRÝLE X5-PRO - ODOLNÉ PROTI ZAMLŽENÍ A PROTI POŠKRÁBÁNÍ
X5-PRO SZEMÉVVEZETÉK - PÁRA- ÉS KARCÁLLÓ
GOGGLES X5-PRO - REZISTENTI LA CEATA SI ANTI-ZGARIETURI
NAOČALE X5-PRO - ODPORNE NA MAGLJENJE I OGREBOTINE
OČALA X5-PRO - ODPORNA NA ROSENJE IN PRASKE
ОЧИЛА X5-PRO - УСТОЙЧИВИ НА МЪГЛА И ПРОТИВ НАДРАСКВАНЕ
X5-PRO GOGGLES - ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
شده ل ل ة داضم و بابض ل ل ة م واقم - X5-PRO تاراظن

REF GDG01 (Gima 25257 - 25258)



Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται
από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av /
Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري تاسا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Bruksinstruksjoner

Modell: Ordinær type

Rev. A/1 Effektiv: 2020-4-

Beskrivelse:

Isolerte vernebriller er et medisinsk utstyr, ment å skape en fysisk barriere som separerer øynene fra omgivelsene. Dette utstyret hindrer at væske eller dråper kommer i kontakt med brukeren. Isolerte vernebriller er medisinsk utstyr til engangsbruk.

Bruksinstruksjoner:

Beskytter slimhinnene rundt øynene fra sprutende og skvettende kroppsvæsker.

Motindikasjoner:

Ingen.

Produktets bivirkninger:

Produktet har ingen bivirkninger.

Advarsel:

1. Ikke bruk hvis komponenten viser tegn på skader.
2. Komponentene må ikke eksponeres for temperaturer som er høyere enn det som er oppgitt på pakken.
3. Produktet må kastes som et produkt som utgjør en biologisk risiko, i henhold til gjeldende retningslinjer.

Bruk:












Ta ut brillene fra pakken, kontroller at de er i god stand, juster den teleskopiske stangen til en komfortabel posisjon og bruk den rundt øret.

Lagring:

Produktet må oppbevares tørt ved 0–30°C.

Må beskyttes mot sollys. 1.

Symbolforklaringer:

	Utløpsdato		Engangsutstyr, ikke gjenbruk
	Produksjonsserienummer		Ikke bruk hvis emballasjen er skadet
	Fabrikasjonsdato		Må oppbevares på et sted uten direkte sollys
	Medisinsk enhet i samsvar med forskriften (UE) 2016/425		Må oppbevares på et tørt og kaldt sted
	Produsent		Autorisert representant i EU
	Produktkode		

GIMA GARANTIBETINGELSER

Gimas standard 12-måneders B2B-garanti er gjeldende.e

CE PVU Kat.II utgitt av:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Tilsynsmyndighet 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Tyskland

i henhold til Vedlegg II i Forordning (EU) 2016/425 - Harmonisert EN 166:

2001 Direktiv 2001/95/EC