

**OCCHIALI D'ISOLAMENTO MEDICALI**  
**MEDICAL ISOLATION GOGGLES**  
**LUNETTES MÉDICALES D'ISOLEMENT**  
**GAFAS DE AISLAMIENTO MÉDICO**  
**ÓCULOS DE ISOLAMENTO MÉDICO**  
**MEDIZINISCHE ISOLATIONSBRILLE**  
**ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ**  
**MEDISCHE ISOLATIEBRIL**  
**MEDICINSK ISOLATIONSBRILLE**  
**MEDICINSK ISOLERINGSGLÖGONE**  
**LÄÄKETIETEELLISET ERISTYSLASIT**  
**MEDISINSKE ISOLASJONSBRILLE**  
**OKULARY IZOLACYJNE MEDYCZNE**  
**LÉKAŘSKÉ IZOLAČNÍ BRÝLE**  
**MEDICINSKA IZOLACIJSKA OČALA**  
**MEDICINSKE IZOLACIJSKE NAOČALE**  
**ORVOSI SZEMÉVEZET**  
**OCHEAREI DE IZOLAT MEDICAL**  
**МЕДИЦИНСКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОЧИЛА**  
**ةي بطل لزعلا تاراظن**

**REF** GDG02 (Gima 25266)

**Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd**  
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,  
318020 Zhejiang China  
www.chinagongdong.com  
Made in China



**ZOUSTECH S.L.**  
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,  
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av / Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري تاسا :

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



**Bruksinstruksjoner**

Modell: Helt lukket med luftventil

Rev. A/1 Effektiv: 2020-4-

**Beskrivelse:**

Isolerte vernebriller er et medisinsk utstyr, ment å skape en fysisk barriere som separerer øynene fra omgivelsene. Dette utstyret hindrer at væske eller dråper kommer i kontakt med brukeren. Isolerte vernebriller er medisinsk utstyr til engangsbruk.

**Bruksinstruksjoner:**

Beskytter slimhinnene rundt øynene fra sprutende og skvettende kroppsvæsker.

**Motindikasjoner:**

Ingen.

**Produktets bivirkninger:**

Produktet har ingen bivirkninger.

**Advarsel:**

1. Ikke bruk hvis komponenten viser tegn på skader.
2. Komponentene må ikke eksponeres for temperaturer som er høyere enn det som er oppgitt på pakken.
3. Produktet må kastes som et produkt som utgjør en biologisk risiko, i henhold til gjeldende retningslinjer.

**Bruk:**












Ta brillene ut av emballasjeposen, bekreft at brillene er i god stand, og riv av beskyttelsesfilmen; brillene fester det elastiske båndet bak hodet, og justerer den myke fikseringsanordningen for å få den til å passe tett med ansiktet.

**Lagring:**

Produktet må oppbevares tørt ved 0–30°C.

Må beskyttes mot sollys.1.

**Symbolforklaringer:**

	Utløpsdato		Engangsutstyr, ikke gjenbruk
	Produksjonsserienummer		Ikke bruk hvis emballasjen er skadet
	Fabrikasjonsdato		Må oppbevares på et sted uten direkte sollys
	Medisinsk enhet i samsvar med forskriften (UE) 2016/425		Må oppbevares på et tørt og kaldt sted
	Produsent		Autorisert representant i EU
	Produktkode		

**GIMA GARANTIBETINGELSER**

Gimas standard 12-måneders B2B-garanti er gjeldende.e

**CE PVU Kat.II utgitt av:**

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Tilsynsmyndighet 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Tyskland

i henhold til Vedlegg II i Forordning (EU) 2016/425 - Harmonisert EN 166:

2001 Direktiv 2001/95/EC