

Igangsetting

Kabelen til nettadapteret settes inn på baksiden av plattformen for å forsyne vekten med strøm.

Veing

Stå ganske enkelt på vekten (ingen innkobling eller påslåing nødvendig).

Lengdemåling med BMI-visning

Vipp forsiktig opp lengdemåleren og skyv den oppover. Legg så hodet på pasientens hode. På displayet vises størrelsen i cm og deretter automatisk kroppsmasseindeksen.

Balansering

Med funksjonstasten på baksiden av displayet kan man tarere vekten. Trykk tasten, displayet viser «0,0 kg» og vekten er klar til veing.

Mor-/barn-funksjon

- En voksen person stiller seg på vekten.
 - > Display f.eks. «47,6 kg»
- Trykk funksjonstasten.
 - > Displayet går til «0,0 kg»
- Moren kan gå av vekten...
 - > Display «-47,6 kg»
- ... og stille seg på vekten på nytt sammen med barnet.
 - > Du får da vekten av barnet, f.eks. «5,1 kg»

Når begge forlater vekten igjen, viser displayet i eksemplet «47,6 kg». Med funksjonstasten kan du stille vekten på «0,0 kg» igjen. Vekten går ikke automatisk til «0,0 kg», slik at flere tareringer kan gjennomføres etter hverandre.

Slå av

Vekten slår seg av automatisk, hvis displayet står i ca. 15 sekunder på «0,0 kg».

Skifte enhet

- Som standard er enheten kg innstilt. Hvis du vil stille om vekten til en annen enhet, gå fram som følger:
- Trekk ut nettstøpslet.
 - Trykk funksjonstasten, hold den inn og sett samtidig inn nettstøpslet.
 - Visningen skifter til lb.

For å stille om visningen til kg igjen, gjenta prosedyren beskrevet over.



Lengtemeting med BMI-weergave
 Højedmåler med BMI-display
 Medición de altura con indicación de IMC
 Misura di altezza con display BMI
 Pituuden mittaus BMI-näytöllä
 Längdmätning med BMI-indikering
 Lengdemåling med BMI-visning
 Μέτρηση ύψους με ένδειξη BMI (δείκτην μάζας σώματος)
 BMI göstergesi ile boy ölçümü
 Meranie výšky s údajom o BMI
 Měření výšky s výpočtem BMI
 Pomiar wzrostu i wskaźnik BMI
 Измерение длины с индикацией индекса массы тела (BMI)

Functietoets
 Funktionsknapp
 Tecla de función
 Tasto funzione
 Toimintopainike
 Funktionsknapp
 Funksjonstast
 Πάκτρο λειτουργίας
 Funksjon tušu
 Funkčné tlačidlo
 Funkční tlačítko
 Przycisk funkcyjny
 Функциональная клавиша

Resettoets
 Reset-knapp
 Tecla de reset
 Tasto Reset
 Nollauspainike
 Reset-knapp
 Resett-tast
 Πάκτρο επαναρφόρ
 Reset tušu
 Tlačidlo Reset
 Reset tlačítko
 Przycisk reset
 Кнопка сброса (Reset)

Service-interface. Optie: USB-interface
 Serviceinterface. Ekstraudstyr: USB-port
 Interfaz de servicio. Opcional: Interfaz USB
 Interfaccia di servizio. Opzione: Interfaccia USB
 Huoltoliitäntä. Lisävaruste: USB-liitäntä
 Servicegrenssnitt. Tillval: USB-gränssnitt
 Servicegrenssnitt. Alternativ: USB-grenssnitt
 Διεσοφη οεββικ, Προορρετικω: Διεσοφη USB
 Servis bađlantı yeri, İsteđe bađlı: USB bađlantı yeri
 Servisné rozhranie, Alternativa: USB rozhranie
 Servisni rozhrani, Option: USB rozhrani
 Złącze serwisowe, Opcja: interfejs USB
 Сервисный интерфейс, Опция: USB-интерфейс