

Omniflush®

B BRAUN SKYLLESPRØYTE MED NATRIUMKLORID 9 MG/ML

BESKRIVELSE	OVERDOSEERING
Syllesprøyte med natriumklorid 9 mg/ml, tilgjengelig i forskjellige volumer. Det er en steril, klar glassprøyte med holdig, isotonic løsning uten konserveringsmiddel. 1 ml inneholder 9 mg natriumklorid, ekvivalent ca 0,20 mOsmol/l (osmolaritet), pH-verdi er 4,5 - 7,0.	Ikke kjent ved bruk av aktuelle mengder.
KLINISK FARMAKOLOGI	LAGRING
Syllesprøyten med natriumklorid 9 mg/ml er en steril, væskeholdig løsning som har omtrent samme osmotiske trykk og sammensetning som ekstrakt-løst væske. Den er ikke vesentligtsende.	Ikke bruk løsningen hvis man ser utfelling, den er midlertidig eller ukjent, eller hvis sprøyten er skadet. Oppbevares ved 25C. Ansk mellom 15 - 30 C er tillatt. NB ikke fryse.
INDIKASJONER OG BRUK	ADVARSEL
Storl, isotonic løsning til skylling av intravenøse slanger og venøse tilganger.	Gjennom bruk av engangsmateriell medfører en potensiell risiko for pasienten eller brukeren. Det kan gi kontaminering og/eller tap av funksjonene som igjen kan føre til skade, sykdom eller død hos pasienten.
KONTRAINDIKASJONER	BRUKSANVISNING
Hypertensjon og vaskulærstening når administrasjon av natrium eller klorid kan være klinisk skadelig.	Bruk riktig spesiell gjennom hele prosedyren. Vasken og sprøyten er steril hos beskyttelsestetten sitter på plass, sprøyten er intakt og det ikke finnes tegn på lekkasje. 1. Inspekter forpakningen. Sprøyten må ikke brukes dersom innpakningen er skadet eller ikke intakt. 2. Fjern forpakningen. 3. Kontroller at løsningen er klar, ut beskyttelsestetten er på plass, sprøyten er intakt og at det ikke er noe tegn på lekkasje. Sprøyten må ikke brukes hvis løsningen har utfelling, er midlertidig eller ukjent eller hvis sprøyten er skadet. 4. Press på stoppeknapp og behold beskyttelsestetten på, for å fjerne stoppeknappen. 5. Fjern beskyttelsestetten. Hold sprøyten vertikalt og press ut eventuelt luftbobler. Sprøyten er nå klar til bruk. 6. Koble sprøyten til kanyle eller røstørret. 7. Bruk sammen med kanyle og slanger må sige i samsvar med produsentens anbefalinger. 8. Kutt tynnere enheter etter bruk. Kast brukte væsker. Engangsprøyter må ikke gjenbrukes. 9. Følg instruksjonens retningslinjer ved bruk av engangsprøyter til skylling.
FORHOLDSREGLER	ANBEFALING
Det må vurderes forsiktighet for å unngå kontakt med irriterende medikamenter. Så opp i tillegg instruks for å sjekke kompatibiliteten. Sprøyten skal ikke brukes hvis man kan se utfelling, løsningen er midlertidig eller ukjent, eller hvis sprøyten er skadet. Kass innholdet som ikke brukes. Skal ikke brukes som injeksjon.	Arbeidstid: Det anbefales å bruke en lavere administrasjonshastighet for å minimere mulige ubehagelige smaksopplevelser hos pasienten.
BIVIRKNINGER	
Ikke kjent ved bruk av slike mengder.	
MEKAMENTSBRUK OG AVHENGIGHET	
Ikke aktuelt.	
	Date for siste revisjon: 11/2015