

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK. KONTAKT LEGE FØR BRUK.

KONTRAINDIKASJONER: Ikke egnet for personer over 242 lbs (110 kg) - Ikke egnet for islagte eller glatte overflater. - Ikke egnet for personer med lateksallergi.

BRUKSVEILEDNING: For å åpne stokken, hold i håndtaket og la de sammenleggbare skaftsegmentene åpne seg mot gulvet. For å forhindre fall, må du alltid sjekke at de enkelte skaftsegmentene (Fig. 1) har låst seg ordentlig.

ADVARSEL IKKE demonter selve stokken. Stokken har en elastisk snor på innsiden. Ukontrollert løsning av den innvendige elastiske snoren kan forårsake alvorlig skade på ubeskyttede kroppsdelene, spesielt øynene. Hvis den elastiske snoren kuttet, revner eller skades, må du avslutte bruken.

IKKE strekk snoren mer enn nødvendig for å demontere eller montere segmentene.

FOR Å JUSTERE HØYDEN PÅ STOKKEN DIN: Løsne den dreibare låsen ved å vri den med klokken flere omdreining. Trykk ned låsekappen og trekk opp håndtaket for å forlenge det, eller trykk det ned for å forkorte det. Husk å stramme den dreibare låsen igjen etter at du har justert stokken til ønsket høyde.

ADVARSEL For å unngå fall, sørg alltid for at de enkelte skaftsegmentene er forsvarlig låst på plass og at låsekappen er satt helt inn. Sørg alltid for at den svingbare foten på stokken er forsvarlig skrudd fast til stokken for å unngå fall.

FOR Å LEGGE SAMMEN STOKKEN: Stokken din kan enkelt legges sammen til praktisk reisetørrelse ved å skille de fire individuelle skaftsegmentene fra hverandre. Hold hvert av skaftsegmentene nær leddet og dra dem fra hverandre. De enkelte skaftsegmentene vil brette pent sammen.



SLIK BRUKER DU LYSET PÅ STOKKEN: Knappen på toppen av håndtaket til stokken aktiverer lysene. Ved å trykke på knappen én gang aktiveres lyset foran stokken. Ved å trykke igjen tennes også det røde lyset nederst på håndtaket. Ved å trykke en tredje gang slås de av. Frontlyset kan vrís for å peke lyset dit du trenger det.

SOS-SIGNAL: For å aktivere SOS-signalen trykker du på knappen på siden av håndtaket. Lyset nederst blinker og stokken avgir en alarmlyd.

SKIFTE BATTERIER: Åpne batterirommet bak på håndtaket. Ta ut eventuelle tomme batterier og kast dem på riktig måte. Bruk to AAA-batterier, og sett dem inn med riktig polaritet (positiv pol utover der fjæren er plassert). Lukk batteridekslet. Inspiser stokken regelmessig for tegn på slitasje, inkludert eventuell frynsing av elastisk snor eller slitasje på gummiføttene. Hvis du ser tegn på slitasje, må du slutte å bruke den umiddelbart.

ADVARSEL Ikke bland gamle og nye batterier. Ikke bland alkaliske, standard (karbonsink) eller oppladbare (nikkel-kadmium) batterier.

GIMA GARANTIBETINGELSER: Gimas 12-måneders standard B2B-garanti gjelder.

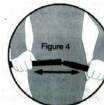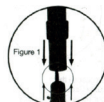

Gima 43050 - 43052

REF GB-806(1FOOT) GB-806(SKID PROOF)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaimistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Gefabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilbered av/تصنيع بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made in China

Importato da/Imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Довезено от/Dovezeno od/Dovezeno uživatelem/importeret
af/Importēja/ Tuoja:/Uvezeno od strane/Importálta:/importēja/importavo/
Importert av/Geimporteerd door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi:/Importerad av/توريد بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

