

EN

FR

DE

ES

IT

NL

NO

JA

KO

ZH

Little Baby QCPR

Important Product Information

重要产品信息

www.laerdal.com



Laerdal

helping save lives

Denne viktige produktinformasjonen gjelder for Little Baby Q CPR. Hvis ikke annet er angitt, gjelder informasjonen alle produktkonfigurasjoner.

Advarsler og forsiktighetsregler

En advarsel indikerer et forhold, en fare eller en usikker praksis som kan føre til alvorlige personskader eller død.

En forsiktighetsregel angir et forhold, en fare eller en usikker praksis som kan føre til lettere personskader eller skade på produktet.



Merknader

En merknad gir viktig informasjon om produktet eller bruken av det

Stell, vedlikehold og rengjøring

Hold dukken ren og hygienisk. Skift ut luftveien etter hver klasse, spesielt hvis det øves på munn-til-munn-metoden.

Vi anbefaler at du bruker en egen Laerdal ansiktshud for hver elev.

Dersom flere elever bruker samme ansiktshud, må den desinfiseres grundig etter hver bruk. Rengjør alle huddeler jevnlig. Bruk varmt såpevann eller Laerdal våtserviett.

Bruk av Manikin Face Shields gir en ren barriere mellom leppene dine og ansiktshuden.

Dette kan misfarge treningsdukken:

- Pigmenter fra lepestift og penner
- Latekshansker
- Bruk av andre klær enn dem som opprinnelig fulgte med produktet.



Forsiktighetsregler

- Ikke bruk væsker til å rengjøre innsiden av treningsdukken.
- Ikke senk noen av delene ned i væske.

Batteri

Bruk kun ikke-oppladbare, karbon-sink- eller alkaliske batterier av forbruksgrad LR6 1,5V AA. Batteriene må byttes ut med riktig type. Fjern batteriene hvis produktet ikke skal brukes i en lengre periode.

Norsk Little Baby QCPR

EU

Dette produktet er i samsvar med FOR-2016-04-377 Forskrift om EØS-krav til radioutstyr, og FOR-2004-06-922, 2a Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).

Avfallshåndtering

QCPR-sensoren inneholder elektriske deler. Leveres på egnet resirkuleringsanlegg i henhold til lokale forskrifter.

EU-direktiv 2012/19/EU (WEEE)WEEE: Dette apparatet er merket i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Ved å sørge for at produktet avhendes riktig, bidrar du til å forebygge mulige negative konsekvenser for miljøet og for menneskers helse, som kan forårsakes av feil avfallshåndtering av produktet.

Symbolet på produktet, eller dokumentene som følger med produktet, indikerer at denne enheten ikke skal behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det overlates til egnet innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Kassering må utføres i samsvar med lokale miljøforskrifter for avfallshåndtering. For mer detaljert informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, bes du kontakte ditt lokale kontor, din deponeringstjeneste for husholdningsavfall eller Laerdal-representanten der du kjøpte produktet.

Garanti

Se Laerdal Global Garanti for vilkår og betingelser. Gå til www.laerdal.com for mer informasjon

Symbolforklaring

	CE-merke
	UKCA-merke
	Radiokommunikasjons- og EMC-samsvarsmerke for Australia
	KC (koreansk sertifisering) sertifiseringsmerke
	MIC-sertifisering for Japan
	WEEE-merke
	Produsent
	Produksjonsdato
	Katalognummer
	Lot-nummer

Spesifikasjoner

Driftstemperatur	-5 °C til 35 °C Reduksjon i produktets ytelse kan oppleves når det brukes ved lave temperaturer (< 15 °C)
Oppbevaring Temperatur	-10 °C til 50 °C
Fuktighet	5 % - 95 % relativ luftfuktighet
Vekt	1,8 kg (± 0,2 kg)
Dimensjoner	65 x 26 x 14 cm

© 2022 Laerdal Medical AS. All rights reserved.



Manufactured in China for:
Laerdal Medical AS
P.O. Box 377
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
T: (+47) 51 51 17 00

Printed in China


20-15510 Rev D


www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives


Little Baby QCPR


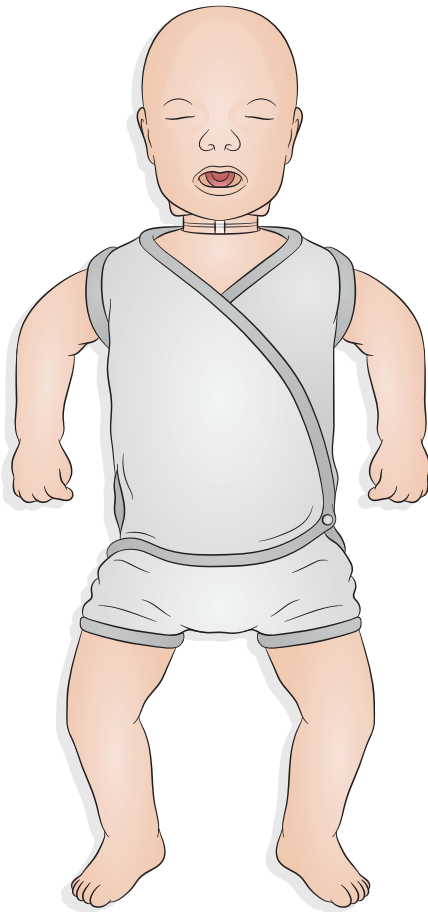




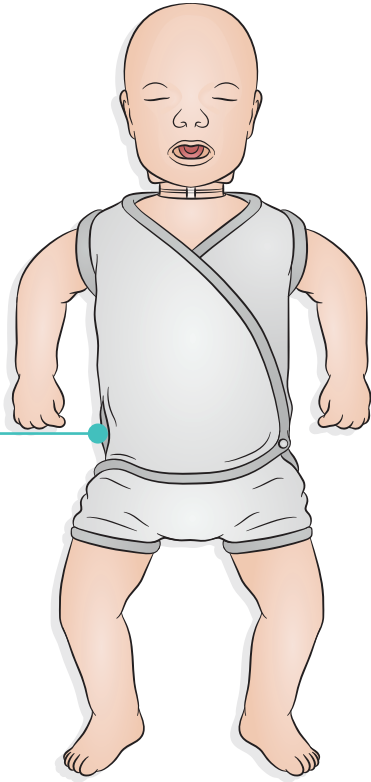




QCPR Instructor
QCPR Learner

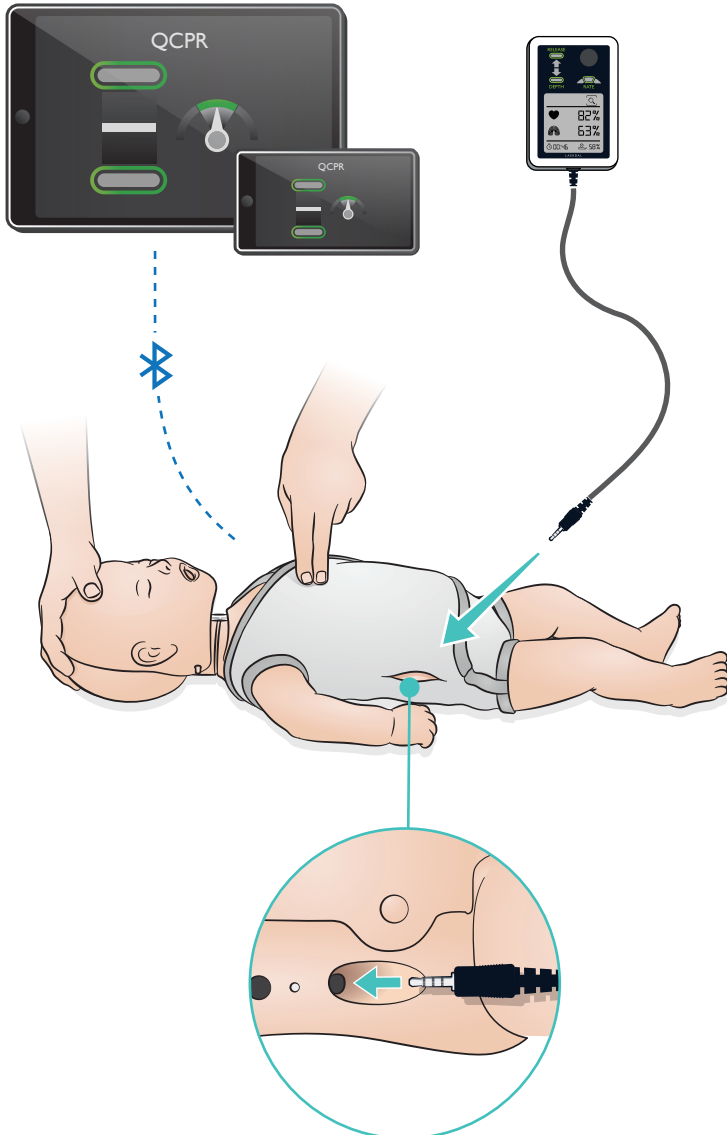


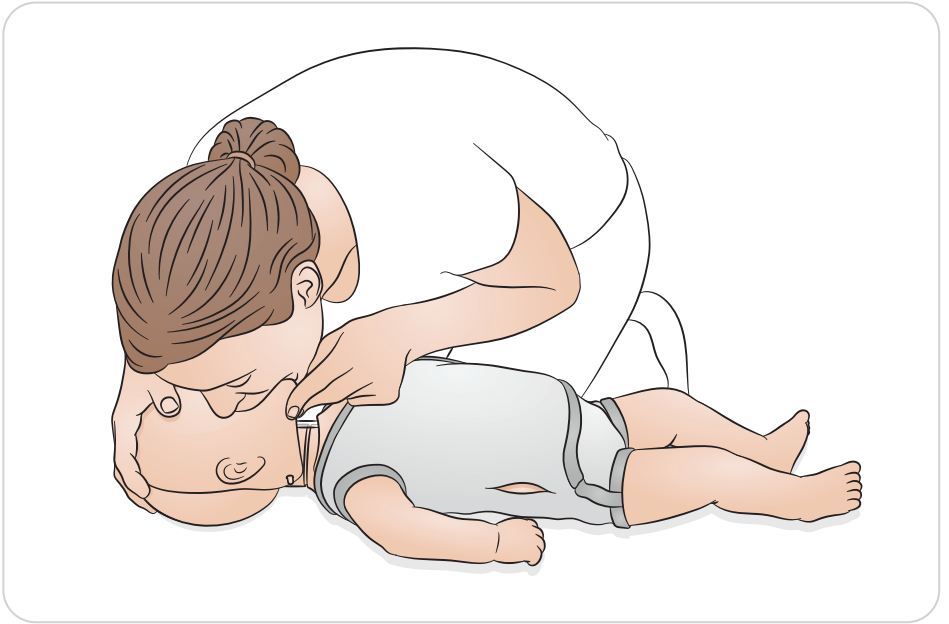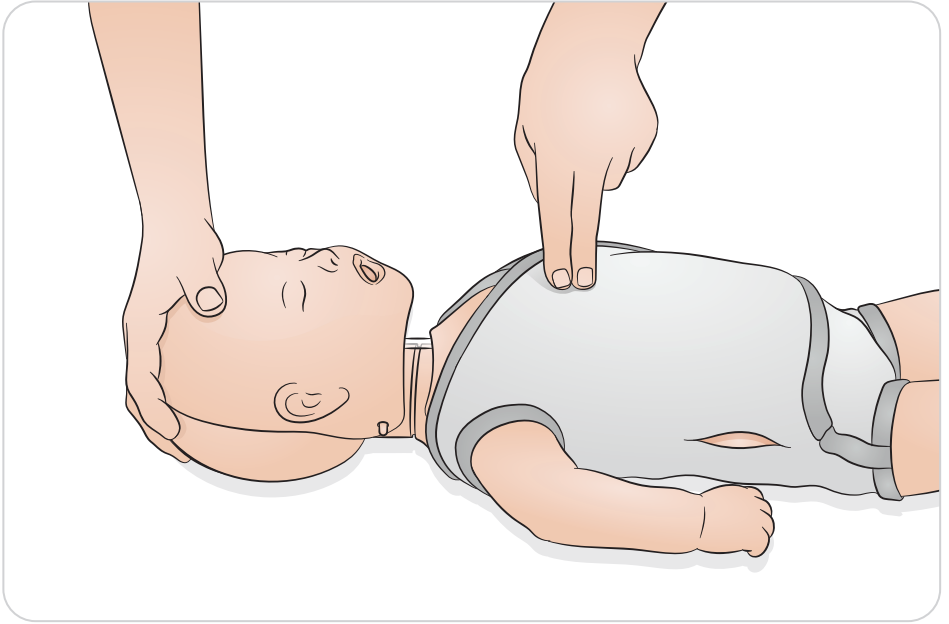

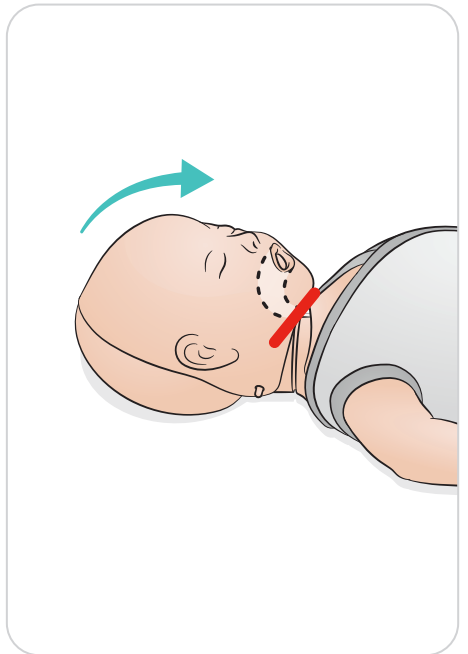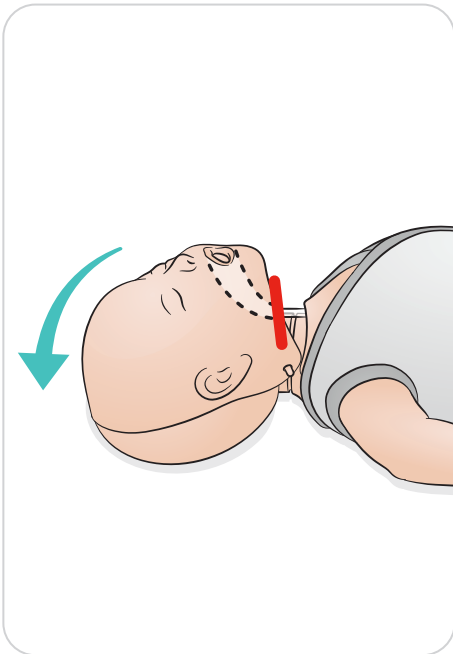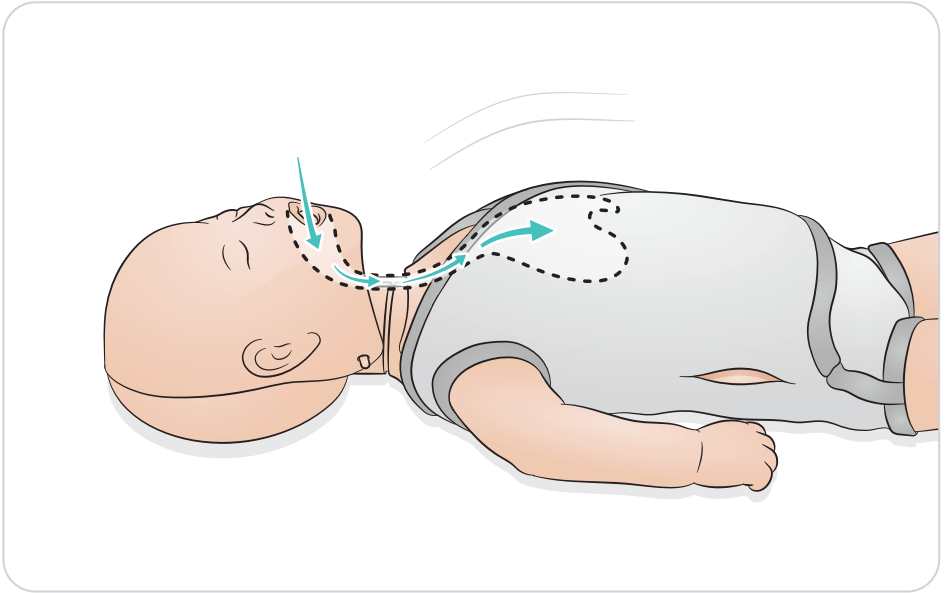





1

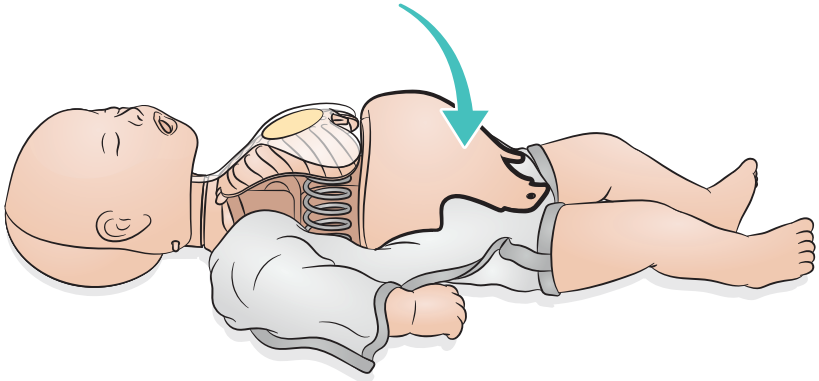

2

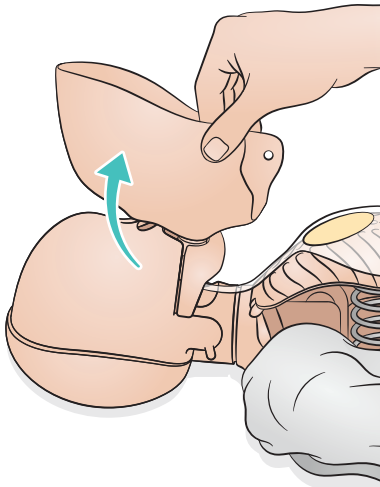


3

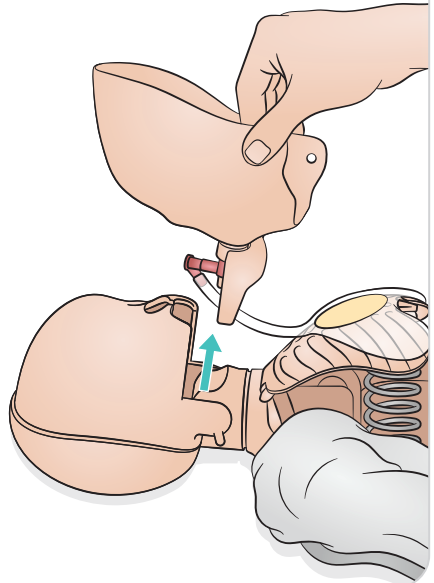





4

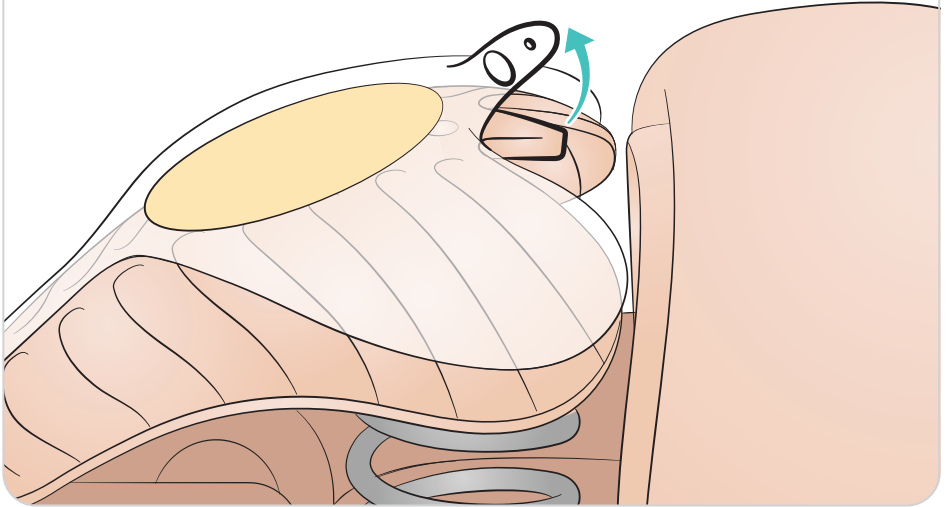

5

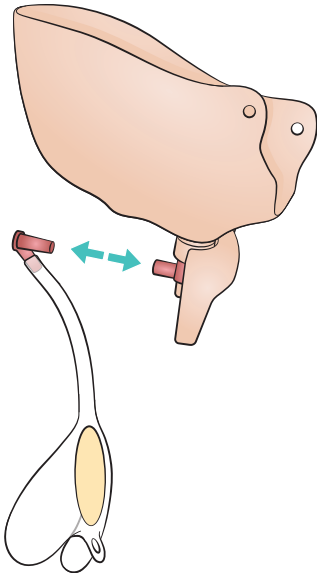


6

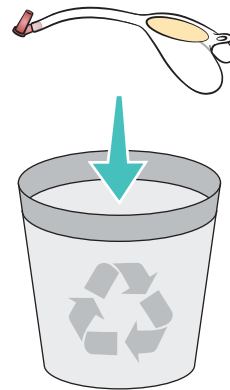





1

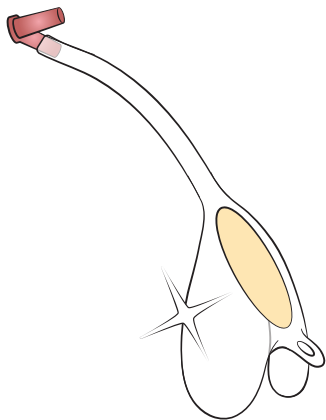


2

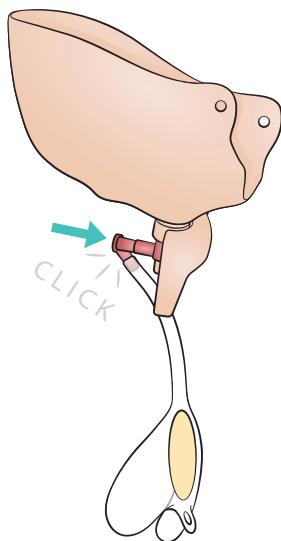

3

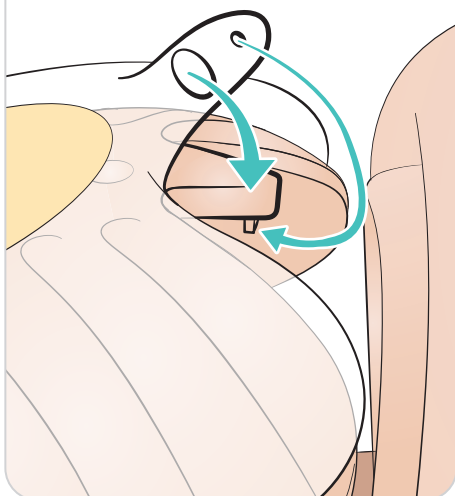


4

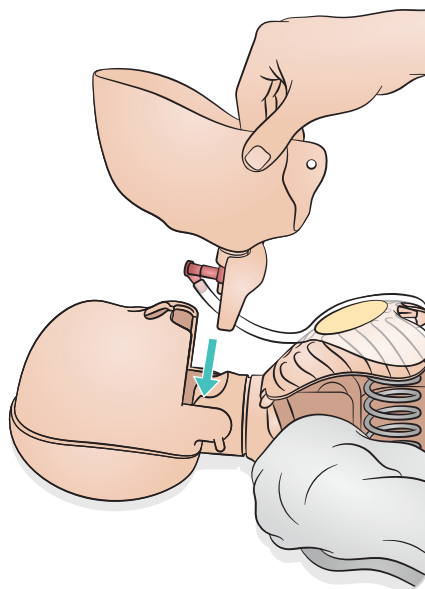





5

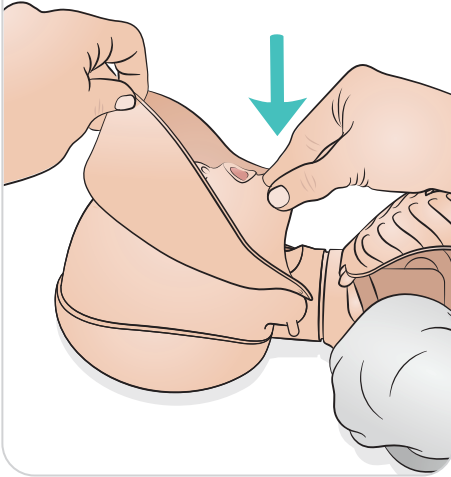


6

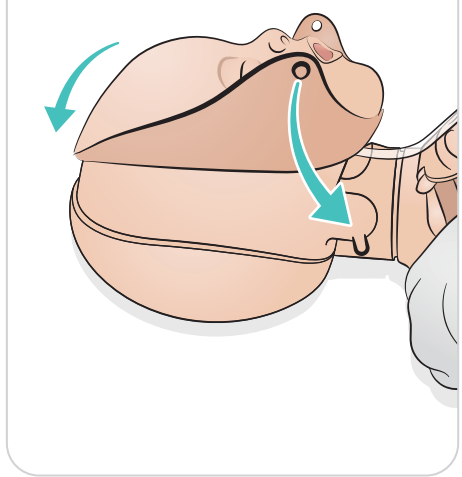


7

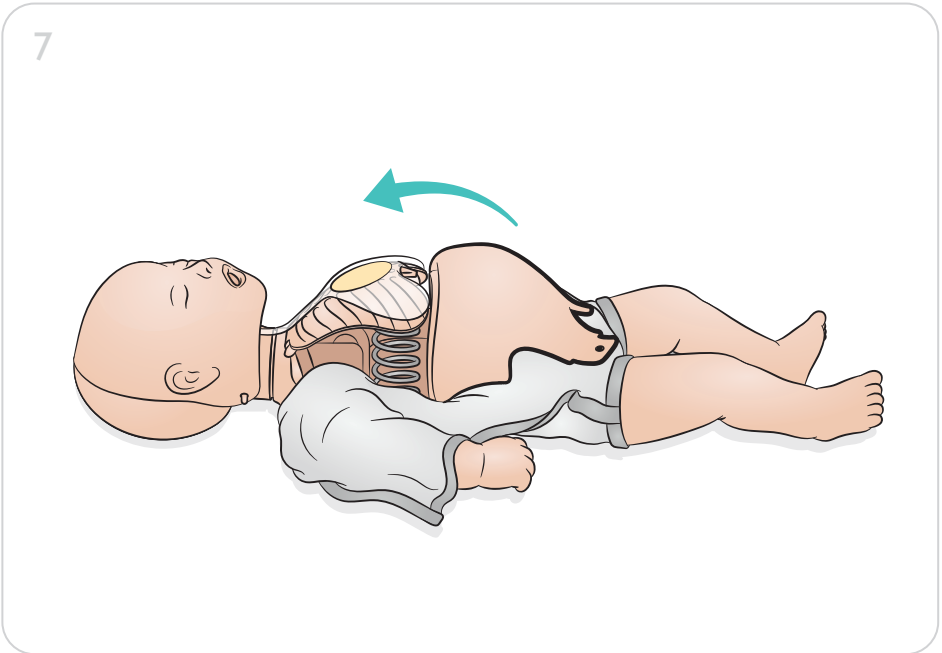


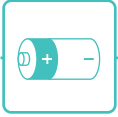


1

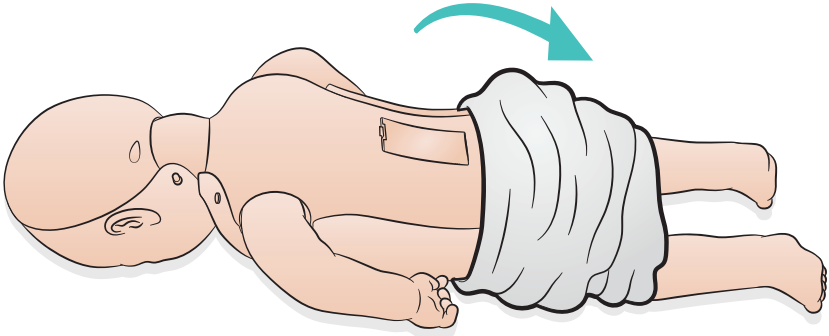

2

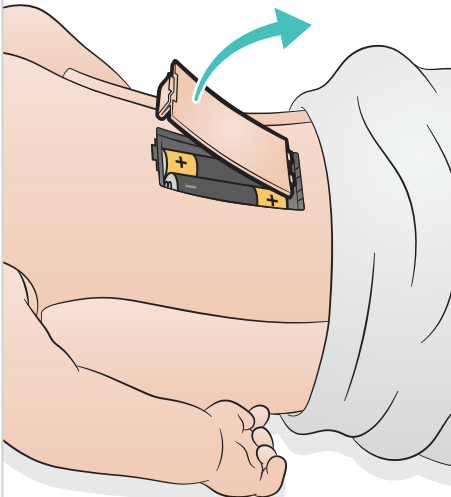

3

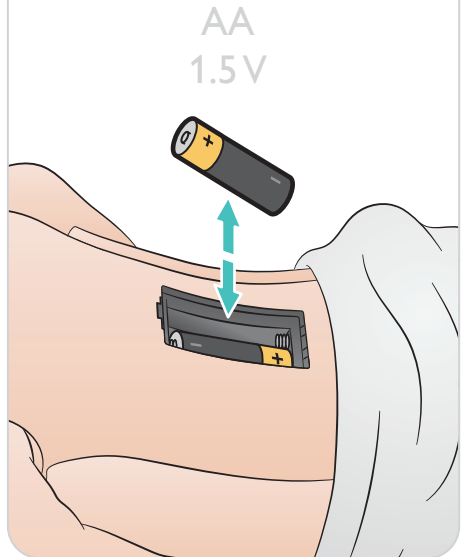



www.laerdal.com/support

© 2019 Laerdal Medical AS. All rights reserved.

Laerdal Medical AS
P.O. Box 377,
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
T: (+47) 51 51 17 00

Printed in China

20-15511 Rev A

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives