

## JEDNORAZOWY FARTUCH IZOLACYJNY

### POLSKI

**Nazwa produktu** Jednorazowy fartuch izolacyjny

**Kod produktu** FGIS-PP25-M, FGIS-PP25-L

**Rozmiar produktu** Jednostka: cm

KOD GIMA	21131	21132
KOD FULL GUARD	FGIS-PP25-M	FGIS-PP25-L
Rozmiary	115x137 (M)	120x150 (L)
Długość (od ramienia do dolnej krawędzi)	115	120
Szerokość (jednowarstwowy)	137	150
Długość paska	180	180
Długość rękawa	58	59
Odchylenie od rozmiaru	±2	±2

**Model produktu** Rodzaj fartucha. M/L

**Struktura i skład** Produkt wykorzystuje włókninę PP 25g. Składa się z części przedniej, tylnej, rękawów, paska i mankietów. Proces technologiczny polega na cięciu, zgrzewaniu ultradźwiękowym, wiązaniach, rzepach, mankietach, składaniu, uszczelnianiu.

**Przeznaczenie** Produkty są używane głównie do ogólnej izolacji w przychodniach, oddziałach, salach kontrolnych, pomieszczeniach sprzątania, laboratoriach itp. Są przeznaczone do użytku przez pracowników służby zdrowia w szpitalach i klinikach w celu utrzymania dobrego poziomu higieny i przyzyczenia się do kontrolowania infekcji.

**Przeciwwskazania** Produkty są przeznaczone do jednorazowego użytku i należy je zastosować natychmiast po otwarciu opakowania. Jeśli opakowanie jest uszkodzone, produkt jest mokry lub spleśniały. Nie używać.

**Jak korzystać z produktu** Otwórz opakowanie i wyjmij produkt, delikatnie potrząśnij fartuchem, podnieś boki kołnierza, włóż ręce do rękawów, wyciągnij ramiona do przodu i zawiąż paski.

**Przechowywanie** Przechowywać w pomieszczeniu czystym, bez gazów korozyjnych, suchym i wentylowanym, o wilgotności względnej nie wyższej niż 80%.

### Ostrzeżenie

- Ten produkt jest produktem do utylizacji, nie używaj ponownie.
- Ten produkt jest jednorazowego użytku, nigdy nie udostępniaj go innym.
- Zabrania się używania, gdy opakowanie lub produkty są uszkodzone.

**Uwaga: W przypadku wystąpienia poważnych wypadków w czasie stosowania produktu, należy się skontaktować z producentem i z właściwym organem państwa członkowskiego, w którym produkt został wprowadzony do obrotu.**

**Ważność** 3 lata.

**Data produkcji** Patrz data na opakowaniu

**Termin ważności** Patrz data na opakowaniu

### WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.

	Numer katalogowy		Przechowywać z dala od światła słonecznego		Przechowywać w suchym miejscu
	Kod partii		Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzenie (UE) 2017/745		Ostrzeżenie – Zobacz instrukcję obsługi
	Producent		Data produkcji		Wyrób medyczny
	Nie sterylne		Data ważności		Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Granica wilgotności		Przeczytaj instrukcje użytkowania		Jedno urządzenie, nie używaj ponownie
	Granica temperatury		Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej		Delikatny, obchodź się ostrożnie
	Tą stroną do góry		Obchodź się ostrożnie		



**FGIS-PP25-M (GIMA 21131)**  
**FGIS-PP25-L (GIMA 21132)**



Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd  
Yongan East Avenue,  
Xianning Economic Development  
Zone, Xianning City, Hubei Province, China  
Made in China



Humiss Beratung  
GmbHGneisenaustraße  
8.40477, Düsseldorf, Deutschland

Importowane przez / Importat de:

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

