

SCHERMO FACCIALE ANTI-NEBBIA MONOUSO - ANTI-FOG DISPOSABLE FACE SHIELD - ÉCRAN FACIAL ANTI-BUÉE JETABLE - PANTALLA FACIAL DESECHABLE ANTINEBLA - PROTETOR FACIAL DESCARTÁVEL ANTI-FOG - ANTI-BESCHLAG-EINWEG-GESICHTSSCHILD - ANTIOMIXΛΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - JEDNORAZOWA OSŁONA TWARZY ANTYFOGOWA - ECRAN FACIAL DE UNICĂ FOLOSINȚĂ ANTI-ABURIRE - JEDNORÁZOVÝ OBLIČEJOVÝ ŠTÍT PROTI ZAMLŽOVÁNÍ - ANSIKTSVISIR MED ANTI-IMBILDNINGSFUNKTION FR ENGÅNGSBRUK - KERTAKÄYTTÖINEN HUURTEENESTOKA-SVOSUOJA - JEDNORAZOVÝ TVÁROVÝ ŠTÍT ODOLNÝ VOČI ZAHMLIEVANIU - ANTICONDENS GELAATSSCHERM VOOR EENMALIG GEBRUIK - JEDNOKRATNI VIZIR PROTIV MAGLJENJA - PÁRAMENTES EGYSZER HASZNÁLATOS ARCVÉDŐ - PÁRAMENTES EGYSZER HASZNÁLATOS ARCVÉDŐ - DUGFRI ANSIGTSSKÆRM TIL ENGANGSBRUG - ЛИЦЕВ ЩИТ ПРОТИВ ЗАМЪГЛЯВАНЕ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА - NERASOJANTIS VIENKARTINIS APSAUGINIS VEIDO SKYDELIS - VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS PRETAIZSVĪŠANAS SEJAS AIZSARGS - UDUVASTANE ŪHEKORDNE NĀOKAITSE - TÅKEHEMMENDE ANSIKTSKJERM TIL ENGANGSBRUK - درم لامعتس الال بابضلل داضم هجو درد

POLSKI Opis: Przyłbica przeciwmgielna wykonana jest z folii PET oraz folii ochronnej, wyściółki piankowej oraz taśmy elastycznej.

Wskazania użytkowania: Przyłbica przeciwmgielna służy do ochrony całej twarzy przed potencjalnym zanieczyszczeniem patogenami krwi, płynami ustrojowymi lub szkodliwymi chemikaliami podczas kontroli lub leczenia.

Przeciwwskazania: Brak.

Skutki uboczne: Produkt nie powoduje skutków ubocznych.

Ostrzeżenie:

1. Narażenie na bardzo wilgotne środowisko może spowodować utratę skuteczności działania przeciwmgielnego.
2. Zaprzestać użytkowania w przypadku uszkodzenia lub poluzowania podczas użytkowania.
3. Podczas użytkowania, starać się nie dotykać środka soczewek.
4. Materiały, które mogą mieć kontakt ze skórą użytkownika mogą powodować reakcje alergiczne u osób wrażliwych.

Działanie:

Krok 1: Usunąć wewnętrzną folię ochronną.

Krok 2: Pociągnąć taśmę i założyć na głowę.

Przechowywanie:

Przechowywać produkt w suchym miejscu w temperaturze 0- 30°C.

Unikać promieni słonecznych.

WARUNKI GWARANCJI GIMA Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima

