
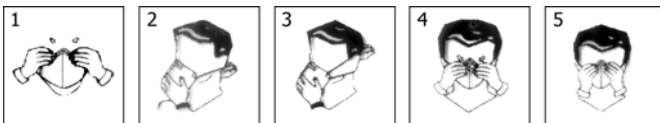


I Semi-maschere filtranti monouso
GB Single-use filtering half-masks
D Partikelfiltrierenden Einweg-Halbmasken
F Demi-masques filtrants jetables
E Semimáscaras filtrantes desechables
P Semi-máscaras filtrantes de utilização única
TR Tek kullanımlık filtreli yarım yüz maskeleri
NL Halvegeleatsmasker met filter voor eenmalig gebruik
S Filterande halvmasker för engångsbruk
FIN Suodattavat kertakäyttöiset puolinaamarit
CZ Filtrační polomaska na jedno použití
PL Maski ochronne jednorazowego użytku
GR Ημιμάσκες διήθησης μιας χρήσης
HR Polu-maske s filtrom za jednokratno upotrebu

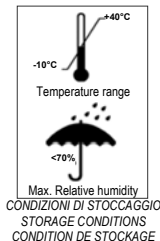

POLSKI

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

UWAGA: Opisane tutaj półmaski filtrujące jednorazowego użytku dzielą się na trzy klasy – FFP1, FFP2 i FFP3. Przed użyciem należy sprawdzić, do której z tych klas należy dana półmaska, zgodnie z normą EN149:2001+A1:2009, i czy w związku z tym można ją wykorzystać w planowanym celu. Oznaczenie klasy, do której należy dany produkt, znajduje się na opakowaniu oraz na półmasce. Na opakowaniu podano również termin przydatności produktu do użycia.

ZASTOSOWANIA: ochrona przed cząstkami stałymi oraz przed aerozolami stałymi i ciekłymi (np. mgłą olejową).

FFP3 FFP2 FFP1

Przed użyciem należy sprawdzić, czy maska jest kompletna. W przypadku zauważenia plam lub uszkodzeń należy poprosić o wymianę produktu. Symbol NR widoczny na oznakowaniu informuje, że półmaska nie nadaje się do powtórnego użytku i należy ją wyrzucić po zakończeniu zmiany lub sesji roboczej.

Symbol D oznacza, że maska pomyślnie przeszła test zapychania wykonany z użyciem cząstek dolomitu.

Ochrona zapewniana przez półmaski filtrujące klasy FFP2 i FFP3 obejmuje właściwości zapewniane przez półmaski klasy FFP1.

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA:

- Włożyć palec do środka półmaski. Nagiać klips nosowy wokół palca, aby dopasować go do kształtu nosa.
- Trzymając półmaskę w ręku, przełożyć dolną taśmę elastyczną przez głowę i umieścić ją na karku, a następnie użyć taśmę pod uszami.
- Następnie przełożyć przez głowę górną taśmę elastyczną, ostrożnie układając ją nad uszami.
- Za pomocą obu dłoni ukształtować klips nosowy (jeśli maska już została nałożona) na swoim nosie. Następnie dostosować napięcie górnej i dolnej elastycznej taśmy za pomocą odpowiedniej sprzączki lub poprzez samo ułożenie paska w wygodnej pozycji, aby zapewnić dobre przyleganie do twarzy.
- (a) Aby sprawdzić dopasowanie maski bez zaworu wydechowego: ułożyć obie ręce na masce, tak jak widać na rysunku 5, i wykonać mocny wydech. (b) Aby sprawdzić dopasowanie maski z zaworem wydechowym: ułożyć obie ręce na masce, tak jak widać na rysunku 5, i wykonać mocny wdech. Jeśli powietrze napływa do maski bokami lub tamtędy się z niej wydostaje, należy poprawić ułożenie maski na twarzy i, kiedy jest ono prawidłowe, zacieśnić pasek za pomocą sprzączek, jeśli maska jest w nie wyposażona.
- Maskę należy natychmiast wymienić, jeśli pojawiają się problemy z oddychaniem, maska zostanie uszkodzona lub nie będzie odpowiednio przylegać do twarzy. Dokładne przestrzeganie tych instrukcji jest warunkiem koniecznym do bezpiecznego stosowania produktu.

OSTRZEŻENIE: [ŚOI – środki ochrony indywidualnej]

Jeśli nie można zapewnić właściwego przylegania maski do twarzy, nie wolno wchodzić do potencjalnie niebezpiecznych miejsc. / Nieprzestrzeganie instrukcji podanych w niniejszej ulotce może skutkować nieprawidłowym wykorzystaniem tego ŚOI, co może prowadzić do utraty zdrowia lub śmierci. / Do zapewnienia odpowiedniej ochrony konieczna jest dobrze dobrana maska. Przed użyciem tego środka ochrony osobistej należy skonsultować się ze specjalistą ds. BHP lub ds. higieny pracy w zakładach przemysłowych, aby ustalić, czy środek ten może zostać zastosowany w danej sytuacji. / Ten produkt nie dostarcza tlenu. Należy go stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach zawierających ilość tlenu wystarczającą do utrzymania czynności życiowych. Dopuszczalne progi zawartości tlenu w powietrzu umożliwiające zastosowanie maski w wybranym celu mogą się różnić w zależności od kraju. Zalecamy sprawdzenie jako wartości odniesienia progów ustalonych dla danego kraju. Niezależnie od wytycznych krajowych, firma Eleco s.r.l. odradza korzystanie z tych środków ochrony osobistej w miejscach, gdzie stężenie tlenu w powietrzu nie przekracza 19,5%. / Nie stosować, kiedy stężenie tlenowych środków w powietrzu stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. / Nie stosować w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. / Należy natychmiast opuścić miejsce pracy i wyjść na świeże powietrze, jeśli (a) wystąpią kłopoty z oddychaniem lub (b) wystąpią zawroty głowy lub inne niepokojące objawy. / Broda i zarost na twarzy, a także pewne schorzenia układu oddechowego mogą zmniejszyć skuteczność działania półmasek filtrujących. / Nie wolno pod żadnym pozorem ani w żaden sposób modyfikować lub przerabiać półmasek filtrujących. / Produkt wyłącznie do użytku jednorazowego. Nie są wymagane żadne czynności konserwacyjne. Po użyciu produkt należy wyrzucić. / Półmaski, które nie zostały wykorzystane, należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w zacienionym miejscu. – Kod identyfikacyjny modelu znajduje się na opakowaniu.