



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

POLSKI

KRUSZARKA DO TABLETEK

Rozdrabnia na proszek duże i małe tabletki.

- 1) Umieścić tabletkę w przezroczystym wgłębieniu.
- 2) Zakręcić do końca niebieską część.
- 3) Rozpuścić sproszkowany lek w mleku, soku...

UWAGA: nie kruszyć kapsułek o czasowym uwalnianiu, w razie wątpliwości skonsultować się z farmaceutą.

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.

**FRANTUMAPILLOLE
PILL PULVERIZER
BROYEUR DE PILULES
TRITURADOR DE PÍLDORAS
TABLETTENZERKLEINERER
ESMAGADOR DE PÍLULAS
KRUSZARKA DO TABLETEK
ΚΑΤΑΟΤΡΟΦΕΑΣ ΧΑΠΙΩΝ**

GIMA 25731

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante
Fabricante/Hersteller/ProducentΚατασκευαστής
Ningbo Pinbo Plastic Manufactory Co., LTD
6F, No.17 Building, 636 Duantang East Rd, Ningbo, 315012 China
Made in China

REF **PT97644**

M/25731-M-Rev.4-11.24

Importato da / Imported by / Importé par
Importado por / Importado por / Importiert von
Importowane przez / Εισαγωγή από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



