



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com
export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

REF

27735 - 27737

27740 - 27741



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy
Made in Italy



IT - Manuale d'uso

GB - User instructions

SI - Navodila za uporabo

ES - Instrucciones de usuario

PT - Instruções de montagem

GR - Αλμπζσηηθό ηηπαιέηαο

DK - Brugervejledning

PL - Instrukcja Użytkowania

FR - Instructions de

fonctionnement

NL - Gebruikershandleiding

DE - Gebrauchsanweisungen

PL - Instrukcja Montażu

Przymocuj do nakładki dwa uchwyty w kształcie L: połóż nakładkę do góry nogami na płaskiej powierzchni i wsuń uchwyty w przygotowane szczeliny. Docisnij uchwyty i przekreśl motylek zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara tak, aby wszedł w nagwintowany otwór.

Ustaw uchwyty szerzej niż wynosi szerokość brzegów muszli klozetowej.

Podnieś deskę klozetową i umieść nakładkę bezpośrednio na muszli klozetowej, taka by uchwyty mocujące znalazły się w tylnej części muszli, a wypustka stabilizująca opierała się o wewnętrzną część przodu muszli. Dokręcaj motylki na uchwytych zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, aż poczujesz opór, a nakładka nie przesuwają się na muszli klozetowej.

Upewnij się przed użyciem, że nakładka jest dobrze przymocowana do toalety.

Uwaga! Uchwyty boczne zostały zaprojektowane w celu łatwego montażu, jednak nie należy nimi obracać kiedy poczuje się opór (opór wskazuje, że uchwyt jest już zaczepiony).

Uwaga! Wypustka stabilizująca nie służy do siadania.

Instrukcja Pielęgnacji

Wszystkie części mogą być czyszczone przy użyciu ciepłej wody i neutralnych środków czyszczących. Można również zanurzyć nakładkę w wodzie lub wysterylizować przez 1 minutę w temp. 85 stopni Celsjusza.


Uwagi

Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia: 225 kg

Upewnij się przed użyciem, że nakładka jest dobrze przymocowana do toalety.

Nie używaj nakładki jako dodatkowego uchwytu gdy wstajesz lub siadasz.

Dettagli tecnici - Technical Details - Tehnicne lastnosti
Datos técnicos - Especificações técnicas - Τεχνικά χαρακτηριστικά
Tekniske detaljer - Dane Techniczne - Détails techniques
Technische info - Technische Daten

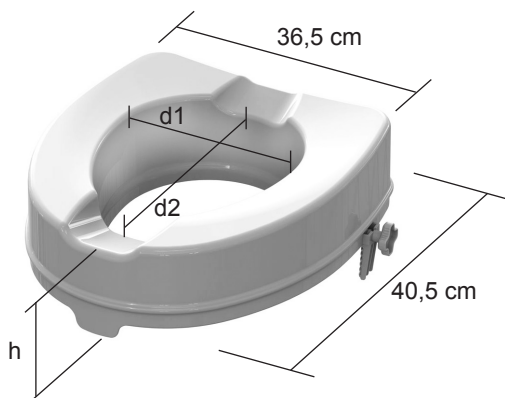

h	10 cm	14 cm
d1	20,5 cm	20,5 cm
d2	25,5 cm	25,5 cm