



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDALETTO ELETTRICO
HEATING UNDERBLANKET
CHAUFFE-LIT
AQUECEDOR DE COLCHÃO
VÄRMEUNDERFILT
VUOTEENLÄMMITIN
WÄRMEUNTERBERR
SALTEA ELECTRICĂ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA
PODGRZEWANY PODKŁAD
ELEKTRISCHE ONDERDEKEN

REF SS02(160*120) (GIMA 28664)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M28664-Rev.0-05.23



Instrukcja obsługi

Podgrzewany koc elektryczny (Koc wierzchni)

SS02(160*120)

WAŻNE INFORMACJE! ZACHOWAJ DO WGLĄDU!

Przed użyciem urządzenia uważnie przeczytaj instrukcję obsługi, w szczególności wskazania bezpieczeństwa, i zachowaj ją do wglądu.

W przypadku przekazania urządzenia innej osobie, należy wraz z nim przekazać użytkownikowi niniejszą instrukcję.



Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.



Nie przebijać poduszki grzewczej!



Nie używać, jeżeli jest złożony lub pomarszczony



Nie suszyć w suszarce



Nie prać chemicznie!



Non stirare



Non candeggiare



Tylko ręczne pranie



Urządzenie klasy II



Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy Europejski



Patrz podręcznik użytkownika



Numer katalogowy



Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi



Kod partii



Oddzielna zbiórka dla tego urządzenia

OPIS



1. Przycisk OFF
2. Pozycja 1 - 1-szy poziom temperatury
3. Pozycja 2 - 2-gi poziom temperatury
4. Pozycja 3 - 3-ci poziom temperatury
5. Ekran wyświetlający

WAŻNE WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

- Podgrzewany koc elektryczny nie może być używany przez osoby nie odczuwające ciepła lub bardzo wrażliwe na ciepło, gdyż nie mogą one poprawnie zareagować na ewentualne przegrzanie.
- Podgrzewany koc elektryczny nie może być używany przez bardzo małe dzieci (0-3 lata) gdyż nie mogą one poprawnie zareagować na ewentualne przegrzanie.
- Podgrzewany koc elektryczny nie może być używany przez małe dzieci (od 3 do 8 roku życia), chyba że przełącznik został ustawiony przez rodzica lub przez osobę, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo, i dziecko otrzymało szczegółowe instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z koca elektrycznego.
- Podgrzewany koc elektryczny może być używany przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są pod nadzorem lub zapoznani się z instrukcją użytkowania i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się kocem podgrzewanym elektrycznie.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Podgrzewany koc elektryczny nie jest przeznaczony do użytku w warunkach szpitalnych.
- Nie wbijać igieł.
- Nie używać podgrzewanego koca elektrycznego, kiedy jest złożony lub pomarszczony.
- Nie używać podgrzewanego koca elektrycznego, jeżeli jest mokry.
- Podgrzewany koc elektryczny można używać wyłącznie po podłączeniu do przełącznika wskazanego na etykiecie.
- Pola elektryczne i magnetyczne wytwarzane przez podgrzewany koc elektryczny mogą zakłócać funkcjonowanie rozruszników serca. Jednakże, ich wartość jest niższa niż przewidziane progi: moc pól elektrycznych: maks. 5 000 V/m, moc pól magnetycznych: maks. 80 A/m, indukcja magnetyczna: maks. 0,1 mT., dlatego należy skonsultować się z lekarzem i producentem rozrusznika serca przed użyciem podgrzewanego koca elektrycznego.
- Elementy elektroniczne w przełączniku nagrzewają się podczas używania podgrzewanego koca.
- Dlatego nie należy zakrywać przełącznika ani umieszczać go na podgrzewanym kocu, gdy jest włączony.
- Nie ciągnąć, nie skręcać ani nie zginać kabli zbyt mocno.
- Podgrzewany elektrycznie koc musi być regularnie sprawdzany pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. W przypadkach niewłaściwego użytkowania lub jeśli nagrzewa się bardziej, musi zostać sprawdzony przez producenta przed ponownym użyciem.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis, lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- jeśli chcesz przechować lub złożyć podgrzewany koc:

- Pozwól mu ostygnąć przed złożeniem
- Podczas przechowywania nie umieszczaj przedmiotów na kocu, aby uniknąć pomarszczenia.

- Nie używaj na regulowanym łóżku lub sprawdź, czy podgrzewany koc lub jego kabel nie został przytrzaśnięty lub przygnieciony.
- W przypadku korzystania z podgrzewanego elektrycznie koca przez kilka godzin, zaleca się ustawienie przełącznika na najniższy poziom temperatury, aby uniknąć przegrzania.

FUNKCJONOWANIE

• Podłącz wtyczkę do gniazdka w dolnej części podgrzewanego koca, a drugi koniec do źródła zasilania (AC220-240V). Upewnij się, że w pobliżu znajduje się gniazdko elektryczne i że kabel zasilający nie znajduje się w miejscu, w którym użytkownik może się o niego potknąć.

- Aby wstępnie podgrzać koc, wybierz trzecie ustawienie na 15 minut.

Temperatura będzie stopniowo wzrastać.

- Po wstępnym podgrzaniu przekreśl przycisk sterowania na żądaną moc grzania.
- Aby wyłączyć urządzenie, przekreśl przycisk do pozycji „Off”.

Uwaga: Podgrzewany koc ma zabezpieczenie przed przegrzaniem i jest ustawiony na działanie nieprzerwane przez 90 minut. Jeśli chcesz przedłużyć ten czas, zaleca się pozostawienie podgrzanego koca przez 5 minut do ostygnięcia przed ponownym użyciem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Jeśli nie używasz podgrzewanego elektrycznie koca i przed jego czyszczeniem, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Upewnij się, że przycisk sterowania znajduje się w pozycji „OFF”.

- Odłączyć zasilanie.
- Odłączyć wtyczkę łączącą sterowanie z urządzeniem.
- Przed czyszczeniem poczekać aż podgrzany koc ostygnie.

Czyszczenie

Małe plamy można czyścić ściereczką lub wilgotną gąbką i w razie potrzeby odrobiną płynnego detergentu do delikatnych tkanin.

Uwaga: koca podgrzewanego elektrycznie nie należy czyścić chemicznie, zginać, suszyć w suszarce lub prasować.

Jeśli podgrzewany koc jest bardzo brudny, można go prać tylko ręcznie w temperaturze 30°C (maksymalnie). Ze względu na siłę generowaną przez wysoką prędkość pranie w pralce, pranie chemiczne lub suszenie w suszarce może uszkodzić wewnętrzny przewód grzewczy.

Używać detergentu do delikatnych tkanin i odmierzyć go zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie prać podgrzanego koca zbyt często, aby uniknąć nadmiernego zużycia.

Podczas suszenia rozgrzanego koca nie wieszaj go za pomocą klamek do bielizny lub innych tego typu przedmiotów.

Nie wystawiać rozgrzanego koca na działanie źródeł ciepła, takich jak promienie słoneczne, kaloryfer itp.

Podłączyć ponownie kabel zasilający do podgrzewanego koca, gdy wtyczka i tkanina będą całkowicie suche.

Nigdy nie włączaj podgrzewanego koca elektrycznego, aby go wysuszyć.

PRZECHOWYWANIE

Jeśli nie używasz podgrzewanego koca przez dłuższy czas, warto umieścić go w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu i nie kłaść na nim żadnych przedmiotów

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima



Utylizacja: Produktu nie należy utylizować łącznie z odpadami komunalnymi. Użytkownicy są zobowiązani do przekazania urządzenia do odpowiedniego centrum recyklingowego wyspecjalizowanego w utylizacji sprzętów elektrycznych i elektronicznych