



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TERMOFORO SENZA COPERTURA
HEATING PAD WITHOUT COVER
COUSSIN CHAUFFANT SANS COUVERTURE
TERMÓFORO SIN FUNDA
HEIZKISSEN OHNE HÜLLE - GRAU
ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑ
PODUSZKA ELEKTRYCZNA BEZ POSZEWKI
VYHŘÍVACÍ DEČKA BEZ KRYTU
SĀCULEŅĪ ĪNCĀLZITOR FĀRĀ HUSĀ
VÄRMEDYNA UTAN FODRAL
WARMTEMAT ZONDER AFDEKKINGL
ÄMPÖTYYNŲY ILMAN SUOJAA

REF SS02 (30*40) (GIMA 28670)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



POLSKIE

Instrukcja obsługi SS02(30*40)

WAŻNE INFORMACJE! ZACHOWAJ DO WGLĄDU!

Przed użyciem urządzenia uważnie przeczytaj instrukcję obsługi, w szczególności wskazania bezpieczeństwa, i zachowaj ją do wglądu.

W przypadku przekazania urządzenia innej osobie, należy wraz z nim przekazać użytkownikowi niniejszą instrukcję.

Niniejsza instrukcja obsługi musi zawsze towarzyszyć urządzeniu. Zawiera ona ważne informacje dotyczące jego uruchamiania i działania.

Przeczytać całą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.



OSTRZEŻENIE
Przestrzegać ostrzeżeń, aby uniknąć poważnych obrażeń ciała.



UWAGA
Przestrzegać uwag, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.



INFORMACJA
Informacje zawierają dodatkowe wskazania dotyczące instalacji lub działania.



Urządzenie klasy II



Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy Europejski



Patrz podręcznik użytkownika



Numer katalogowy



Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi



Kod partii



Oddzielna zbiórka dla tego urządzenia



Nie przebijać poduszki grzewczej!



Nie używać poduszki grzewczej, kiedy jest złożona!



Nie może być używany przez bardzo małe dzieci (0-3 lata)!



Poduszki grzewczej używać wyłącznie w pomieszczeniach!



Poduszka elektryczna może być prana ręcznie! Pokrowiec poduszki może być prany w pralce w temperaturze maks. 30 °C!



Nie chlorować!



Nie suszyć poduszki grzewczej w suszarce bębnowej!
Pokrowca nie suszyć w suszarce!



Nie prasować poduszki grzewczej! Pokrowiec prasować na niskiej temperaturze!



Nie prać chemicznie!

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem dokładnie sprawdzić poduszkę elektryczną pod kątem zużycia lub uszkodzenia.
- Nie używać w przypadku zużycia, uszkodzenia lub śladów niewłaściwego używania urządzenia, przełącznika lub kabli, lub jeżeli urządzenie nie działa poprawnie.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnić się, że napięcie zasilania wskazane na tabliczce znamionowej jest kompatybilne z napięciem sieci elektrycznej.
- Nie zaginać i nie marszczyć poduszki grzewczej podczas używania.
- Nie przebijać, nie przypinać agrafek lub szpilek lub jakichkolwiek innych ostrych przedmiotów do poduszki.
- Nie używać urządzenia u dzieci lub u osób niepełnosprawnych, nie odczuwających ciepła lub śpiących (gdyż nie mogą one zareagować na przegrzanie).
- Dzieci poniżej 3 roku życia nie mogą używać tego urządzenia ze względu na brak zdolności reakcji na przegrzanie.
- Urządzenie nie może być używane przez małe dzieci powyżej 3 roku życia, chyba że są nadzorowane przez rodziców lub przez osobę, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo, lub otrzymały szczegółowe instrukcje dotyczące właściwego korzystania z urządzenia.
- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są pod nadzorem lub zapoznani się z instrukcją użytkownika i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nigdy nie używaj poduszki bez nadzoru.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego, nie używać w szpitalach.
- Nie zasypiać przy włączonej poduszce elektrycznej.
- Wydłużone używanie poduszki na wysokim poziomie ciepła może spowodować poparzenia skóry.
- Nie zakrywać poduszki jakimikolwiek innymi poduszkami. Przełącznik sterujący nie może być zakryty lub ułożony na lub pod poduszką w czasie funkcjonowania.
- Nie siadać na poduszce grzewczej. Poduszka musi być położona na lub zbliżona do części ciała, na której chce się ją zastosować. Zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, poduszkę można używać na plecach i na szyi.
- Nigdy nie dotykać poduszki elektrycznej, jeżeli wpadła do wody. Natychmiast odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Trzymać kabel zasilający z dala od nagranych powierzchni.
- Nigdy nie przenosić, pociągać lub obracać poduszki elektrycznej trzymając za kabel zasilający i uważać, aby kabel się nie plątał.
- Nigdy nie używać poduszki elektrycznej, kiedy jest mokra, i stosować wyłącznie w suchym otoczeniu (nie stosować w łazience lub w podobnych pomieszczeniach).
- Unikać narażania sterowników i kabla na kontakt z wilgocią.
- W razie usterki nie próbować samodzielnego naprawienia urządzenia. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważnionego dystrybutora lub przez inny odpowiednio wykwalifikowany personel.

- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego może być on wymieniony wyłącznie przez producenta, upoważnionego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy go wymienić na inny tego samego typu.
- Poduszki grzewczej można używać wyłącznie za pomocą dostarczonej jednostki sterującej (SS02).
- Przed złożeniem i przechowaniem pozwolić na całkowite ostygnięcie poduszki grzewczej.
- W przypadku jakichkolwiek obaw o stan zdrowia, przed użyciem poduszki grzewczej, zwróć się do lekarza.
- Nie zbliżać poduszki grzewczej do części ciała, na których wystąpił obrzęk, uraz lub zapalenie.
- Jeżeli odczuwasz uporczywe bóle mięśni i stawów, zwróć się po pomoc lekarską. Uporczywe bóle mięśni i stawów mogą być objawem poważnej choroby.
- Jeżeli podczas stosowania odczujesz ból lub dyskomfort, natychmiast zaprzestań używania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Poduszka grzewcza

- Przed oczyszczeniem poduszki, wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i pozwolić na jej całkowite ostygnięcie lub, w każdym wypadku, poczekać co najmniej dziesięć minut.
- Poduszka grzewcza jest wyposażona w odłączany kabel. Odłączyć wtyczkę i następnie usunąć kabel z poduszki grzewczej.
- Poduszka grzewcza może być delikatnie prana ręcznie. Włożyć poduszkę grzewczą do wanny napełnionej letnią wodą wymieszaną z delikatnym detergentem i delikatnie naciskać dłońmi.
- Poduszkę grzewczą kilkakrotnie opłukać, aby usunąć cały detergent.
- Ułożone na płaskiej powierzchni urządzenie przechowywać w miejscu czystym i suchym. Nie opierać się na nim i kłaść na nim żadnych przedmiotów.
- Urządzenia używać wyłącznie po całkowitym osuszeniu.

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima



Utylizacja: Produktu nie należy utylizować łącznie z odpadami komunalnymi. Użytkownicy są zobowiązani do przekazania urządzenia do odpowiedniego centrum recyklingowego wyspecjalizowanego w utylizacji sprzętów elektrycznych i elektronicznych.