

FOOTSWITCH

UDI 8 033638 321607

REF 00304.04

2024

1

1-2 cc
4 nc
3-5 switch



IP 67
WATER PROOF

MD
CE

cable 3 mt MADE IN ITALY

LED SpA
Via M.T. Cicerone 138
03100 Frosinone (LT) - ITALY



IT EN ES FR DE PT PL

IA00304-04b_ML1
ed. 2022-10 2022 (C) LED SpA

(PL) PRZEŁĄCZNIK NOŻNY WODOODPORNY (5 pin) physio3 mt

Produkt ten jest dostarczany do sterowania nożnego kompatybilnych jednostek elektronicznych.

Sprawdź stan produktu przed użyciem (rys. Wyrzuć uszkodzony produkt).

Ten produkt jest kompatybilny z różnymi wersjami urządzeń, z którymi należy zapoznać się z instrukcją urządzenia.

Połączenie musi być wykonane przez wykwalifikowany personel.

Podłączenie

- Włóż wtyczkę sterownika nożnego do właściwego gniazda w jednostce elektronicznej, zwracając uwagę na kierunek wkładania (Rys. A 1-2).
- Aby zablokować wtyczkę należy dokręcić nakrętkę (Rys. A 3).

Włączyć urządzenie i wykonać kilka prób naciskając na sterownik nożny (Rys. A 4).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A



(PL) NACIŚNIĘCIE = AKTYWACJA / ZWOLNIENIE = BRAK AKTYWACJI