

FOOTSWITCH

REF 00305.01

1-2 cut
2-3 coag
4/7 nc

IP 67
WATER PROOF



UDI



8 0 3 3 6 3 8 3 2 1 6 5 2



EXPLOSION
PROOF



cable 5 mt



MADE IN ITALY



50°C

0°C

20%

80%

LED SpA
Via M.T. Cicerone 138
03100 Frosinone (LT) - ITALY

IT EN ES FR DE PT PL

IA00305-01b_ML1
ed. 2022-1& 2022 (C) LED SpA

PL PODWÓJNY PRZEŁĄCZNIK NOŻNY WODOODPORNY (240-380)

Produkt ten jest dostarczany do sterowania nożnego kompatybilnych jednostek elektronicznych.

Sprawdź stan produktu przed użyciem (rys. Wyrzuć uszkodzony produkt).

Ten produkt jest kompatybilny z różnymi wersjami urządzeń, z którymi należy zapoznać się z instrukcją urządzenia.

Połączenie musi być wykonane przez wykwalifikowany personel.

Podłączenie

- Włóż wtyczkę sterownika nożnego do właściwego gniazda w jednostce elektronicznej, zwracając uwagę na kierunek wkładania (Rys. A 1-2).
- Aby zablokować wtyczkę należy dokręcić nakrętkę (Rys. A 3).

Włączyć urządzenie i wykonać kilka prób naciskając na sterownik nożny (Rys. A 4).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A



PL NACIŚNIĘCIE = AKTYWACJA / ZWOLNIENIE = BRAK AKTYWACJI
ŻÓŁTY = CIĘCIE / NIEBIESKI = KOAGULACJA