

PL SPOSÓB UŻYCIA:

Otworzyć opakowanie, wyjąć opatrunek i natychmiast nałożyć na miejsce oparzenia tak, aby nie uciskać rany.

Żel nakładać grubą warstwą na oparzone miejsce.
Nie wcierać w skórę.

Ostrzeżenia:

Do użytku zewnętrznego. Jeśli w ciągu 7 dni od rozpoczęcia leczenia stan oparzenia nie uległ poprawie oraz w przypadku podrażnienia, zaczerwienienia, obrzęku, bólu, reakcji alergicznej lub infekcji, opatrunek należy usunąć i skonsultować się z lekarzem.