

PROBÓWKI DO WIRÓWEK

WYRÓB DO DIAGNOSTYKI IN VITRO Z OZNACZENIEM CE
Do profesjonalnego użytku sanitarnego

Typ próbek: krew, surowica lub próbka moczu

INSTRUKCJA UŻYWANIA

- 1) Sprawdzić informacje o produkcie i stan opakowania.
- 2) Zapisać na etykiecie odpowiednie informacje (nazwisko pacjenta, test, próbkę itd.).
- 3) Otworzyć probówkę do wirówek.
- 4) Używając odpowiedniego narzędzia, umieścić próbkę w probówce do rozcieńczania, przechowywania, wirowania, hodowli bakterii lub innych zastosowań.
- 5) Skutecznie zamknąć probówkę do wirówek jej korkiem, aby uniknąć wycieków podczas wirowania.

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

- Wyrób przeznaczony do użytku przez specjalistów w placówkach służby zdrowia;
- Używać rękawic ochronnych.
- Nie umieszczać wyrobu w pobliżu płomieni.
- Nie używać produktu, jeśli jest przeterminowany, uszkodzony lub jeśli opakowanie było otwarte.
- Nie zmieniać przeznaczenia wyrobu, każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe.
- Trzymać z dala od dzieci.
- Używać wyrobu tylko z odpowiednimi akcesoriami.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Produkt ten należy usuwać, zgodnie z lokalnymi przepisami, do pojemnika na odpady stwarzające zagrożenie biologiczne.
- Jest to wyrób do jednorazowego użytku. Ponowne użycie wyrobu spowoduje utratę wszystkich jego parametrów i właściwości.
- Każdy poważny incydent mający miejsce w związku z wyrobem należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi w kraju, w którym zamieszkuje pacjent.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

