



# **GIMA**

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

---

**CALZE A COMPRESSIONE FUNNY**  
**FUNNY COMPRESSION SOCKS**  
**CHAUSSETTES DE COMPRESSION FUNNY**  
**CALCETINES DE COMPRESIÓN FUNNY**  
**MEIAS DE COMPRESSÃO FUNNY**  
**FUNNY KOMPRESSIONSSTRÜMPFE**  
**ΑΣΤΕΙΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ**  
**FUNNY KOMPRESSIONSSTRUMPOR**  
**FUNNY SKARPETKI UCISKOWE**

---

**Cat. No. 6115100000 (GIMA 41200)**  
**6115100000 (GIMA 41201)**  
**6115100000 (GIMA 41205)**  
**6115100000 (GIMA 41206)**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής  
/ Tillverkare / Producent  
Shanghai Amigo Textile Co., Ltd.  
Room 301, Lane 222, Yehui Road,  
Qingpu District, Shanghai  
Made in China

POLSKIE

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### Skarpetki uciskowe

Dziękujemy za wybranie produktu marki Shanghai Amigo. Nasze produkty zapewnią wygodę i poczucie komfortu. Przyjemne uczucie lekkości i komfortu uzyskuje się dzięki dynamicznemu efektowi stopniowanej kompresji produktu.

Ucisk skarpet zmniejsza się od kostki w górę.

Sekcja pięty zapewnia:

- Właściwe ułożenie pięty na kieszonce pięty, co zapewnia większą stabilność.
- Właściwe ułożenie w punkcie maksymalnego ucisku, a także lepsze dopasowanie oraz większą nośność i elastyczność na całym obwodzie kostki.

Produkty Shanghai Amigo nie są urządzeniami medycznymi. Są wyjątkowo skuteczne przy łagodzeniu uczucia ciężkości i zmęczenia nóg.

#### Wskazania i zalecenia dotyczące noszenia skarpet uciskowych

Zaleca się zakładanie skarpet uciskowych od rana, zaraz po wstaniu z łóżka.

Skarpety uciskowe muszą być chronione przed kontaktem z olejkami, kremami lub maściami nanoszonymi na nogi w celach medycznych lub kosmetycznych.

Szorstkie paznokcie lub pierścionki o ostrych krawędziach mogą spowodować uszkodzenie tkaniny produktu.

W przypadku zakładania na mokrą skórę nanieść talk na stopę, aby ułatwić założenie skarpet.

1. Odwrócić skarpety na lewą stronę, z wyjątkiem części na stopę. Wyróć skarpety na lewą stronę, tak aby pięta pozostała na zewnątrz.
  - Używając obu rąk część na stopę i wsunąć stopę do skarpety, aż do pięty.
  - Odwrócić wewnętrzną część skarpety zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie pięty.
2. Wciągnąć skarpetę na resztę nogi, do kolana, wygładzając materiał dłonią.
  - Nigdy nie ciągnąć bezpośrednio za górny brzeg skarpety.
  - W przypadku rajstop postępuj zgodnie z procedurą opisaną powyżej, aż rajstopy osiągną poziom kolan na obu nogach.
3. Podciągnąć pozostałą część rajstop w górę do kroku, wygładzając materiał rękoma i sprawdzając, czy ucisk rozłożył się równomiernie.

#### Ogólne przeciwwskazania

Zaawansowany stan miażdżycy tętnic kończyn dolnych - Masywny obrzęk kończyn dolnych o charakterze patologicznym - Septyczne zapalenie żył

- Poważne zapalenie żył, jak bolesny obrzęk siniczny lub zapalenie naczyń chłonnych

- Zaawansowane neuropatie obwodowe (np. cukrzyca) - Inne zaburzenia czucia kończyn - Nietolerancje/alergie związane z materiałem skarpet uciskowych.

#### Względne przeciwwskazania

Wrzody i otwarte rany - Wilgotna dermatoza - Nieruchomość - Zastój w zapaleniu skóry - Nietrzymanie zastawek żył powierzchownych i głębokich. - Zakrzepica żył głębokich lub ostre zakrzepowe zapalenie żył - Zespół pozakrzepowy - W przypadku skarpet z silikonowymi brzegami może wystąpić podrażnienie skóry w przypadku nadwrażliwości

na materiał, z którego są wykonane

#### Specjalne ostrzeżenia

Skarpety uciskowe Shanghai Amigo należy nosić wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

W przypadku wystąpienia bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia skarpet uciskowych, należy je natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem lub sprzedawcą.

#### Skład materiałów

Nylon 65% - poliester 30% - spandex 5% Dostępne rozmiary: S- M- L- XL

#### Instrukcja prania

Skarpety można prać ręcznie lub w pralce.

- Pranie ręczne: używać detergentów do tkanin delikatnych. Dokładnie spłukać.
- Nie wykręcać. Nie suszyć maszynowo.
- Pralka: włożyć produkt do worka do prania lub do poszewki. Nie wybielać. Nie suszyć w suszarce.
- Nie czyścić chemicznie. Nie prasować.



#### Ostrzeżenie

Producent uchyla się od jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody dla osób lub mienia, które mogą być spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu lub jego używaniem niezgodnie z przewidzianym zastosowaniem

#### WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.