

PRZED UŻYCIEM, PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. PRZED UŻYCIEM, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.

PRZECIWSKAZANIA: Nieodpowiedni dla osób o wadze powyżej 242 lbs (110 kg) - Nie odpowiedni do używania na oblodzonych i śliskich powierzchniach. - Nieodpowiedni dla osób z uczuleniem na lateks.

WSKAZANIA: Aby rozłożyć łaskę, przytrzymać uchwyt i pozwolić składającemu się wałkowym segmentom rozłożyć się w kierunku ziemi. Aby uniknąć upadków, należy zawsze sprawdzić, czy pojedyncze segmenty wałkowe (Rys. 1) są bezpiecznie zablokowane w miejscu.

OSTRZEŻENIE: NIE demontować korpusu łaski. Wewnątrz łaski znajduje się elastyczna linka. Niekontrolowane uwolnienie wewnętrznej elastycznej linki może spowodować poważne obrażenia na niechronionych częściach ciała, w szczególności, oczu. Jeżeli linka ulegnie przecięciu, postrzępieniu lub uszkodzeniu, zaprzestać używania.

NIE rozciągać linki na długość większą niż ta niezbędna dla zdemontowania lub zamontowania segmentów.

REGULACJA WYSOKOŚCI ŁASKI: Poluzować blokadę twist lock przez jej obrócenie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara o kilka obrotów. Naciśnąć na przycisk blokujący i pociągnąć uchwyt do góry, aby wydłużyć, lub nacisnąć uchwyt w dół, aby skrócić. Pamiętać o ponownym docięciu blokady twist lock, po wyregulowaniu łaski do pożądanej wysokości.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć upadków, zawsze upewnić się, że pojedyncze segmenty wałkowe są bezpiecznie zablokowane w miejscu i przycisk blokujący jest w pełni załączony. Zawsze upewnić się, że obrotowa stopa drążka jest bezpiecznie dokręcona do łaski, aby uniknąć upadku.

SKŁADANIE ŁASKI: Łaskę można łatwo złożyć, do wygodnego rozmiaru podręcznego, przez oddzielenie od siebie 4 pojedynczych segmentów wałkowych. Przytrzymać każdy z zespołów segmentów wałkowych w pobliżu złącza i je rozdzielić. Pojedyncze segmenty wałkowe jednocześnie precyzyjnie się złączą.



UŻYWANIE ŚWIATEŁ NA ŁASCE: Przycisk w górnej części uchwytu łaski umożliwia włączenie światła. Naciśnąć jeden raz na przycisk, aby aktywować światło w przedniej części łaski. Naciśnąć ponownie, aby wyłączyć czerwone światło na podstawie uchwytu. Naciśnąć po raz trzeci, aby wyłączyć światła. Światło przednie może być obrócone, aby ustawić je w pożądanym kierunku.

SYGNAŁ SOS: Aby aktywować sygnał SOS, nacisnąć na przycisk z boku uchwytu, światło na podstawie zacznie migać i drążek wyemituje dźwięk alarmowy.

WYMIANA BATERII: Otworzyć komorę na baterie, w tylnej części uchwytu. Wyjąć ewentualnie zużyte baterie i poprawnie je utylizować. Użyć 2 baterii AAA. Włożyć je z zachowaniem poprawnej biegunowości (dodatni biegun na zewnątrz, po stronie sprężyn). Zamknąć pokrywę komory baterii. Regularnie sprawdzać łaskę pod kątem śladów zużycia, łącznie z ewentualnymi oznakami strzępienia na elastycznej linie lub zużycia na gumowej stopce. W przypadku stwierdzenia śladów zużycia, natychmiast zaprzestać używania.

OSTRZEŻENIE: Nie mieszać nowych i starych baterii. Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) i akumulatorów (niklowo-kadmowych).

WARUNKI GWARANCJI GIMA: Obowiązuje standardowa 12-miesięczna gwarancja B2B firmy Gima.

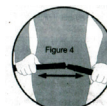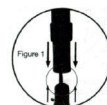

Gima 43050 - 43052

REF GB-806(1FOOT) GB-806(SKID PROOF)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaimistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Geïfabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilbered av/تصنيع بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made in China

Importato da/Imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Dovezeno od/Importat de/Importat de/
af/Importija/ Tuoja:/Uvezeno od strane/Importálta:/importēja/importavo/
Importert av/Geïmporteerde door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/importerad av/توريد بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

