



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**ESERCITATORE A PEDALI
BASIC PEDAL EXERCISER
APPAREIL D'EXERCICE À PÉDALE DE BASE
PEDALEADOR DE EJERCICIOS BÁSICO
EXERCITADOR DE PEDAL BÁSICO
BEWEGUNGSTRAINER MIT PEDALEN
ROTOR DO ĆWICZEŃ
MINI BICICLEȚĂ PENTRU EXERCIȚII
ALAP PEDÁLOZÓ GÉP
ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

Gima 43150

REF TD001P-2

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por
Eingeführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com





1



2



3

-
- POLSKI**
1. Połącz rury z każdej strony za pomocą śrub jak powyżej.
 2. Przymocować rezystor do głównej ramy przy użyciu śrub.
 3. Wyśrodkuj pokrętkę regulacyjną w otworze i przekręć je w stronę rezystora, aby dostosować intensywność ćwiczeń.

Uwaga: Umieścić produkt na gładkiej podłodze. Możliwe jest wykonywanie ćwiczeń rąk lub nóg do przodu lub do tyłu.

Ostrzeżenie: Nie stawać bezpośrednio na produkcie (max 40Kg).
Należy usiąść w celu wykonywania ćwiczeń nóg.

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.
