


GIMA 43430

 Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China

REF **KDB-506**

EC **REP** SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands

 **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

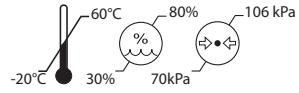

NAZWA PRODUKTU**Urządzenie do podnoszenia i przenoszenia****Numer modelu:** KDB-506**Pojemność wagowa:** 125 Kg.**ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE:**

Urządzenie do podnoszenia i przenoszenia pacjentów z paraliżem dolnej części ciała, schorzeniami nóg i stóp lub osób starszych z łóżka, wózka inwalidzkiego, siedziska lub deski sedesowej. Urządzenie pozwala na znaczne odciążenie opiekuna. Poprawia wydajność pielęgniarstwa i zmniejsza ryzyko pielęgniarstwa.

WSKAZÓWKI

Wyłącznie do użytku przez człowieka.

METODY CZYSZCZENIA / KONSERWACJA

W zależności od potrzeby, urządzenie czyścić ciepłą wodą lub alkoholem do pocierania i upewnić się, że kółka są wolne od brudu i włosów. Nie używać środków czyszczących zawierających fenol lub chlor, aby uniknąć uszkodzenia materiałów aluminiowych i poliamidowych.

Aby uniknąć powstawania rdzy i zapewnić żywotność produktu, przestrzegać wskazań dotyczących konserwacji podanych w poniższych punktach:

*Zawsze po użyciu usunąć substancje korozyjne, jak żel do mycia, szampon, itp.

*Dobrą praktyką jest ustawienie produktu w miejscu suchym i dobrze wentylowanym, po każdym użyciu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA

Przeczytać i przestrzegać środków ostrożności wskazanych poniżej, aby ułatwić używanie i zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie.

Przed użyciem, przeczytać i zrozumieć wskazania.

OSTRZEŻENIE - Ważne informacje bezpieczeństwa dotyczące zagrożeń, które mogą spowodować poważne obrażenia ciała

PRZESTROGA - Informacja dotycząca uniknięcia uszkodzeń produktu.

UWAGA - Informacja, na którą należy zwrócić szczególną uwagę.

OSTRZEŻENIE

*ZAWSZE zaplanować czynności podnoszenia, przed ich rozpoczęciem.

*ZAWSZE wykonać wskazania podane na LIŚCIE CODZIENNYCH KONTROLI, przed użyciem urządzenia.

*ZAWSZE zapoznać się ze sterownikami i funkcjami bezpieczeństwa urządzenia, przed podniesieniem pacjenta.

*NIE UŻYWAĆ urządzenia, jeżeli uległo uszkodzeniu.

*ZAWSZE zainstalować urządzenie w sposób zgodny z instrukcją.

*ZAWSZE sprawdzić, czy obciążenie robocze bezpieczeństwa urządzenia jest odpowiednie dla wagi pacjenta

*Podczas używania urządzenia ZAWSZE przestrzegać wskazań podanych w instrukcji użytkownika.

*Pacjenta podnosić ZAWSZE po uprzednim zablokowaniu kółek. Upewnić się, że przesuwacz jest poprawnie wyrównany ze środkiem ciężkości.

*NIE przemieszczać urządzenia przez pchanie za rozrusznik, wieszak lub pacjenta.

- *Urządzenie przemieszczać ZAWSZE za pomocą uchwytu do pchania.
- *Przed przeniesieniem, pacjenta ustawić ZAWSZE na minimalnej komfortowej pozycji.
- *NIE przemieszczać obciążonego urządzenia na prędkości wyższej niż 3km/h 0,8m/s.
- *NIE przemieszczać po nierównej i szorstkiej powierzchni. W szczególności, kiedy na urządzeniu znajduje się pacjent.
- *NIE wymuszać sterowników bezpieczeństwa. Wszystkie sterowniki są łatwe w użyciu i nie wymagają używania nadmiernej siły.
- *NIE parkować obciążonego urządzenia na powierzchniach pochyłych.
- *Pacjent może być podnoszony WYŁĄCZNIE przez osoby wyszkolone i autoryzowane.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Poniżej wskazana została charakterystyka środowiska, w którym urządzenie może być przechowywane i transportowane:

- a) Zakres temperatur: -20°C~+60°C.
- b) Zakres wilgotności względnej od 30% do 80%.
- c) Zakres ciśnienia atmosferycznego od 70kPa do 106kPa.

OPAKOWANIE:

Opakowanie składa się z 1 kartonu.

UTYLIZACJA

Zasady utylizacji są uzależnione od stopnia skażenia osiągniętego podczas używania. Należy przestrzegać przepisów krajowych i norm obowiązujących lokalnie.

Wszelkie poważne wypadki związane z dostarczoną przez nas wyrobem medycznym muszą być zgłoszone producentowi i właściwym organom państwa członkowskiego, w którym wyrób został wprowadzony do obrotu.

ETYKIETY, OPAKOWANIA PROJEKT LOGO:

Symbol	Oznaczający	Symbol	Oznaczający
	Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2017/745		Urządzenie medyczne
	Producent		Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej
	Data produkcji		Przechowywać z dala od światła słonecznego
	Numer partii		Nie sterylne
	Ostrzeżenie: Przeczytaj uważnie instrukcje (ostrzeżenia) dotyczące użytkowania i postępuj zgodnie z nimi		Kod produktu
	Przeczytaj instrukcję użytkowania		Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu
	Importowane z		Granica temperatury
	Granica wilgotności		Granica ciśnienia atmosferycznego
	Unikalny identyfikator		

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje standardowa 12-miesięczna gwarancja B2B firmy Gima.