

MÁSCARA DE PROTEÇÃO DEFENCE FFP3 NR D

INSTRUÇÕES DE USO

- O incumprimento de todas as instruções e limitações pode reduzir seriamente a eficácia deste respirador e pode acarretar doenças, lesões ou morte.
- Um respirador devidamente selecionado é essencial. Antes do uso profissional, o utilizador deve ser treinado pelo empregador a usar corretamente o respirador de acordo com os padrões de segurança e saúde aplicáveis.
- Este produto não fornece oxigénio. Use apenas em áreas adequadamente ventiladas contendo oxigénio suficiente para o suporte de vida.
- Descarte o respirador e substitua por um novo se:
 - o entupimento excessivo do respirador causar dificuldade respiratória;
 - o respirador ficar danificado.
- Abandone a área contaminada se sentir tontura, irritação ou outra indisposição.
- Mantenha os respiradores na caixa de exposição longe da luz solar direta até serem usados.
- O utilizador deve passar por um teste de ajustamento qualitativo e quantitativo antes de usar este respirador de acordo com a regra 29CFR1910.134.
- Antes de usar a máscara, o utilizador deve verificar se existem rachas ou manchas ao redor do ponto de soldadura, se for o caso, a máscara deve ser descartada de imediato e não pode ser usada novamente.
- Mantenha os respiradores não utilizados, fechados na sua caixa e armazene-os num local seco não contaminado entre + 5°C e + 38°C. A vida útil em armazém é de 3 anos a partir da data de fabrico.

LIMITAÇÕES DE USO

- NÃO use o respirador nem entre ou permaneça numa área contaminada sujeita às seguintes circunstâncias:
 - a atmosfera contém menos de 19,5% de oxigénio;
 - cheire ou prove contaminante;
 - para proteção contra gases ou vapores;
 - os contaminantes ou as suas concentrações são desconhecidos ou imediatamente perigosos para a vida ou saúde;
 - as concentrações de contaminantes excedem as concentrações máximas de uso nos padrões aplicáveis da OSHA ou regulamentos governamentais aplicáveis ou 50 vezes o PEL (Limite de exposição permitido), dentre estes o que for mais baixo;
 - para operações de jato de areia, pintura pulverizada e amianto;
 - uso em atmosferas explosivas
- NÃO modifique ou use indevidamente o respirador.
- NÃO use o respirador com pelos faciais ou quaisquer outras condições que possam impedir uma boa vedação facial.

Aviso:


Este respirador ajuda a proteger contra certos contaminantes particulados, mas não elimina a exposição ou o risco de contrair doenças ou infeções. O uso incorreto pode resultar em doença ou morte.

INSTRUÇÕES DE AJUSTAMENTO

- Coloque os dedos dentro do respirador. Dobre o clipe nasal em torno dos dedos para formar o formato do nariz.
- Segure o respirador na posição sobre o nariz e a boca, com as alças de cabeça em volta das costas da mão. Puxe a alça inferior por cima da cabeça e ajuste-a em volta por trás da nuca.
- Puxe a alça superior por cima da cabeça posicionando-a mesmo por cima das orelhas.
- Usando ambas as mãos, dê forma ao clipe nasal em redor do nariz e cruze as alças para garantir uma vedação facial efetiva.
- Verificação de vedação
 - Para testar o ajustamento de um respirador sem válvula de expiração, coloque ambas as mãos em concha sobre o respirador e expire com força.
 - Para testar o ajustamento de um respirador com válvula de expiração, coloque ambas as mãos em concha sobre a máscara e

inspire com força. Deve ser detetada uma pressão negativa dentro do respirador.

- Se sentir fluxo de ar na área do nariz, reajuste / aperte o clipe nasal.
 - Se sentir fluxo de ar em torno das bordas do respirador, reposicione o respirador / alça da cabeça para obter um ajustamento melhor.
- Troque a máscara imediatamente se a respiração ficar difícil ou a máscara ficar danificada ou distorcida.
 - Troque o respirador se não puder ser obtida uma vedação facial adequada.
 - O cumprimento rigoroso destas instruções é uma etapa importante para o uso do respirador em segurança.

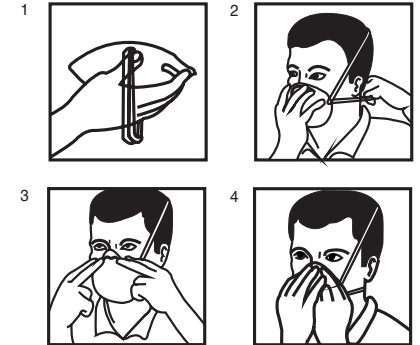

Índice de Símbolos

	Não estéril		Consulte as instruções de uso
	Fabricante		Data de fabrico
	Código produto		Número de lote
	Data de validade		Guardar ao abrigo da luz solar
	Limite de humidade		Limite de temperatura
	Dispositivo descartável, não reutilizar		Equipamento de proteção individual em conformidade com o regulamento da UE 2016/425