

MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE DI TIPO II DOPPIO STRATO AD USO MEDICALE
TYPE II WASHABLE DOUBLE LAYERED SURGICAL MASK FOR MEDICAL USE
MASQUE CHIRURGICAL LAVABLE À DOUBLE COUCHE DE TYPE II À USAGE MÉDICAL

TYP II WASCHBARE DOPPELLAGIGE CHIRURGISCHE MASKE FÜR MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN

MASCARILLA FACIAL QUIRÚRGICA DE DOS CAPAS TIPO II LAVABLE PARA USO MÉDICO
MÁSCARA CIRÚRGICA DE CAMADA DUPLA LAVÁVEL TIPO II PARA USO MÉDICO

TYP II TVÄTTBART KIRURGMUNSKYDD MED DUBBELT SKIKT FÖR MEDICINSK ANVÄNDNING

ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ II ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

DWUWARSTWOWA MASKA CHIRURGICZNA MEDYCZNA MOŻLIWA DO PRANIA TYPU II
MASCĂ CHIRURGICALĂ DE UZ MEDICAL, DE TIP II, LAVABILĂ, CU 2 STRATURI

قناع جراحي بطبقة مزدوجة قابل للغسيل ومن النوع الثاني للاستخدام الطبي

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Vertrieben von
Distribuido por / Distribuído por / Distribuēras av / Διανέμεται από / Rozprowadzana przez / Distribuit de / توزیع :



REF 20756 / BP2020V3TN S

MYCROCLEAN ITALIA SRL
Via Carlo Porta, 14
20064 Gorgonzola - Italy
Made in Italy



LOT Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette
Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo
Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta
Consultati eticheta / انظر الملصق

Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette
Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo
Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta
Consultati eticheta / انظر الملصق

UNI EN 14683:2019



8 023279 207569



000001



IT - La mascherina deve essere indossata come mostrato nella foto. Parte piccola sul naso, parte grande sotto

GB - The mask must be worn as shown in the photo
Small part on the nose, large part below.

FR - Le masque doit être porté de la façon montrée dans la photo : petite partie sur le nez, grande partie en-dessous.

DE - Die Maske muss, wie in der Abbildung gezeigt, getragen werden, d.h. der kleinere auf der Nase und der größere Teil unten.

ES - La mascarilla se debe colocar tal y como muestra la foto. Parte pequeña en la nariz, parte grande abajo.

PT - A máscara deve ser utilizada conforme mostrado na foto. Parte pequena sobre o nariz, parte grande para baixo.








SE - Ansiktsmasken ska bäras som fotot visar. Mindre del på näsan, större nedtill.

GR - Η μάσκα πρέπει να φοριέται όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Το μικρό τμήμα στη μύτη, το μεγάλο τμήμα.

PL - Maseczka musi być noszona w sposób pokazany na zdjęciu stronie. Mniejsza część na nosie, większa część pod brodą.

RO - Masca trebuie purtată așa cum se observă în fotografia. Partea mai îngustă pe nas, partea mai lată dedesubt.

SA - يجب ارتداء القناع كما هو موضح في الصورة على اليمين، الجزء الصغير على الأنف، الجزء الكبير أدناه

 REF	Código produto	 LOT	Número de lote
 Fabricante		 Data de fabrico	
 Não estéril		 Consulte as instruções de uso	
 CE	Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE		

PORTUGUÊS

1 - Descrição do produto e uso previsto

Máscara lavável em tecido 99% poliéster e 1% fibra de carbono, destinada à proteção do nariz e da boca.

2 - Classificação

As máscaras da série BP2020V3TN são classificadas como de Tipo II de acordo com a norma UNI EN 14683:2019.

3 - Características

O dispositivo, constituído por uma camada em tecido 99% poliéster e 1% fibra de carbono e por uma camada externa hidrorrepelente, pode ser lavada em máquina a até 60°C (o tecido resiste a até 150°C) Não estéril.

Valores de PFE: Filtração de partículas (%) 0,3 µm 0,5 µm ao 95%.

Tecido com resultado NÃO CITOTÓXICO em teste realizado em fibroblastos, de acordo com a norma UNI EN ISO 10993-5.

Filtração BFE

BFE = 99,8% (em testes de laboratório efetuados em conformidade com a norma UNI EN 14683:2019).

Carga biológica

UFC < 30 UFC (em testes de laboratório realizados em conformidade com a norma UNI EN 14683:2019). **Permeabilidade ao ar (cm² /cm³/seg) ASTM E96** (Conhecido também como ISO - 11092 ou teste Ret ou Hohenstein).

O resultado obtido nas máscaras da série BP2020 é de 7,5, portanto, bom ou muito transpirante.

4 - Modalidades de uso e advertência

Manipule com as mãos limpas e higienizadas, fazendo a máscara aderir bem ao rosto na posição correta, ou seja, com a parte menor no nariz e a maior sobre a boca e o queixo.

NÃO MODIFIQUE A MÁSCARA; NÃO CORTE OS ELÁSTICOS; USE NO SENTIDO CORRETO (conforme indicado na figura).

Caso contrário, a máscara perde sua função protetiva.

5 - Lavagem

À mão ou na máquina com detergente a até 60°C. **NÃO USE ALVEJANTE.**

Respeitando as indicações de uso e manutenção, o produto mantém as mesmas características físicas e técnicas por até 100 lavagens aproximadamente.

6 - Descarte

Máscara a ser descartada como RSU (a menos que tenha sido contaminada, caso em que deve ser descartada como "resíduo especial"). O saco externo deve ser descartado como plástico.