

**MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE  
DI TIPO II AD USO MEDICALE**

**TYPE II WASHABLE SURGICAL MASK  
FOR MEDICAL USE**

**MASQUE CHIRURGICAL LAVABLE  
DE TYPE II À USAGE MÉDICAL**

**TYP II WASCHBARE CHIRURGISCHE MASKE  
FÜR MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN**

**MASCARILLA FACIAL QUIRÚRGICA  
DE TIPO II LAVABLE PARA USO MÉDICO**

**MÁSCARA CIRÚRGICA LAVÁVEL TIPO II  
PARA USO MÉDICO**

**TYP II TVÁTTBART KIRURGMUNSKYDD MED  
FÖR MEDICINSK ANVÄNDNING**

**ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ  
ΤΥΠΟΥ II ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

**MASKA CHIRURGICZNA MEDYCZNA  
MOŻLIWA DO PRANIA TYPU II**

**MASCĂ CHIRURGICALĂ DE UZ MEDICAL,  
DE TIP II, LAVABILĂ**

قناع جراحي قابل للغسيل ومن النوع الثاني  
للاستخدام الطبي

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Vertrieben von  
Distribuido por / Distribuído por / Distribuēras av / Διανέμεται  
από / Rozprowadzana przez / Distribuit de / توزيع :



**REF 20771 / BP2020V3 -JUNIORS**

**MYCROCLEAN ITALIA SRL**  
Via Carlo Porta, 14  
20064 Gorgonzola - Italy  
Made in Italy

**LOT** Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette  
Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo  
Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta  
Consultați eticheta / انظر الملصق

Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette  
Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo  
Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta  
Consultați eticheta / انظر الملصق



UNI EN 14683:2019



000001



**JUNIOR**

**IT** - La mascherina deve essere indossata come mostrato nella foto. Parte piccola sul naso, parte grande sotto

**GB** - The mask must be worn as shown in the photo  
Small part on the nose, large part below.

**FR** - Le masque doit être porté de la façon montrée dans la photo : petite partie sur le nez, grande partie en-dessous.

**DE** - Die Maske muss, wie in der Abbildung gezeigt, getragen werden, d.h. der kleinere auf der Nase und der größere Teil unten.

**ES** - La mascarilla se debe colocar tal y como muestra la foto. Parte pequeña en la nariz, parte grande abajo.

**PT** - A máscara deve ser utilizada conforme mostrado na foto. Parte pequena sobre o nariz, parte grande para baixo.

**SE** - Ansiktsmasken ska bäras som fotot visar. Mindre del på näsan, större nedtill.

**GR** - Η μάσκα πρέπει να φοριέται όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Το μικρό τμήμα στη μύτη, το μεγάλο τμήμα.

**PL** - Maseczka musi być noszona w sposób pokazany na zdjęciu stronie. Mniejsza część na nosie, większa część pod brodą.








**RO** - Masca trebuie purtată așa cum se observă în fotografia. Partea mai îngustă pe nas, partea mai lată dedesubt.

**SA** - يجب ارتداء القناع كما هو موضح في الصورة على اليمين، الجزء الصغير على الأنف، الجزء الكبير أدناه

Respeitando as indicações de uso e manutenção, o produto mantém as mesmas características físicas e técnicas por até 500 lavagens aproximadamente.

#### 6 - Descarte

Máscara a ser descartada como RSU (a menos que tenha sido contaminada, caso em que deve ser descartada como "resíduo especial"). O saco externo deve ser descartado como plástico.

	Código produto		Número de lote
	Fabricante		Data de fabrico
	Não estéril		Consulte as instruções de uso
	Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE		

### PORTUGUÊS

#### 1 - Descrição do produto e uso previsto

Máscara lavável em tecido 99% poliéster e 1% fibra de carbono, destinada à proteção do nariz e da boca.

#### 2 - Classificação

As máscaras da série BP2020V3 são classificadas como de Tipo II de acordo com a norma UNI EN 14683:2019.

#### 3 - Características

O dispositivo, constituído por uma camada, pode ser lavado em máquina a até 60°C (o tecido resiste a até 150°C) Não estéril

**Valores de PFE: Filtração de partículas (%) 0,3 pm 0,5 pm ao 95%**

Tecido com resultado **NÃO CITOTÓXICO** em teste realizado em fibroblastos em conformidade com a norma UNI EN ISO 10993-5.

#### Filtração BFE

BFE = 99,8% (em testes de laboratório efetuados em conformidade com a norma UNI EN 14683:2019)

#### Carga biológica

UFC < 30 UFC (em testes de laboratório realizados em conformidade com a norma UNI EN 14683:2019) **Permeabilidade ao ar (cm2 /cm3/seg) ASTM E96** (Conhecido também como ISO - 11092 ou teste Ret ou Hohenstein)

O resultado obtido nas máscaras da série BP2020 é de 7,5, portanto, bom ou muito respirante

#### 4 - Modalidades de uso e advertência





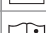

Manipule com as mãos limpas e higienizadas, fazendo a máscara aderir bem ao rosto na posição correta, ou seja, com a parte menor no nariz e a maior sobre a boca e o queixo.

**NÃO MODIFIQUE A MÁSCARA; NÃO CORTE OS ELÁSTICOS; USE NO SENTIDO CORRETO** (conforme indicado na figura)

**Caso contrário, a máscara perde sua função protetiva.**

#### 5 - Lavagem

À mão ou na máquina com detergente a até 60°C. **NÃO USE ALVEJANTE**

رقم الدفعة		كود المنتج	
تاريخ التصنيع		الشركة المصنعة	
اقرأ بدقة وحرس تعليمات الاستخدام		ليس معقم	
جهاز طبي يتوافق مع التوجيه 93/42/CEE			