

# BATA SMMS PADRÃO DESCARTÁVEL

## PORTUGUÊS

**Nome do produto** Bata SMMS Padrão Descartável

**Código do produto** FGS-SG-SM50-L, FGS-SG-SM50-XL, FGS-SG-SM50-XXL

**Tamanho do produto** Unidade: cm

CÓDIGO GIMA	21047	21048	21049
CÓDIGO FULL GUARD	FGS-SG-SM50-L	FGS-SG-SM50-XL	FGS-SG-SM50-XXL
Tamanhos	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Comprimento (do ombro à bainha)	120	130	130
Largura (mono camada)	150	150	150
Comprimento do cinto	65	65	65
Comprimento da manga	59	59	59
Desvio	±2	±2	±2

**Modelo do Produto** Tipo Bata. L/XL/XXL

**Estrutura e Composição** O produto utiliza 50g SMMS tecido não tecido. É composta por frente, costas, mangas, fitas e punho. O processo tecnológico consiste em corte, soldadura ultrassônica, fitas, velcro, punho, dobragem, selagem.

**Utilização prevista** Esses itens são esterilizados pelo método OE (óxido de etileno) e são utilizados como uma barreira à penetração de líquido e microbiana entre o paciente e a sala de operações, outros dispositivos cirúrgicos e o pessoal da sala de operações.

**Contraindicações** Os produtos podem ser utilizados apenas uma vez e devem ser utilizados imediatamente após a abertura da embalagem. Se a embalagem estiver danificada, o produto estiver húmido ou bolorento, não os utilize.

**Modo de utilização do produto** Abra a embalagem e retire o produto, sacuda suavemente a bata, levante as laterais da gola, insira as mãos nas mangas, estenda os braços para a frente e amarre os cintos.

**Armazenamento** Deve ser armazenado num sala limpa com humidade relativa não superior a 80%, sem gases corrosivos, armazenado em local fresco, seco e bem ventilado.

### ⚠ Aviso

1. Este produto é um produto descartável, não o reutilize.
2. Este produto é de uso único, nunca partilhe o seu produto com outra pessoa.
3. É proibido usar quando a embalagem ou o produto estiverem danificados.

**Nota: Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro no qual o utilizador ou paciente está estabelecido.**





















**Validade** 2 anos.

**Data de fabrico** Veja a data na embalagem

**Data de validade** Veja a data na embalagem

### CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

 REF	Código produto		Guardar ao abrigo da luz solar		Armazenar em local fresco e seco
 LOT	Número de lote		Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745		Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente
	Fabricante		Data de fabrico		Dispositivo médico
	Esterilizado com óxido de etileno		Data de validade		Não use se o pacote estiver danificado
	Granica wilgotnosci		Consulte as instruções de uso		Dispositivo descartável, não reutilizar
	Limite de temperatura		Representante autorizado na União Europeia		Frágil, manuseie com cuidado
	Este lado para cima		Manuseie com cuidado		

**REF** FGS-SG-SM50-L (21047)  
FGS-SG-SM50-XL (21048)  
FGS-SG-SM50-XXL (21049)



Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd  
Yongan East Avenue,  
Xianning Economic Development  
Zone, Xianning City, Hubei Province, China  
Made in China



ZOUSTECH S.L.  
Pso. Castellana, 141 - Planta 19,  
28046 - Madrid, Spain

**STERILE EO** **MD**

Eingeführt von / Importado por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

