

RUTSCHFESTER EINWEG-SCHUHÜBERZIEHER COBRE SAPATOS ANTIDERRAPANTE DESCARTÁVEL

PT
Nome do produto Cobre Sapatos Antiderrapante Descartável

Código do produto FGSCAS-PP35 (GIMA 21095)

Modelo do Produto Cobre-sapatos Normal, 15x40 cm

Estrutura e Composição A cobertura é feita com 35g de PP, com elástico para fixação, com elástico e impressão na parte inferior para antiderrapagem.

Utilização prevista Os produtos são utilizados principalmente para isolamento geral em ambulatórios, salas de tratamentos, de observação, de limpeza, laboratório etc. Destina-se a ser utilizado por profissionais de saúde em hospitais e clínicas para manter um bom nível de higiene e contribuir para o controlo de infeções.

Contraindicações Os produtos podem ser utilizados apenas uma vez e devem ser utilizados imediatamente após a abertura da embalagem. Se a embalagem estiver danificada, os produtos estiverem húmidos ou com mofo, não os utilize.

Modo de utilização do produto

1. Abra a embalagem do produto e retire o cobre-sapatos, estique os pés e estenda o cobre-sapatos sobre os pés.
2. Arranje os cobre-sapatos para garantir que estão bem colocados nos pés.

Armazenamento Deve ser armazenado num sala limpa com humidade relativa não superior a 80%, sem gases corrosivos, armazenado em local fresco, seco e bem ventilado.

Aviso

















1. Este produto é descartável, não reutilize.
2. Este produto é de uso único, nunca partilhe o seu produto com outra pessoa.
3. É proibido usar quando a embalagem ou as coberturas estiverem danificadas.

Nota: Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro no qual o utilizador ou paciente está estabelecido.


Validade 3 anos.

Data de fabrico Veja a data na embalagem

Data de validade Veja a data na embalagem

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|---|--|--|---|
|  REF | DE Erzeugniscode PT Código produto |  | DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern PT Guardar ao abrigo da luz solar |  | DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern PT Armazenar em local fresco e seco |  EG REF | DE Autorisierter Vertreter in der EG PT Representante autorizado na União Europeia |
|  LOT | DE Chargennummer PT Número de lote |  | DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 PT Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745 |  | DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente |  | DE Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden PT Dispositivo descartável, não reutilizar |
|  | DE Hersteller PT Fabricante |  | DE Herstellungsdatum PT Data de fabrico |  | DE Temperaturgrenzwert PT Limite de temperatura |  | DE Gebrauchsanweisung beachten PT Consulte as instruções de uso |
|  | DE Nicht steril PT Não estéril |  | DE Ablaufdatum PT Data de validade |  | DE Medizinprodukt PT Dispositivo médico |  | DE Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist PT Não use se o pacote estiver danificado |

REF FGSCAS-PP35 (GIMA 21095)

 Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development Zone,
Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

Eingeführt von / Importado por / Importowane przez / Importat de:
Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

 Humiss Beratung GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland

 MD

 NON
STERILE

 37°C
0°C

