



(PT) Leia cuidadosamente as instruções antes de utilizar.



(PT) Diâmetros disponíveis: 4 & 7 mm




(PT) Estéril. Apenas para UTILIZAÇÃO ÚNICA.

Se forem necessárias várias biópsias ou amostras do mesmo doente, deve-se utilizar um novo dispositivo de cada vez.


- Não voltar a esterilizar ou reutilizar devido ao risco de infeções.
- Não utilizar se a embalagem blister esterilizada estiver comprometida ou danificada.

1.  
(PT) A cureta é um dispositivo para remoção de tecido, incluindo excisão de lesões superficiais.


2. a.  
(PT) Para utilização das curetas recomendam-se duas técnicas. Seleccione a que melhor se adapta ao procedimento que vai realizar.

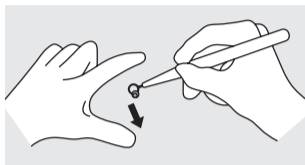

a.i.  
(PT) Técnica 1, a utilizada com maior frequência. Estire a pele com os dedos da mão não-dominante. Segure a cureta com o polegar e os dedos indicador e médio, colocando o lado afiado do anel na extremidade da lesão.

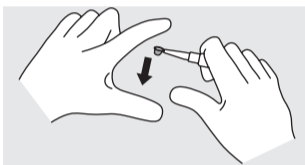

a.ii.  
(PT) Técnica 2, devido à menor precisão desta técnica, é mais adequada para pele mais espessa e dura. Segure a cureta com a ajuda dos 4 dedos, no espaço entre as articulações interfalângicas, colocando-a com o lado afiado do anel na extremidade da lesão. Utilize os polegares para obter uma base estável.

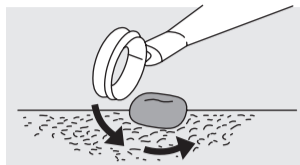

b.  
(PT) Oriente a cureta cuidadosamente, de modo a que a amostra de tecido possa ser retirada com uma única incisão.

3.



(PT) Esterilizado com óxido de etileno por: sfm medical devices GmbH, Brückenstrasse 5, D-63607 Wächtersbach.



GSK Consumer Healthcare (GMDT)  
Clocherane, Youghal Road,  
Dungarvan,  
Co. Waterford,  
Ireland



4.

(PT) Ver embalagem ou cartonagem para:



5.

(PT) GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos Lda., Rua Dr. António Loureiro Borges, n.º3, Arquiparque - Miraflores, 1495-131 Algés, PORTUGAL.