



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## **PAD ESERCITAZIONE SUTURA - SUTURE TRAINING PAD COUSSIN D'ENTRAÎNEMENT AUX SUTURES ALMOHADILLA DE ENTRENAMIENTO DE SUTURA ALMOFADA PARA TREINO DE SUTURA**

**Material:** Silicone

**Materiale:** Silicone

**Matériau:** Silicone

**Material:** Silicona

**Material:** Silicone

**Size:** 17.2x12x1.2cm

**Dimensioni:** 17,2x12x1,2 cm

**Dimensions:** 17,2x12x1,2 cm

**Dimensiones:** 17,2x12x1,2 cm

**Dimensões:** 17,2x12x1,2 cm

**Weight:** 240g

**Peso:** 240 g

**Poids:** 240 g

**Peso:** 240 g


**Peso:** 240 g




### **Técnicas de sutura**

A almofada de sutura fornece vários tipos de feridas. Poderá praticar as seguintes técnicas:


1. **Sutura interrompida simples:** simples e aplicada na maioria dos casos, cada ponto é fechado com um nó individual, utilizado na pele, tecido subcutâneo, músculo, na aponeurose, principalmente para feridas infeccionadas.

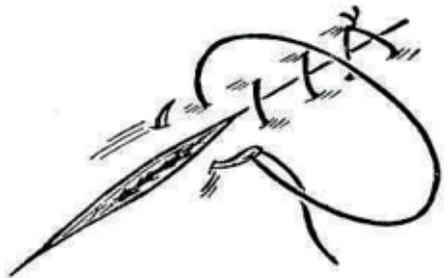


2. **Sutura contínua:** após o primeiro ponto, o fio não é cortado, mas usado para formar uma série contínua de laçadas sucessiva até a extremidade oposta da ferida, onde o fio é cortado com um nó final grosso.

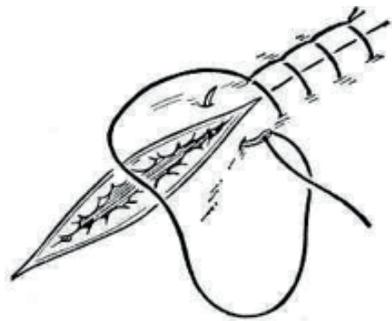

**3. Sutura entrelaçada contínua:** este método, que economiza tempo e oferece um bom efeito hemostático, consiste em entrelaçar o fio à alça anterior durante o processo de sutura; é usado principalmente para fechar o trato gastrointestinal e para suturar durante os transplantes de pele.

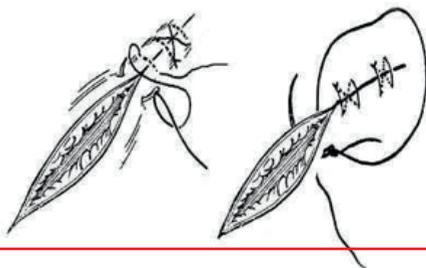

**4. Sutura em oito:** consiste em duas suturas intermitentes, seguras e rápidas, como as suturas de fásia.

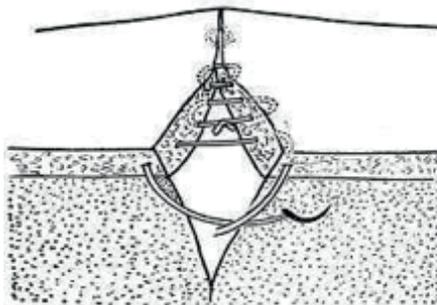

**5. Sutura subcuticular:** a agulha é inserida a partir de uma extremidade da incisão e, em seguida, cruza alternadamente a borda interior da incisão em ambos os lados até a extremidade oposta da incisão; finalmente o fio é fechado com um nó. Utiliza-se comumente para suturar incisões de pele exposta, por exemplo, na tireoidectomia cervical.

#### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

#### GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

#### CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

#### CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

#### CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

**Gima 23020**

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Fabricante  
Hangzhou Haizhu MIM products Co., Ltd.

No.868 shixin north Road, Hangzhou, 311215

Made in China

**REF B3361**

Importato da / Imported by / Importé de  
Importado de / importado por:

**Gima S.p.A.** Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com) - Made in China

