

Mission® Folheto informativo de impressora

REF C121-1021 Português

Utilização Prevista

A Impressora *Mission*® é uma impressora térmica. Pode ser ligada ao medidor *Mission*® e Medidor Ultra de Colesterol da *Mission*® e aos Medidores TP/IIN *Mission*® para imprimir o resultado do teste. Apenas para uso profissional.


PRECAUÇÕES

- Não toque no cortador de papel.
- Não toque na cabeça de impressão ou nos seus respetivos componentes. Poderá provocar queimaduras ou a impressora poderá danificar-se devido a electricidade estática.
- Desligue imediatamente o equipamento se este produzir fumo, um odor estranho ou ruído fora do comum. O uso continuado poderá provocar um incêndio. Desligue imediatamente o equipamento da tomada e contacte o distribuidor local para obter mais assistência.
- Não desmonte a impressora. Desmontar a impressora poderá ser perigoso e anulará a garantia.
- Certifique-se de que usa a fonte de alimentação específica. Ligar a impressora a uma fonte de alimentação inadequada poderá danificar o equipamento e provocar um incêndio.
- Evite os líquidos ou resíduos no interior da impressora. Se derramar água ou outro líquido sobre o equipamento, desligue imediatamente o cabo de alimentação. O uso continuado poderá provocar um incêndio.
- Não ligue os cabos de outra forma que não a mencionada neste manual. Ligações diferentes poderão danificar o equipamento.
- Certifique-se de que coloca este equipamento numa superfície firme, estável e horizontal. O produto poderá quebrar-se ou causar ferimentos se cair.
- Não utilizar em locais sujeitos a altos níveis de humidade e poeira. A humidade e poeira excessivas poderão danificar o equipamento.
- Não exponha este equipamento à luz solar direta, a um incêndio ou outras fontes de calor. Fazê-lo poderá afetar a qualidade da impressão.
- Desligue o equipamento se o mesmo não for utilizado durante um período prolongado.
- Certifique-se de que a impressora e o medidor estão desligados quando os ligar usando o cabo.

COMPONENTES DA IMPRESSORA


Impressora *Mission*®

1. Interruptor
2. Botão de abertura da tampa
3. Estrutura Inferior
4. Tampa de Compartimento do Papel
5. Cortador de Papel
6. Painel de Operações
7. Estrutura Superior
8. Adaptador de Tomada
9. Porta RS232

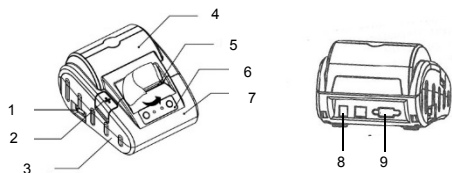

Painel de Operações

10. Botão SET
11. Luz POWER
12. Luz ERROR
13. Botão FEED

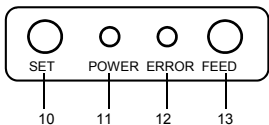

ESPECIFICAÇÃO

Caraterística	Especificação Técnica
Tipo de impressora	Impressão Térmica Direta
Compatível com	sistemas de monitoramento de colesterol <i>Mission</i> ® e Ultra <i>Mission</i> ® e com o sistema de monitoramento TP/IIN <i>Mission</i> ®
Dimensões	150 (C) x 120 (L) x 95 (A) mm
Largura do Papel de Impressão	58 mm
Velocidade de Impressão	60 mm/s
Caracteres por Linha	40
Resolução	8/mm (203dpi)
Potência	DC 7.5V/2A
Temperatura de Funcionamento	5~40 °C (41~104 °F)
Humidade de Funcionamento	10~80 %
Temperatura de Armazenamento	-20~60 °C (-4~140 °F)
Humidade de Armazenamento	10~90 %
Porta	RS232

MATERIAIS

Materiais Fornecidos

- Da Impressora
- Instruções
- Rolo de Papel
- Cabo
- Adaptador
- Cartão de Garantia

Materiais necessários mas não Fornecidos


- Medidor

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

Inserir o Papel

Certifique-se de que a impressora está DESLIGADA quando estiver a colocar ou mudar o papel.

1. Prima o Botão de Abertura da Tampa para abrir a Tampa do Compartimento do Papel. Ver Figura (1) abaixo.
2. Coloque o rolo de papel no compartimento do papel. Puxe o papel para fora e deixe algumas folhas extra por cima do Cortador de Papel. Ver Figura (2) abaixo. Feche cuidadosamente a Tampa do Compartimento do Papel.

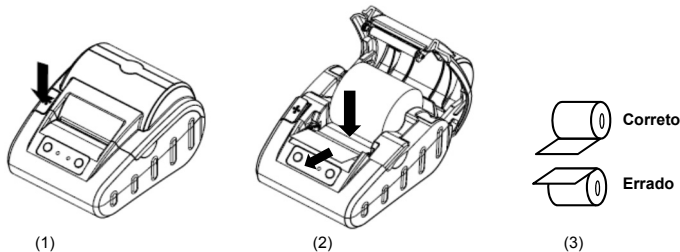

Cuidado:

- A impressora só imprime a superfície exterior do rolo. Se não for colocado corretamente, não haverá impressão. Ver figura (3) acima para instruções corretas sobre o rolo de papel.
 - Não force o fechamento da tampa do compartimento do papel. Feche cuidadosamente a tampa do compartimento do papel até que esta toque na toca a cabeça de impressão, empurre para baixo a tampa do compartimento do papel, ouvirá um "Clique" quando estiver bem fechada.
3. Ligue a impressora à tomada utilizado o adaptador fornecido. Prima o Interruptor vermelho no lado esquerdo para ligar a impressora.
 4. Prima o Botão FEED para inserir o papel.

Cuidado:

- Quando a impressora estiver ligada, não puxe nem empurre manualmente o papel.
- Não prima o Botão FEED quando a impressora não tiver papel.

Impressão de Teste

A Impressora *Mission*® tem a função de impressão de teste para garantir que a impressora funciona corretamente. Para fazer a impressão de teste:

1. Certifique-se de que o rolo de papel foi carregado.
2. Mantenha o Botão FEED pressionado, depois ligue a impressora, esta iniciará a impressão de teste e imprimirá o mesmo.
3. Liberte o Botão FEED depois da impressão iniciar. A página de teste conterá o número do modelo da impressora, o número da versão de software, as informações sobre as definições da impressora as letras 128 ANK e assim por diante. Se a impressão de teste falhar, contacte o seu distribuidor local e peça ajuda.

Preparação para Impressão

1. Ligue a Impressora ao medidor de colesterol *Mission*® ou *Mission*® Ultra ou *Mission*® TP/IIN com o mini cabo USB-RS232 incluído na impressora.

Nota:

- Certifique-se que a impressora e o medidor estão desligados quando os ligar utilizando o cabo.
 - Os mini cabos USB-RS232 para os medidores de colesterol *Mission*® e Ultra *Mission*® e para o medidor TP/IIN *Mission*® são diferentes e não podem ser utilizados de forma errada. O cabo para o medidor de colesterol *Mission*® e Medidor TP/IIN *Mission*® é preto e o cabo para o medidor de colesterol Ultra *Mission*® é cinzento. Certifique-se de que verifica a etiqueta saco do cabo e usa o cabo correto antes de imprimir.
2. Ligue a impressora à tomada, utilizado o adaptador.
 3. Certifique-se de que o rolo de papel está carregado na Impressora *Mission*®.
 4. Ligue a impressora ao premir o Botão de Alimentação vermelho no lado esquerdo da impressora.

Impressão

Assim que a preparação da impressão acima descrita esteja concluída, siga as instruções abaixo para trabalhar com o seu medidor de colesterol *Mission*®, Ultra *Mission*® ou Medidor TP/IIN *Mission*®, a impressora imprimirá o resultado do teste automaticamente:

Para o sistema de monitoramento de colesterol *Mission*®

- Imprima um resultado quando testar:
 1. Depois de adicionar a amostra, os resultados serão apresentados em 2 minutos. Prima ► para ver os resultados.
 2. Prima ⏏ para imprimir os dados.
- Imprima todos os resultados da memória:

No ecrã de Definições do Medidor de Colesterol *Mission*®, prima ◀ ou ► até que **PC** apareça.

 1. Prima ⏏ para ativar o modo de Comunicação de Dados. **Aparecerá MEM.**
 2. Prima ⏏ para imprimir todos os dados. Assim que a impressão estiver concluída, o medidor regressará ao Menu de Definições.
- Imprima um resultado selecionado da memória:
 1. No ecrã de teste inicial do medidor de Colesterol *Mission*®, prima ◀ ou ► para introduzir a memória/base de dados.
 2. Prima ◀ ou ► para selecionar a memória dos respetivos testes: Individual ou 3-1.
 3. Prima ⏏ para aceder ao ecrã de memória selecionada. O ecrã apresentará os resultados mais recentes. Prima ◀ ou ► ou seleccione o Nº. De resultados e aceda a cada registo na sequência dia/hora. Para ver os resultados do teste 3-1, prima ⏏ para inserir o registo. Prima ⏏ para imprimir os dados selecionados.

Para o sistema de monitoramento de colesterol Ultra *Mission*®

- Imprimir os dados ao testar:

O resultado será apresentado em 70s após adicionar a amostra e será impresso automaticamente sem premir qualquer botão.

- Imprimir todos os dados da memória:

1. Prima os botões <S> e <M> em simultâneo e o medidor irá ativar o modo de Comunicação de PC.
2. Prima novamente o botão <M> e o medidor apresentará o símbolo **PC** no ecrã e iniciará a transferência dos dados para a impressora. Em seguida, a impressora imprimirá todos os dados um a um. Durante a impressão, "to" será apresentado no ecrã.

Nota: A impressão de um dado da memória não pode ser executada pelo sistema de monitoramento de colesterol Ultra *Mission*®.

Para o sistema de monitoramento TP/IIN *Mission*®

- Imprimir um ou dez resultados da memória:

No ecrã de Definições do medidor TP/IIN *Mission*®, prima **Next** ► ou ◀ **Prev** até que apareça **Data Log**.

 1. Prima **OK** para ativar o Modo de Registo de Dados. Irá surgir a opção IIN ou PT IIN.
 2. Prima **Up** ou **Down** para selecionar o registo a imprimir.
 3. Prima **PRT/EX** para imprimir os dados no ecrã apresentado as opções de impressão de um ou dez registos. **One** significa que o registo indicado será impresso, enquanto que **Ten** significa que 10 registos consecutivos irão ser impressos, começando pelo registo atual. Assim que a impressão estiver concluída, prima **Exit** para voltar ao ecrã de Registo de Dados.
 4. Prima **Up** ou **Down** para selecionar outro registo, ou mantenha pressionado **PRT/EX** para sair do modo de Registo de Dados e voltar ao ecrã de definições.

INDICADORES DE LUZ

A Impressora *Mission*® tem dois indicadores de luz (Ver ilustração na secção "Componentes da Impressora", para mais detalhes). Uma **Luz POWER** verde, a outra **Luz ERROR** vermelha. A **Luz POWER** liga-se após a impressora ser ligada. A **Luz ERROR** desliga-se após a impressora funcionar corretamente. A **Luz ERROR** vermelha pisca como um aviso para quando existir alguma situação anormal como mencionada na tabela abaixo. A frequência com que pisca a **Luz ERROR** vermelha é diferente, indicando diferentes situações anormais.

Estado da Luz ERROR	Causas	Solução
A luz ERROR vermelha pisca continuamente.	A cabeça de impressão está em sobreaquecimento.	Desligue a impressora e o erro poderá ser resolvido automaticamente assim que a cabeça de impressão arrefeça.
	Sem papel	Carregar o novo rolo de papel.
A luz ERROR vermelha pisca uma ou várias vezes e, depois disso, está sempre acesa e depois repete o mesmo ciclo de intermitência.	A impressora encontra-se numa situação anormal e o erro não poderá ser resolvido automaticamente.	Desligue a impressora e entre em contato com o distribuidor local para obter mais ajuda.

GARANTIA

Preencha o cartão de garantia incluído na embalagem. Envie-o para o seu distribuidor local para registar a sua compra, no prazo de 30 dias após a mesma.

Para os seus registos, escreva a data da compra do seu kit de impressora aqui:

Nota: Esta garantia aplica-se apenas à impressora na sua compra original.


ACON Laboratories, Inc. garante ao comprador original que esta impressora se encontra livre de defeitos nos materiais e defeitos de fabrico durante um período de um ano (12 meses). O período de um ano começa a partir da data da compra ou instalação original, exceto como observado abaixo. Durante o período tido como ano 1, a **ACON** compromete-se a substituir a impressora sob garantia por uma impressora reparada ou, opcionalmente, reparar gratuitamente a impressora avariada. **A ACON** não se responsabiliza por despesas de envio relacionadas com a reparação da impressora.

Esta garantia está sujeita às exceções e limitações seguintes:

Esta garantia limita-se à reparação ou substituição devido a defeitos nas peças ou no fabrico. Peças necessárias mas que não estejam avariadas poderão ser substituídas mediante um custo adicional. **ACON** não deverá ser obrigada a fazer quaisquer reparações ou substituir quaisquer peças que sejam necessárias em virtude de abuso, acidentes, alteração, má utilização, negligência, mau funcionamento da impressora de acordo com as Instruções, ou manutenção por alguém que não a **ACON**. **A ACON** reserva-se o direito de fazer alterações no design deste medidor sem a obrigação de incorporar tais mudanças em impressoras anteriormente fabricadas.

Índice de Símbolos

	Fabricante		Catálogo #
	Número de Série		Representante Autorizado
	Consulte as instruções de utilização		Não coloque no lixo doméstico

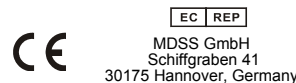

Número: 1150893601
Data efetiva: 2016-09-09