



PT ⚠ Atenção!

Instruções de segurança para o armazenamento e o manuseamento de microcuvetes de hemoglobina

As microcubetas de hemoglobina destinam-se exclusivamente à determinação da hemoglobina no sangue capilar e venoso e estão previstas para a utilização com os seguintes equipamentos: Hemo_Control, Hemo_Control Manager, Hemo_Vet, Hemo_Vet Manager. Estas devem ser utilizadas exclusivamente por pessoal qualificado.

Para mais informações, observe o manual de instruções do respectivo equipamento.

As cuvetes têm de ser armazenadas exclusivamente na sua embalagem original, entre 15°C a 30°C. As cuvetes fechadas nas latas de origem podem ser utilizadas até a data de validade impressa na lata. Após abertura da lata, as cuvetes ficam estáveis durante 3 meses, desde que correctamente manuseadas e sob as condições indicadas.

Retire apenas uma única cuvete da lata. Feche a lata imediata e cuidadosamente após retirada a cuvete (veja fig. 1.). Verifique se a tampa da lata de cuvetes está sempre hermeticamente fechada, em toda a volta (veja fig. 2.).

Se a tampa não ficar hermeticamente fechada (veja fig. 3.), a humidade pode penetrar na lata, destruindo os reagentes na cuvete. A utilização de tais cuvetes pode provocar resultados errados. Nunca utilize cuvetes provenientes de latas não correctamente fechadas!