




Throat Scope®

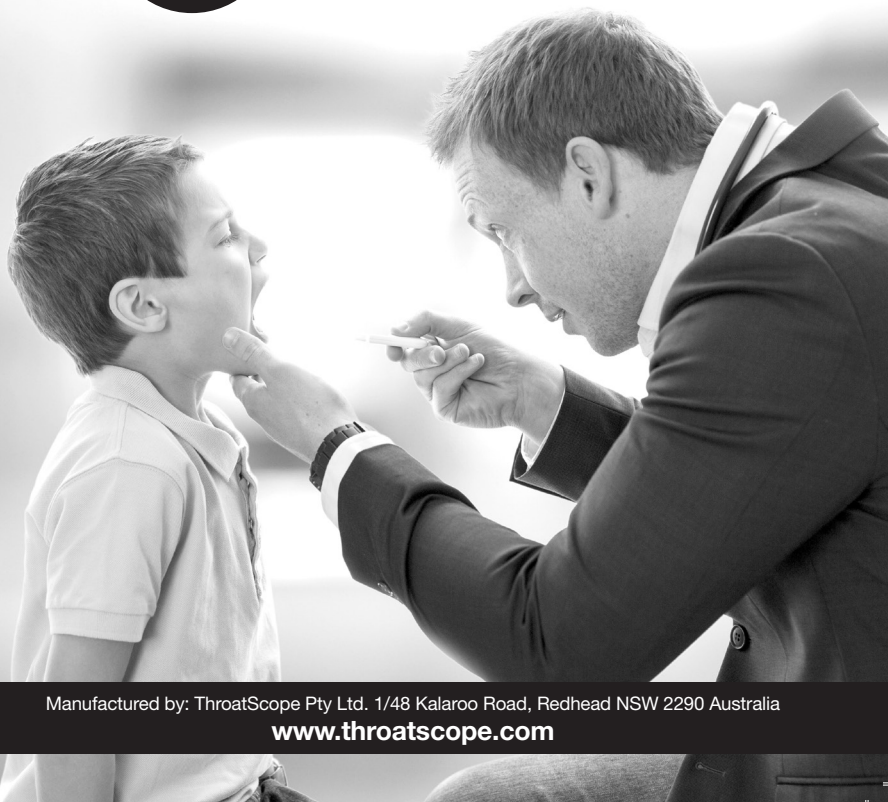

Manufactured by: ThroatScope Pty Ltd. 1/48 Kalaroo Road, Redhead NSW 2290 Australia

www.throatscope.com

Throat Scope

Abaixador de língua iluminado em lâmina descartável

Características

- Abaixador de língua iluminado que pode simultaneamente abaixar a língua e iluminar a boca.
- Unidade fina e leve
- Luz ativada automaticamente
- Operado com uma só mão
- Iluminador reutilizável
- Lâmina descartável
- 3 x iluminadores de LED potentes de longa duração

Instruções operacionais

Obrigado por adquirir um pacote de 50 unidades de Abaixadores de língua iluminados em lâminas descartáveis. Por favor, leia as seguintes instruções operacionais com atenção antes da utilização. Nota: O iluminador para o abaixador de língua iluminado é vendido separadamente.

Precauções e Advertências

- A lâmina descartável é para uso único. NÃO REUTILIZE-A. Não tente limpar a lâmina ou colocá-la na máquina de lavar louças. Por favor, descarte a lâmina após utilização.
- Entre as utilizações, limpe o iluminador com álcool isopropílico a 70% para reduzir o risco de contaminação cruzada.
- Somente para uso oral. O dispositivo tem como objetivo abaixar a língua e iluminar a boca.
- O dispositivo deve ser utilizado por profissionais de saúde. Caso esteja incerto ou desconfortável sobre o uso do dispositivo, consulte um profissional de saúde.
- Não dobre nem morda o iluminador.
- Não tente desmontar o iluminador.
- Descarte o iluminador quando a bateria estiver vazia.
- Mantenha fora do alcance de crianças não supervisionadas.

Instruções:

1. Insira a lâmina descartável no iluminador. A luz será ativada automaticamente após a inserção.
2. Insira o dispositivo na cavidade oral para utilização.
3. Quando terminar, remova a lâmina pressionando as suas pegas e descarte-a. A luz apagará automaticamente quando removida.
4. Depois da utilização, limpe completamente toda a superfície do iluminador com um pano umedecido em álcool isopropílico a 70%.

