


TERMÔMETRO DIGITAL DE PANTALLA ANCHA BL1 BL1 ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΘΘΟΝΗΣ

PORTUGUÊS

O termômetro digital eletrônico adota tecnologia de microcomputação científica. Supera as desvantagens tradicionais do termômetro de mercúrio da poluição por mercúrio e de uma leitura inconveniente com características de uma medição rápida, e um funcionamento seguro e simples.

Especificação

Intervalo de medição:	32,0°C~43,9°C (90°F~111°F)
Tempo de medição:	Cerca de 10 segundos
Precisão:	±0,1°C (±0,2°F) para 35,0~41,0°C (95°F~105,8°F) e ±0,2°C (±0,4°F) para o intervalo restante num ambiente de 22°C (71,6°F)
Visor:	LCD de 3 1/2 dígitos (unidade do ecrã: 0,1°C/0,1°F)
Pilha:	CR2032 de lítio
Vida útil das pilhas:	Cerca de 1000 vezes
Peso:	27g

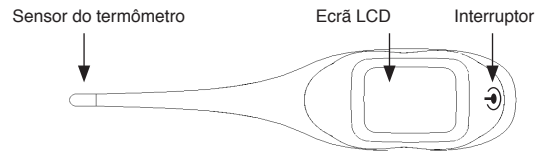

Como utilizar

- 1) Certifique-se de que a temperatura ambiente se encontra entre 16°C e 31°C antes de utilizar.
- 2) Prima o botão de alimentação, o ecrã mostra o segmento completo com um som "Bi", o qual indica alimentação suficiente.
- 3) Função de memória: após o segmento completo, o último valor medido com a letra de "Última memória" são apresentados.
- 4) Após 2S, irá apresentar "Lo°C" ou "Lo°F". Em seguida, o símbolo "°C" ou "°F" irá piscar. Aguarde para que "°C" ou "°F" pisque 3 vezes ao efetuar a medição.
- 5) Um tom de alarme será sentido durante cerca de 3 segundos, indicando que a medição terminou.
 - a. Alarme normal: som de "bibibibi...bibibibi...bibibibi..." com retroiluminação a verde durante 5 segundos significa temperatura normal abaixo de 37,6°C/99,7°F.
 - b. Alarme de febre: Som de "bibibibi...bibibibi...bibibibi..." com retroiluminação a vermelho durante 5 segundos significa febre, ou seja, que a temperatura está acima de 37,6°C/99,7°F.
- 6) Durante a medição: O LCD irá apresentar "Lo°C" ou "Lo°F", se a temperatura medida for inferior a 32,0°C (90°F) ou irá apresentar "Hi°C" ou "Hi°F" se a temperatura medida for superior a 43,9°C/111°F.
- 7) Desligue a unidade premindo levemente o botão de alimentação, ou deixe-o ligado durante alguns minutos. Irá desligar-se automaticamente para poupar energia.
- 8) Quando for usado para medir a temperatura de crianças, deve ser usado sob supervisão estrita por parte de adultos.
- 9) Para manter a precisão de cada medição, aguarde pelo menos 3 minutos antes de efetuar outra medição.
- 10) Como passar de "°C" para "°F": Prima o botão para ligar e mantenha premido até apresentar "Lo°C" (sem piscar) e, em seguida, solte o botão dentro de 2S e prima-o novamente. Pode alterar a unidade da temperatura de °C para °F ou vice-versa.



Segmento completo

Medição:

É aconselhável medir a sua temperatura a uma hora específica de manhã, se for mais cedo ou mais tarde, a temperatura pode estar mais baixa ou mais alta.

- 1) Usado na boca: Feche a boca durante 1 minuto para estabilizar a temperatura, respire calmamente pelo nariz. O ar respiratório pode afetar a precisão da medição na sua boca.
- 2) Utilizado no ânus ou reto: Esta é a forma mais estável de obter a temperatura e é adequada tanto para crianças como adultos. O sensor deve ser inserido 2~3 cm. Pode ser usada vaselina para facilitar a introdução.
- 3) Usado sob a axila: Limpe o termômetro com um pano seco e coloque-o sob a axila. Exerça pressão e fixe-o bem no braço. O valor da temperatura desta medição não é tão preciso não sendo recomendado para uma medição precisa


As temperaturas normais são diferentes consoante diferentes corpos e tempos de medição.

É necessário limpar antes de cada medição.

A medição não é precisa quando a pilha está quase gasta

Substituir a pilha

- 1) Quando o ecrã torna-se indistinto ou quando " " aparece no LCD, a pilha deve ser substituída de imediato, para obter uma medição precisa.
- 2) Para substituir a pilha, abra a tampa da parte final de acordo com a indicação com uma moeda e retire a pilha usada.
- 3) Ao substituir a pilha por outra nova, certifique-se de que utiliza uma CR2032 nova e, em seguida, insira a tampa com uma moeda. Evite danificar o anel vedante.

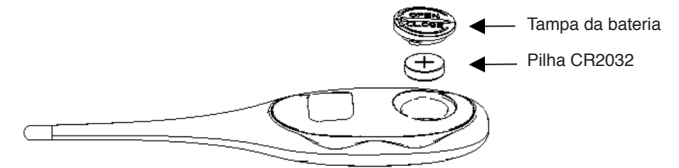


Limpeza e manutenção:

O termômetro é impermeável e pode ser limpo com água ou com loção de limpeza usando um pano suave: Recomenda-se a utilização da loção de limpeza seguinte:

Nome	Densidade
Álcool médico	75%

Notas: Outra loção, densidade ou método de limpeza podem danificar o termômetro. O produto não necessita de qualquer calibração e é recomendado para utilização durante 3 anos.

Observações:

- 1) É adequado para medição da temperatura do corpo humano e necessário de famílias.
- 2) Foi concebido e fabricado em conformidade com os requisitos relevantes da norma EN12470-3: Desempenho de termômetros elétricos compactos (não preditivos e preditivos) com dispositivo máximo.
- 3) Passou o teste de emissões CEM, o teste de imunidade de acordo com a norma EN60601-1-2 e o teste de biocompatibilidade de acordo com a norma MDD anexo I.
- 4)  De acordo com o grau de proteção contra eletrocussão, possui a classificação BF, de acordo com a norma EN60601-1.
- 5) Evite quedas, colisões ou batidelas.
- 6) Nunca o coloque em água a ferver para o esterilizar.
- 7) Nunca toque em nenhuma solução química e mantenha-o afastado da luz solar direta ou de fontes de calor, bem como de fontes eletromagnéticas fortes, para evitar interferências.
- 8) Deve funcionar num ambiente com uma temperatura de 10°C~35°C (50°F~95°F) e uma humidade de 40~80%, devendo ser armazenado e transportado num ambiente à temperatura de 0°C~40°C (32°F~104°F) e humidade de 30~90%.
- 9) Não remova nenhuma peça exceto substituir a pilha.
- 10) Substitua a pilha antes de reclamar a substituição por um produto novo.
- 11) Os resíduos do produto e bateria devem ser eliminados de acordo com os regulamentos nacionais relevantes.
- 12) Cuidado! Certifique-se de que tanto a pilha como o termômetro são mantidos afastados das crianças.
- 13) Para impedir a corrosão de fuga da pilha, remova a pilha se esta não for utilizada durante muito tempo.
- 14) O produto não necessita de qualquer calibração e é recomendado para utilização durante 3 anos.
- 15) As crianças devem ser sempre supervisionadas ao utilizar este produto. Após a monitorização da temperatura, a unidade deve ser removida de imediato da criança.

	Código produto		Número de lote		Fabricante
	Limite de humidade		Limite de temperatura		Data de fabrico
	Armazenar em local fresco e seco		Guardar ao abrigo da luz solar		Aparelho de tipo BF
	Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE		Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente		Siga as instruções de uso
	Representante autorizado na União Europeia		Disposição REEE		

 **Eliminação:** O produto não deve ser eliminado junto com outros detritos domésticos. Os utilizadores devem levar os aparelhos a serem eliminados junto do pontos de recolha indicados para a re-ciclagem dos aparelhos elétricos e eletrônicos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

REF 25553 / KD-602



YanCheng KellyUnion Import and Export Co., LTD
Room 2509, Building 1, Financial City, No.5,
Shiji Avenue, Chengnan New District,
224005 Yancheng City, P.R. China - Made in China

Importado por / Εισαγόμενα από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

EC REP **PROLINX GMBH**
Brehmstr. 56, 40239, Duesseldorf



0123